

SenSura[®] Mio Click Urostomibandage


Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Urology Care



1. Ta bort basplattan

Ta tag i örat på basplattan och håll samtidigt huden sträckt med den andra handen. Rulla långsamt och försiktigt basplattan nedåt.

Tips: För att skydda huden och fingrarna mot avföring vid avlägsnande av basplattan, ha gärna en fuktig kompress i handen. Tvätta och torka huden torr.

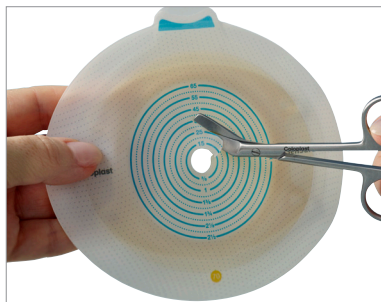

2. Förberedelse - klipp till häftan


Den använda påsen avlägsnas långsamt och förstiktigt från huden genom att ta tag i den vita fliken på häftan.

Undvik att dra i häftan när du avlägsnar den. Dra/rulla försiktigt häftan nedåt samtidigt som du trycker lätt mot huden med den andra handen.



3. Ta bort skyddsfilmen

Ta bort skyddsfilmen genom att sätta tummen på den turkos fliken på basplattan och dra bort skyddsfilmen.

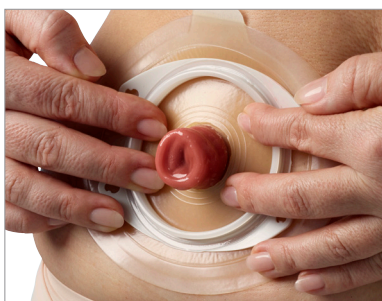

4. Applicera basplattan

Applicera basplattan över stomin och **tryck med fingrarna på plattan i 30-60 sekunder** för att säkerställa att häftan fäster ordentligt och att den passar perfekt på huden runt stomin.



5. Förslut påsen



6. Placera påsen på basplattan

Säkerställ att låsringen är öppen. Fäst ihop påsen och plattan med början nedifrån.



7. Kontrollera att den sitter rätt

Med början längst ner på påsen för du sakta dina pekfingrarna uppåt med ett lätt tryck, tills du känner att påsen är säkert applicerad på basplattan.




8. Stäng låsringen.

Tryck ihop den vågformade låsringen på bilden tills du hör ett ljudligt "klick". Klicket säkerställer att påsen sitter ordentligt fast på basplattan.

Byta påse

Det är viktigt att veta när påsen sitter säkert fast på basplattan och när du kan ta av den. Med hjälp av klick-kopplingen hör du ett tydligt "klick" när påsen kan tas av.

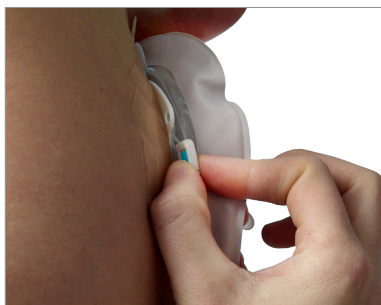

1. Öppna låsringen



2. Ta av påsen

Avlägsna påsen försiktigt genom att dra den uppåt och utåt från basplattan.





3. Ny påse

Tvätta rent basplattan och applicera därefter en ny påse. Stäng låsringen igen.

Tryck och tid - två viktiga parametrar

När häftan appliceras mot huden är det viktigt att "massera" fast häftan mot huden **under 30-60 sekunder** med ett lätt tryck. Börja innerst mot stomin och fortsätt sedan över hela plattan. Trycket gör att häftan fäster in ordentligt mot alla veck och rynkor som kan finnas i huden, och sitter därmed säkrare.

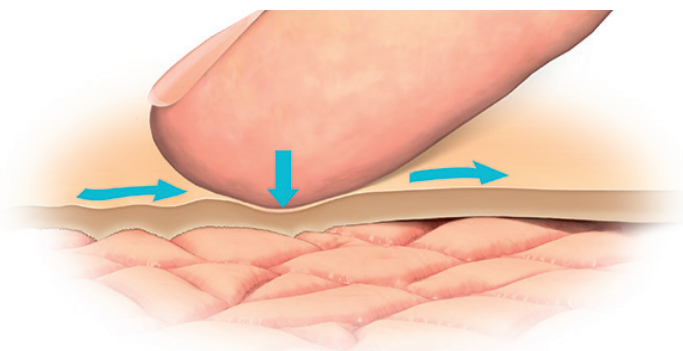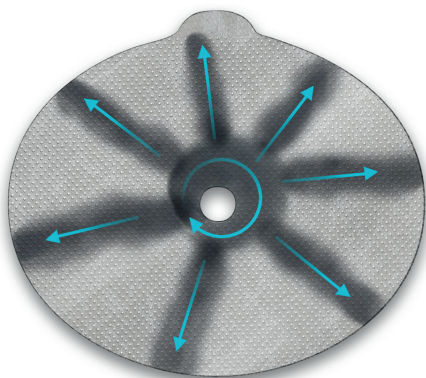

Mät diametern på din stomi regelbundet

Var uppmärksam på att din stomi kan ändra storlek och form, särskilt under den första tiden efter operationen. Ändrar stomin storlek ska du även ändra storleken på hålet du klipper i häftan.

Mät därför din stomi med jämna mellanrum. **OBS!** Vissa storlekar finns redan med färdiga hål och behöver inte klippas.

Upplever du problem med läckage kan det vara så att du behöver ändra på storleken på hålet i häftan.

Brava®

Brava® Häftborttagning

Häftborttagning som inte svider

Häftborttagning används för att underlätta borttagning av stomihäftan utan att påverka vidhäftningen av nästa stomihäfta. Den svider inte och finns både som spray och våtservett.

