

Hydrofil kateter för kvinnor, klar att använda direkt.



**Bruksanvisning**

23317413 Version 1

Coloplast-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Coloplast A/S. Med ensamrätt. ©

2015-10-26

**Indikationer**

Steril tappningskateter för intermittent kateterisering.

**Information**

Coloplast tar inget ansvar för eventuella skador eller förluster som kan uppstå om produkten används på ett sätt som strider mot Coloplasts aktuella rekommendationer.

Den vätska som katetern ligger i är ofarlig. Vätskan kan dock orsaka fläckar.

**Försiktighetsåtgärder**

Får inte användas om förpackningen är skadad.

Skyddas från solljus.

Kontakta vårdpersonal innan du utför självkateterisering för första gången.

Kontakta vårdpersonal om du:

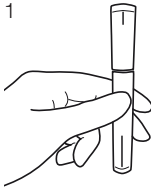
- får symptom som feber, obehag vid blåstömning, överaktiv blåsa eller blod i urinen.

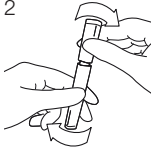
**Varningar**

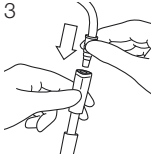
Återanvändning av engångsprodukten kan ge upphov till en potentiell risk för användaren. Ombearbetning, tvättning, desinficering och/eller sterilisering kan försämra produktens egenskaper och utsätta användaren för en ytterligare risk för fysiska skador eller infektion.

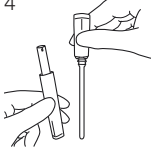
**Använda produkten**


**Öppna/förbereda produkten**

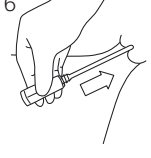
- 

Börja med att tvätta dina händer och området kring urinrörsmynningen.  
Håll produkten upprätt så att handtaget (den breda änden) pekar uppåt (1).
- 

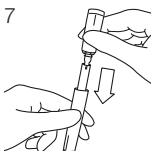
Öppna produkten genom att vrida handtaget åt valfritt håll för att bryta förseglingen. Du vet att produkten är oanvänd när du känner att handtaget lossnar från förpackningen (2).  
Dra handtaget cirka 2 cm uppåt tills du stöter på motstånd.  
  
I detta läge kan en urinpåse\* vid behov kopplas till handtaget.
- 

För in urinpåsens konnektor i öppningen överst på handtaget. Se till att konnektorn är ordentligt ansluten (3).
- 

Öppna produkten helt genom att dra handtaget rakt upp tills den sterila katetern visas helt. Det är viktigt att katetern inte böjs under öppnandet (4).
- 

De två ringarna under handtaget måste synas för att säkerställa att katetern är helt utdragen och klar för användning (5).
- 

För in katetern

För försiktigt in katetern i urinröret tills urin börjar rinna (6).
- 

**Avlägsna katetern**

Dra ut katetern en liten bit i taget när urinen slutat att rinna för att vara säker på att urinblåsan tömts helt. Avlägsna katetern långsamt när det inte kommer mer urin.  
  
Produkten kan återförslutas för transport och praktisk kassering genom att katetern förs in helt i förpackningen igen (7).  
  
Om en urinpåse har anslutits, måste den avlägsnas innan produkten kan återförslutas ordentligt.

**Kassera produkten**

Produkten är avsedd endast för engångsbruk och ska bortskaffas i det vanliga hushållsavfallet eller enligt lokala föreskrifter.

Spola inte ner produkten i toaletten.

\*Produkten kan användas med urinpåsar med en konnektorstorlek på högst 8,5 mm i diameter vid tippen.