

Latex-fri

PVC-fri

Ftalat-fri

Conveen® Optima

Urindroppssamlare

Den smarta och diskreta lösningen



Produktinformation

Användning

Urindroppssamlare för män, används i kombination med en urinuppsamlingspåse.

Urinläckage (inkontinens) kan ha olika omfattning alltifrån några droppar till ofrivillig tömning av hela blåsan. En urindroppssamlare (uridom) ansluten till en urinuppsamlingspåse är en funktionell och bra lösning för män med urinläckage eller som har svårt att hinna till toaletten.

Huden kommer inte i kontakt med urin, som vid användning av absorberande skydd, så risken för hudirritation minskar och användaren slipper urinlukt.

Den är förpackad i en diskret förpackning som är enkel att ta med sig.

Fördelar

- Silikon
- PVC-, ftalat- och latexfri
- Självhäftande
- Skonsam mot huden
- Knickfri
- Enkel applicering
- Dubbelstripp
- Diskret förpackning



Conveen Optima har tilldelats priset "Look Good Feel Good 2006" från British Association of Urological Nurses, för den mest innovativa kontinensprodukten.

Conveen Optima har också tilldelats det internationella designpriset "Medical Design Excellence Award".



Funktioner

Conveen Optima är en självhäftande urindropsamlare i silikon som är skonsam mot huden. Genom att dra i dubbelstrippen rullas Conveen Optima enkelt och jämnt ut över penis och kramas sedan till för att få ordentligt fäste.



Knickfri


Urindropsamlaren är knickfri, vilket säkerställer att urinen rinner fritt i alla lägen. Konnektoring och räfflor gör att urinen passerar utan möjlighet till läckage.

Conveen Optima kan sitta på i ett dygn, innan det är dags att byta.






Användartips

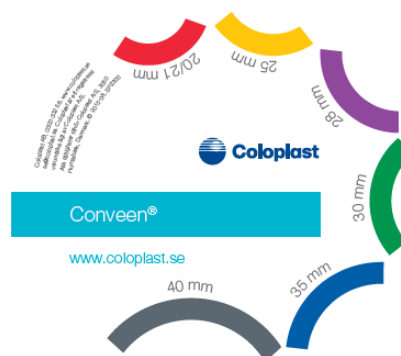



Vid tvätt av penis, använd inte återfettande tvål för att säkerställa att urindropsamlaren fäst ordentligt.

Det är viktigt att ha rätt storlek på urindropsamlaren. Penis ska mätas vid bredaste diametern i avslappnat tillstånd. Om storleken på penis är mellan två storlekar bör den mindre storleken väljas. Använd t ex Conveen måttsticka som kan beställas utan kostnad från Coloplast kundservice, tel 0300-332 99



Produktsortiment

Conveen Optima Standard	Omkrets mm	Diameter mm	Längd mm	Förp styck	Coloplast art nr
	80	25	85	30	220250
	85	28	85	30	220280
	90	30	85	30	220300
	105	35	85	30	220350
	125	40	85	30	220400

Conveen Optima Kort	Omkrets mm	Diameter mm	Längd mm	Förp styck	Coloplast art nr
	70	21	55	30	221210
	80	25	55	30	221250
	90	30	55	30	221300
	105	35	55	30	221350

Användarinstruktioner

För instruktioner hur Conveen Optima ska användas, se separat bruksanvisning.

Förvaring

Förvaras i rumstemperatur såvida inte annan information anges på eller i förpackningen.

Hållbarhet

Använd produkten före utgångsdatum angivet på förpackningen.



Miljöinformation

Conveen Optima

Art nr
220250, 220280, 220300, 220350, 220400,
221210, 221250, 221300, 221350

Medicinteknisk produkt

Conveen Optima är en medicinteknisk produkt enligt det medicintekniska direktivet, MDR (EU) 2017/745. Produkten har utvärderats enligt de krav som ställs på medicintekniska produkter. Enligt nuvarande kunskap, anses denna produkt vara giftfri.

Innehåll

Conveen Optima består huvudsakligen av polymermaterial.

Produkt

Silikon
Lim
Silikoniserad PP-film

Produktförpackning

Polyeten (PE)

Avdelningsförpackning

Kartong

Transportförpackning

Kartong

Avfallshantering

I hemmet

Produkten inklusive styckförpackning slängs med övrigt hushållsavfall. Lokala avfallsregler styr avfallshantering och ska följas.

Sjukhus

På sjukhus ska produkten slängas enligt rekommenderade föreskrifter och på godkänd anläggning.

Förpackning

Förpackningen som produkterna ligger i respektive transportförpackning återvinns som kartong.

Redan från allra första början av Coloplast produktutveckling, är miljön alltid en viktig del. Vid val av material, kemikalier och produktionsprocesser värderas den nya produktens påverkan på miljön. Vid utveckling av nya produkter görs en bedömning av produktens totala miljöpåverkan inklusive inköpt råmaterial.

Miljöpåverkan som sker under produktens tillverkningsprocess reduceras genom minimering av ingående material och energi, så väl som emissioner och avfall. Det förekommer ingen signifikant miljöpåverkan vid användning av produkten.

Coloplast AB är anslutet till och betalar avgift till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

