

Latex-fri

PVC-fri

Ftalat-fri

Conveen® Security+

Urinuppsamlingspåse

Benpåse



Produktinformation

Användning

Conveen Security+ är en urinuppsamlingspåse avsedd för patienter med urininkontinens och/eller retention av något slag.

Urinläckage (inkontinens) kan ha olika omfattning alltifrån några droppar till ofrivillig tömning av hela blåsan. Conveen Security+ urinuppsamlingspåse är, i kombination med alla typer av kvarliggande urinkatetrar och urindroppssamlare (uridom), en mycket praktisk lösning för att kontrollera urinblåsan.

Hålen i påsens övre del möjliggör att antingen sänghållare eller benfixering kan användas.

Återanvändning av engångsprodukten rekommenderas inte då kontaminering kan förekomma.

Påsen på benet är avsedd att användas när man är uppegående. Byt till sängpåse med större kapacitet när du ligger i sängen och sover.

Fördelar

- Säker fixering på låret
- Justerbar och knickfri slang
- Slutet system
- Backventil mellan påse och slang
- Klämma och tvåstegsutlopp signalerar tydligt om de är öppna eller stängda
- Tömbar
- Finns i 3 volymer
- Transparent framsida
- Volymgraderad (undantag 350 ml påsen)
- Inbyggd konnektor som passar till på marknaden förekommande urindroppssamlare
- PVC-, latex- och ftalatfri



Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Interventional Urology

Coloplast AB, Box 10171, 434 22 Kungälv. Tel 0300-332 56. PM
www.coloplast.com Coloplast logo är ett registrerat varumärke, ägt av Coloplast A/S. © 2021-12 Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S

 Coloplast

Funktioner

En tömbar påse med ett slutet system behöver inte bytas lika ofta och den kan kopplas till en annan påse för att få större uppsamlingsvolym (t ex nattetid). Alla påsar är försedda med backventil mellan påse och slang.

Benpåsen finns i 3 volymer och töms med hjälp av en klämman som är lätt att hantera med en hand. Klämman är lätt att hantera. Påsen kan öppnas med som mest 3 fingrar då klämman är lätt att öppna. Använd tex tumme, pekfinger och långfinger, valet av fingrar man använder är individuellt. Både klämman och tvåstegsutlopp signalerar tydligt om de är öppna eller stängda. Byt påse enligt gällande riktlinjer och rekommendationer, vanligtvis en gång per vecka.

Material

Urinpåsar är fria från PVC, ftalater och latex. Framsidan är transparent och volymgraderad*. Benpåsens baksida har ett hudvänligt och mjukt non-woven material.

Knickfri slang

Om slangen böjs kraftigt, rinner urinen fritt eftersom den är knickfri, liksom återtar ursprunglig form. Om du klipper av en slang, spara så mycket som möjligt av den släta delen, för att underlätta påtryckningen av konnektor. Slangen finns i olika längder och som avklippbar med lös konnektor eller med fast konnektor.



Produktsortiment

Conveen Security+	Avklippbar slang	Fast konnektor	Volym ml.	Slanglängd cm	Antal/fp.	Coloplast art nr
	Ja	Nej	350	30	30	051640
	Ja	Nej	500	30	30	051600
	Ja	Nej	500	50	30	051610
	Ja	Nej	750	30	30	051660
	Ja	Nej	750	50	30	051670

Conveen Security+	Avklippbar slang	Fast konnektor	Volym ml.	Slanglängd cm	Antal/fp.	Coloplast art nr
	Nej	Ja	350	30	30	051641
	Nej	Ja	500	6	30	210220
	Nej	Ja	500	30	30	051601
	Nej	Ja	500	50	30	051611
	Nej	Ja	750	30	30	051661
	Nej	Ja	750	50	30	051671

Användarinstruktioner

För instruktioner hur Conveen Security+ ska användas, se separat bruksanvisning.

Förvaring

Förvaras i rumstemperatur såvida inte annan information anges på eller i förpackningen.

Hållbarhet

Använd produkten före utgångsdatum angivet på förpackningen.

* gäller ej 350 ml påsen



Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Interventional Urology

Coloplast AB, Box 10171, 434 22 Kungsbacka. Tel 0300-332 56. PM
www.coloplast.com Coloplast logo är ett registrerat varumärke, ägt av Coloplast A/S. © 2021-12 Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S

