

Latex-fri

PVC-fri

Ftalat-fri

Conveen® Security+

Urinuppsamlingspåse

Sängpåse



Produktinformation

Användning


Conveen Security är en urinuppsamlingspåse avsedd för patienter med urininkontinens och/eller retention av något slag.

Urinläckage (inkontinens) kan ha olika omfattning alltifrån några droppar till ofrivillig tömning av hela blåsan. Conveen Security+ urinuppsamlingspåse är, i kombination med alla typer av kvarliggande urinkatetrar och urindropsamlare (uridom), en mycket praktisk lösning.

Återanvändning av engångsprodukten rekommenderas inte då kontaminering kan förekomma.

Fördelar

- Säker fixering på låret
- Justerbar och knickfri slang
- Slutet system
- Tvåstegsutlopp
- Backventil mellan påse och slang
- Tömbar
- Transparent framsida
- Volymgraderad
- Inbyggd konnektor som passar till på marknaden förekommande katetrar/urindropsamlare
- PVC-, latex- och ftalatfri

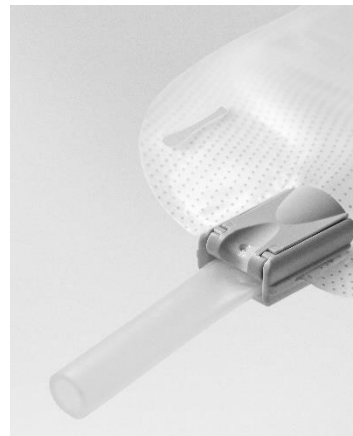

Funktioner

En tömbar påse med ett slutet system behöver inte bytas lika ofta och den kan kopplas till en annan påse för att få större uppsamlingsvolym (t ex nattetid). Påsen är försedda med backventil mellan påse och slang.

Sängpåsen rymmer 2 liter och dess tvåstegsutlopp kan öppnas med en hand och ger bra kontroll vid tömning. Både klämma och tvåstegsutlopp signalerar tydligt om de är öppna eller stängda. Byt påse enligt gällande riktlinjer och rekommendationer, vanligtvis en gång per vecka.

Urinpåsen är fri från PVC, ftalater och latex.

Knickfri slang

Om slangen böjs kraftigt rinner urinen fritt eftersom den är knickfri, liksom återtar ursprungsform. Slangen kan kortas av till önskvärd längd. Om du klipper av slangen, spara så mycket som möjligt av den släta delen, för att underlätta fastsättning av slangen på påsen.

Produktsortiment

Conveen Security+	Avklippbar slang	Fast konnektor	Volym ml.	Slanglängd cm	Antal/ fp.	Coloplast Art nr
	ja	ja	2000	140	10	213460

Användarinstruktioner

För instruktioner hur Conveen Security+ ska användas, se separat bruksanvisning.

Förvaring

Förvaras i rumstemperatur såvida inte annan information anges på eller i förpackningen.

Hållbarhet

Använd produkten före utgångsdatum angivet på förpackningen.

