

Latex-fri

PVC-fri

Ftalat-fri

# Conveen® Security+

## Urindroppssamlare

Kombipack med häftremsa



### Produktinformation

#### Användning

Urinuppsamling för män i kombination med en urinuppsamlingspåse.

Urinläckage (inkontinens) kan ha olika omfattning alltifrån några droppar till ofrivillig tömning av hela blåsan. En urindroppssamlare (uridom) ansluten till en urinuppsamlingspåse är en funktionell och bra lösning för män med urinläckage eller som har svårt att hinna till toaletten.

Huden kommer inte i kontakt med urin, som vid användning av absorberande skydd, så risken för hudirritation minskar och användaren slipper urinlukt.

Återanvändning av engångsprodukten rekommenderas inte då kontaminering kan förekomma.


#### Fördelar

- PVC- ftalat- och latexfri
- Dubbelhäftande häftremsa
- Knickfri
- Enkel applicering
- Hygienisk

#### Användartips

Vid tvätt av penis, använd inte återfettande tvål för att säkerställa att urindroppssamlaren fäst ordentligt.

Det är viktigt att ha rätt storlek på urindroppssamlaren. Penis ska mätas vid bredaste diametern i avslappnat tillstånd. Om storleken på penis är mellan två storlekar bör den mindre storleken väljas. Använd t ex Conveen mätsticka som kan beställas utan kostnad från Coloplast kundservice, tel 0300-332 99.

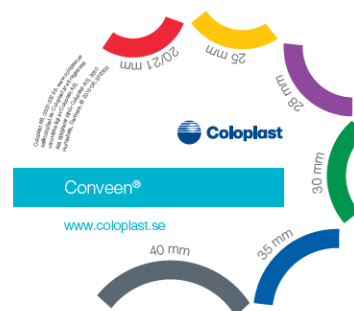

## Funktioner






Conveen Security+ med häftremsa ger en enkel och hygienisk applicering. Häftremsan är elastisk och dubbelhäftande och ger en säker fixering som hindrar läckage. Den är hudvänlig och lämnar inga häftrester vid borttagandet. Remsan ska appliceras omlott vid penisroten innan urindroppssamlaren rullas ut över penis och remsa.

Urindroppssamlaren är knickfri, vilket säkerställer att urinen rinner fritt i alla lägen, även om den böjs. Conveen Security+ kan sitta på i ett dygn, innan det är dags att byta.

Avlägsna produkten från urinuppsamlingspåsen. Fatta tag i urindroppssamlaren vid basen och rulla varsamt framåt.



## Produktsortiment

Conveen Security+	Omkrets mm	Diameter mm	Längd mm	Förp styck	Coloplast art nr
Kombipack med häftremsa	 70	21	82	30	050210
	 80	25	82	30	050250
	 90	30	82	30	050300
	 105	35	82	30	050350
	 125	40	82	30	050400
Häftremsa			113 x 16	20	051001



## Användarinstruktioner

För instruktioner hur Conveen Security+ ska användas, se separat bruksanvisning.

## Förvaring

Förvaras i rumstemperatur såvida inte annan information anges på eller i förpackningen.

## Hållbarhet

Använd produkten före utgångsdatum angivet på förpackningen.

