

Latex-fri

PVC-fri

Ftalat-fri

Conveen® Security+

Urinuppsamlingspåse

Benpåse



Produktinformation

Användning

Conveen Security+ är en tömbar urinuppsamlingspåse avsedd för patient som använder KAD eller uridom

Conveen Security+ urinuppsamlingspåse passar till på marknaden förekommande urinkatetrar och urindropsamlare.

Påsen är avsedd att användas när man är uppegående och hålen i påsens övre del möjliggör att fixeringsband kan användas.

Påsens tömningsventil går att vid behov seriekoppla med en annan urinpåse med större kapacitet.

Återanvändning av engångsprodukten rekommenderas inte då kontaminering kan förekomma.

Fördelar

- Säker fixering på låret
- Justerbar och knickfri slang
- Slutet system
- Backventil mellan påse och slang
- Tömningsventilen är enkel att öppna (vertikalt) och stänga
- Finns i 3 volymer
- Transparent framsida
- Volymgraderad (undantag 350 ml påsen)
- Inbyggd konnektor som passar till på marknaden förekommande urinkatetrar och urindropsamlare utan att ge läckage
- PVC-, latex- och ftalatfri



Funktioner

En tömbar påse med ett slutet system behöver inte bytas lika ofta och den kan kopplas till en annan påse för att få större uppsamlingsvolym (t ex nattetid). Alla påsar är försedda med backventil mellan påse och slang.

Byt påse enligt gällande riktlinjer och rekommendationer, vanligtvis en gång per vecka.

Material

Urinpåsarna är fria från PVC, ftalater och latex. Framsidan är transparent och volymgraderad*. Benpåsens baksida har ett hudvänligt och mjukt non-woven material.

Knickfri slang

Om slangen böjs kraftigt, rinner urinen fritt eftersom den är knickfri, liksom återtar ursprunglig form. Om du klipper av en slang, spara så mycket som möjligt av den släta delen, för att underlätta påtryckningen av konnektor. Slangen finns i olika längder och som avklippbar med lös konnektor eller med fast konnektor.



Produktsortiment

Conveen Security+	Avklippbar slang	Fast konnektor	Volym ml.	Slanglängd cm	Antal/fp.	Coloplast art nr
	Ja	Nej	350	30	30	051640
	Ja	Nej	500	30	30	051600
	Ja	Nej	500	50	30	051610
	Ja	Nej	750	30	30	051660
	Ja	Nej	750	50	30	051670

Conveen Security+	Avklippbar slang	Fast konnektor	Volym ml.	Slanglängd cm	Antal/fp.	Coloplast art nr
	Nej	Ja	350	30	30	051641
	Nej	Ja	500	6	30	210220
	Nej	Ja	500	30	30	051601
	Nej	Ja	500	50	30	051611
	Nej	Ja	750	30	30	051661
	Nej	Ja	750	50	30	051671

Användarinstruktioner

För instruktioner hur Conveen Security+ ska användas, se separat bruksanvisning.

Förvaring

Förvaras i rumstemperatur såvida inte annan information anges på eller i förpackningen.

Hållbarhet

Använd produkten före utgångsdatum angivet på förpackningen.

* gäller ej 350 ml påsen



Miljöinformation

Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Interventional Urology

Coloplast AB, Box 10171, 434 22 Kungälv. Tel 0300-332 56. PM
www.coloplast.com Coloplast logo är ett registrerat varumärke, ägt av Coloplast A/S. © 2021-12 Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S



Conveen Security+

Art nr

051640, 051600, 051610, 051660, 051670,
051641, 210220, 051601, 051611, 051661,
051671

Medicinteknisk produkt

Conveen Security+ är en medicinteknisk produkt enligt det medicintekniska direktivet, MDR (EU) 2017/745. Produkten har utvärderats enligt de krav som ställs på medicintekniska produkter. Enligt nuvarande kunskap, anses denna produkt vara giftfri.

Innehåll

Conveen Security+ består huvudsakligen av polymermaterial.

Produkt

Polyeten (PE)
Akrylnitril-butadien-styren (ABS)
Polyester (PET)
Polypropen (PP)
Etylvinylacetat (EVA)
EAA Poly(etylen-akryl)syra (EAA)
Etylenmetylakrylat (EMA)
SEBS Styren-eten/butylen-styren) (SEBS)
Silikon
Pigment

Produktförpackning

PA/PE film
Papper

Avdelningsförpackning

Kartong

Transportförpackning

Kartong

Avfallshantering

I hemmet

Produkten och plastpåsen som produkten ligger i, slängs med övrigt hushållsavfall. Lokala avfallsregler styr avfallshantering och ska följas.

Sjukhus

På sjukhus ska produkten slängas enligt rekommenderade föreskrifter och på godkänd anläggning.

Förpackning

Förpackningen som produkterna ligger i respektive transportförpackning återvinns som kartong

Redan från allra första början av Coloplast produktutveckling, är miljön alltid en viktig del. Vid val av material, kemikalier och produktionsprocesser värderas den nya produktens påverkan på miljön. Vid utveckling av nya produkter görs en bedömning av produktens totala miljöpåverkan inklusive inköpt råmaterial.

Miljöpåverkan som sker under produktens tillverkningsprocess reduceras genom minimering av ingående material och energi, så väl som emissioner och avfall. Det förekommer ingen signifikant miljöpåverkan vid användning av produkten. Coloplast AB är anslutet till och betalar avgift till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

