

Latex-fri

PVC-fri

Ftalat-fri

Conveen® Security+

Urindroppssamlare

Kombipack med häftremsa



Produktinformation

Användning

Urinuppsamling för män i kombination med en urinuppsamlingspåse.

Urinläckage (inkontinens) kan ha olika omfattning alltifrån några droppar till ofrivillig tömning av hela blåsan. En urindroppssamlare (uridom) ansluten till en urinuppsamlingspåse är en funktionell och bra lösning för män med urinläckage eller som har svårt att hinna till toaletten.

Huden kommer inte i kontakt med urin, som vid användning av absorberande skydd, så risken för hudirritation minskar och användaren slipper urinlukt.

Anslutningen passar till de på marknaden förekommande urinpåsar och anslutningen ger ett säkert skydd mot läckage.

Återanvändning av engångsprodukten rekommenderas inte då kontaminering kan förekomma.

Fördelar

- PVC- ftalat- och latexfri
- Dubbelhäftande häftremsa
- Knickfri
- Enkel applicering
- Hygienisk

Användartips

Vid tvätt av penis, använd inte återfettande tvål för att säkerställa att urindroppssamlaren fäst ordentligt.

Det är viktigt att ha rätt storlek på urindroppssamlaren. Penis ska mätas vid bredaste diametern i avslappnat tillstånd. Om storleken på penis är mellan två storlekar bör den mindre storleken väljas. Använd t ex Conveen mätsticka som kan beställas utan kostnad från Coloplast kundservice, tel 0300-332 99.



Funktioner

Conveen Security+ med häftremsa ger en enkel och hygienisk applicering. Häftremsan är elastisk och dubbelhäftande och ger en säker fixering som hindrar läckage. Den är hudvänlig och lämnar inga häftrester vid borttagandet. Remsan ska appliceras omlott vid penisroten innan urindroppssamlaren rullas ut över penis och remsa.

Urindroppssamlaren är knickfri, vilket säkerställer att urinen rinner fritt i alla lägen, även om den böjs. Conveen Security+ kan sitta på i ett dygn, innan det är dags att byta.

Avlägsna produkten från urinuppsamlingspåsen. Fatta tag i urindroppssamlaren vid basen och rulla varsamt framåt.



Tillbehör

Dubbelhäftande häftremsa. Häftremsan placeras runt penis mot penisroten och urindroppssamlaren rullas ut över häftremsan.

Produktsortiment

Conveen Security+	Om krets mm	Diameter mm	Längd mm	Förp styck	Coloplast art nr
Kombipack med häftremsa	● 70	21	82	30	050210
	● 80	25	82	30	050250
	● 90	30	82	30	050300
	● 105	35	82	30	050350
	● 125	40	82	30	050400
Häftremsa			113 x 16	20	051001



Användarinstruktioner

För instruktioner hur Conveen Security+ ska användas, se separat bruksanvisning.

Förvaring

Förvaras i rumstemperatur såvida inte annan information anges på eller i förpackningen.

Hållbarhet

Använd produkten före utgångsdatum angivet på förpackningen.



Miljöinformation

Conveen Security+

Art nr
050210, 050250, 050300, 050350, 050400,
051001

Medicinteknisk produkt

Conveen Security+ är en medicinteknisk produkt enligt det medicintekniska direktivet, MDR (EU) 2017/745. Produkten har utvärderats enligt de krav som ställs på medicintekniska produkter. Enligt nuvarande kunskap, anses denna produkt vara giftfri.

Innehåll

Conveen Security+ består huvudsakligen av polymermaterial.

Produkt

Styren-etylen-butylen (SEB)
Polypropen (PP)
Polyeten (PE)
Talkpulver
Lim
Pigment

Produktförpackning

PET/PE film

Avdelningsförpackning

Kartong

Transportförpackning

Kartong

Avfallshantering

I hemmet

Produkten inklusive styckförpackning slängs med övrigt hushållsavfall. Lokala avfallsregler styr avfallshantering och ska följas.

Sjukhus

På sjukhus ska produkten slängas enligt rekommenderade föreskrifter och på godkänd anläggning.

Förpackning

Förpackningen som produkterna ligger i respektive transportförpackning återvinns som kartong.

Redan från allra första början av Coloplast produktutveckling, är miljön alltid en viktig del. Vid val av material, kemikalier och produktionsprocesser värderas den nya produktens påverkan på miljön. Vid utveckling av nya produkter görs en bedömning av produktens totala miljöpåverkan inklusive inköpt råmaterial.

Miljöpåverkan som sker under produktens tillverkningsprocess reduceras genom minimering av ingående material och energi, så väl som emissioner och avfall. Det förekommer ingen signifikant miljöpåverkan vid användning av produkten.

Coloplast AB är anslutet till och betalar avgift till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

