

Latex-fri

Ftalat-fri

Conveen® Standard Urinuppsamlingspåse

Påse med stor volymkapacitet



Produktinformation

Användning

Conveen Standard är en urinuppsamlingspåse avsedd för patienter med urininkontinens och/eller retention av något slag.


Urinläckage (inkontinens) kan ha olika omfattning alltifrån några droppar till ofrivillig tömning av hela blåsan. Conveen Standard urinuppsamlingspåse är, i kombination med alla typer av kvarliggande urinkatetrar och urindroppssamlare (uridom), en mycket praktisk lösning för att kontrollera urinblåsan.

Conveen Standard har en volym på 1500 ml och lämplig vid behov av större volymkapaciteter. Den passar som både ben- och sängpåse.

Återanvändning av engångsprodukten rekommenderas inte då kontaminering kan förekomma.

Fördelar

- Justerbar och säker fixering
- Slutet system
- Backventil mellan påse och slang
- Slät slang som återtar sin form efter knickbildning
- Tömbar
- Konnektorn passar till marknadens förekommande katetrar och urindroppssamlare
- Hudvänlig non-woven material
- Transparent framsida
- Tydlig volymgradering
- Latex- och ftalatfri

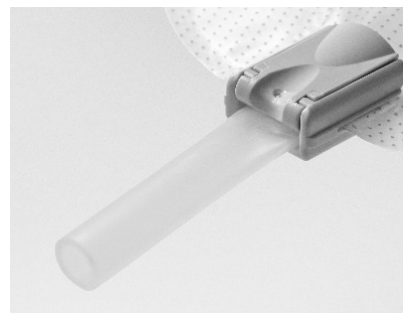

Funktioner

En tömbar påse med ett slutet system behöver inte bytas lika ofta och den kan kopplas till en annan påse för att få större uppsamlingsvolym (t ex nattetid). Påsen töms med hjälp av en klämma som är enkel att hantera och är försedda med backventil mellan påse och slang.

Påsen rymmer 1500 ml och dess tvåstegsutlopp kan öppnas med en hand och ger bra kontroll vid tömning. Både klämma och tvåstegsutlopp signalerar tydligt om de är öppna eller stängda.

Byt påse enligt gällande riktlinjer och rekommendationer, vanligtvis en gång per vecka.

Material

Baksidan har ett hudvänligt non-woven material som känns mjukt mot benet och framsidan är transparent. Conveen Standard är latex- och ftalatfri.

Produktsortiment

Conveen Standard	Avklippbar slang	Fast konnektor	Volym ml.	Slanglängd cm	Antal/ fp.	Coloplast Art nr
	Ja	Nej	1500	90	10	050620

Användarinstruktioner

För instruktioner hur Conveen Standard ska användas, se separat bruksanvisning.

Förvaring

Förvaras i rumstemperatur såvida inte annan information anges på eller i förpackningen.

Hållbarhet

Använd produkten före utgångsdatum angivet på förpackningen.

