


Peristeen®

Analpropp

Bidrar till god livskvalité vid avföringsläckage

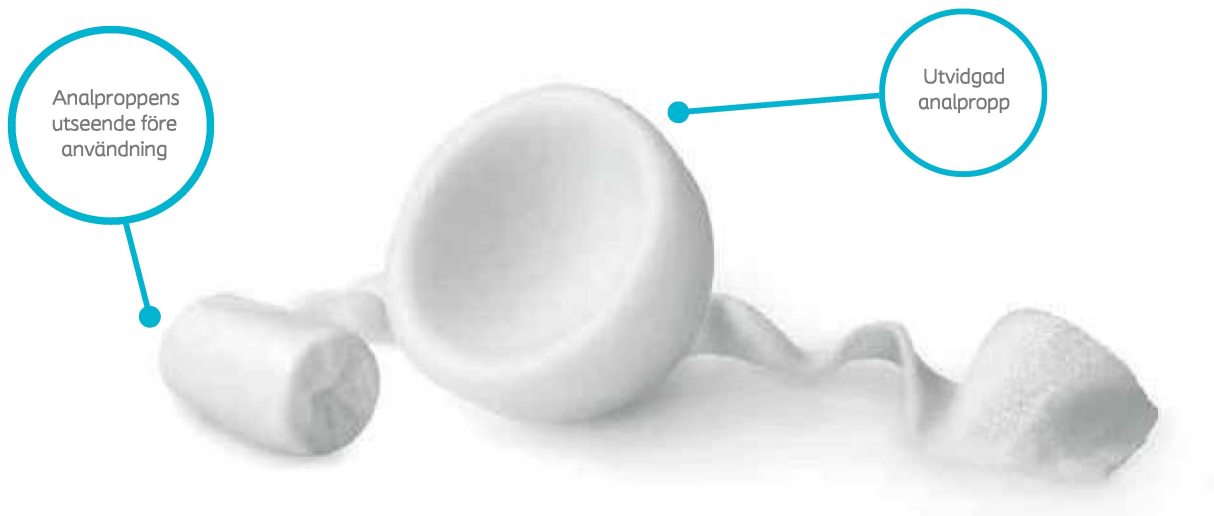

Analproppens utseende före användning

Utvidgad analpropp

i Produktbeskrivning

Enkel, säker och diskret

Peristeen analpropp är ett enkelt och effektivt hjälpmedel mot avföringsinkontinens. Den förhindrar okontrollerat läckage av fast avföring. Eftersom den är mycket liten, får analproppen plats i din ficka eller väska och ger dig självförtroendet att delta i aktiviteter där du behöver känna dig trygg, till exempel simning.

Analproppen förs in precis som ett stolpiller. Skummet har komprimerats till en liten storlek och täckts med en vattenlöslig film. När filmen utsätts för värme och fukt i ändtarmen, löses den upp- och proppen utvidgar sig och fyller ändtarmsöppningens form.

Funktion och egenskap

- Latexfri
- Effektiv och dokumenterad i kliniska studier*
- Förhindrar avföringsläckage och lukt
- Ger ökad frihet
- Säker
- Skadar inte rektalslemhinnan

* W. Pfrommer, A. M. Holschneider, N. Löffler, B. Schauff, B. M. Ure. A new Polyurethane Anal Plug in the Treatment of Incontinence after Anal Atresia repair (European Journal of Pediatric Surgery, October 2000:10, pp 186-190).

Har du frågor om våra produkter?

Kontakta Consumer Care på 0300-332 56 eller kundservice på 0300-332 99

i Produktinformation

Budskap

Med Peristeen analpropp stannar avföringen i tarmen, vilket:

- Minskar risken för t ex sår, obehaglig lukt, ofrivillig gasavgång.
- Ökar möjligheten till t ex bad, samliv och valet av klädsel.

Funktion

Förs in som ett stolpill, detta diskreta hjälpmedel hjälper till att:

- Förhindra okontrollerad tömning av fast avföring.
- Minska risken för hudirritation.
- Förebygga obehaglig lukt.

Lämplig vid

- Ofrivilligt läckage av avföring eller gaser hos vuxna och barn.

Får ej användas vid

- Analstenos.
- Hemorrojder (tredje & fjärde graden).

Viktigt vid användning

- Använd gel vid införandet.
- Användningstid max 12 timmar.

Vanligt problem

Avföringsinkontinens innebär nedsatt förmåga att hålla tätt för gaser och avföring och är ett relativt vanligt problem. Flertalet söker inte hjälp, utan försöker dölja sina problem med egna lösningar, men det behöver inte vara så.

Effektiv och unik problemlösare

Peristeen analpropp används vid avföringsinkontinens och hindrar avföringsläckage (även lös), lukt och hudirritationer. Vid användning vidgar sig analproppen och formar sig efter tarmväggen och sitter säkert på plats. Effektiviteten hos Peristeen analpropp är dokumenterad i kliniska studier.

Material

Analproppen är tillverkad i ett skummaterial och har ett polyesterband injutet. Analproppen hålls sammanpressad av en vattenlöslig film som löses upp när den kommer i kontakt med fukt och värme ifrån tarmen. Peristeen analpropp hindrar läckage i 12 timmar. Den kan tryggt användas varje dag. Produkten är latexfri.

i Sortiment

Peristeen analpropp	Längd millimeter	Diameter millimeter	Diameter utvidgad	Förpackning styck	Coloplast artikelnummer
Liten	26	12	37	20	014500
Stor	26	13	45	20	014510