

Enkel

Snabb

Skonsam

## SpeediCath® Compact Eve®

# Tappningskateter för kvinnor

*Den mest diskreta katetern*



## Produktinformation

### Användning

SpeediCath Compact Eve för kvinnor är en hydrofil tappningskateter för engångsbruk avsedd för ren intermitterent kateterisering (RIK) vid svårighet att tömma urinblåsan.

Urinen tappas ut genom att katetern förs in i urinblåsan via urinröret. Flöde uppstår pga att trycket på utsidan är lägre än trycket i urinblåsan.

### Indikationer

Steril tappningskateter för intermitterent kateterisering.



### Fördelar

- Klar att använda direkt
- Jämnt hydrofilt ytskikt - för minimal friktion
- Polerade kateterögon - för maximal komfort
- Enkel<sup>1</sup>, snabb<sup>1</sup> och skonsam<sup>2</sup> kateterisering.
- Minimal förberedelse och få handhavandesteg
- Enkel enstegsöppning som öppnas genom en liten vridning
- Ergonomisk trekantig form som gör katetern enkel att greppa och kontrollera – även för personer med nedsatt handfunktion
- Diskret design som ökar acceptansen och livskvaliteten vid kateterisering<sup>3,4</sup>
- Skräddarsydd för den kvinnliga anatomin
- Tillräckligt kort för att vara diskret, tillräckligt lång för att tömma blåsan effektivt<sup>5</sup>
- Storlekar som passar kvinnor och flickor
- Inbyggd konnektor som passar till på marknaden förekommande tillbehör
- Återförslutningsbar för praktisk och hygienisk kassering
- Klar vätska utan risk för fläckar
- PVC-, latex- och ftalatfri

Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Interventional Urology

Coloplast AB, Box 10171, 434 22 Kungälv. Tel 0300-332 56. PM-19329  
www.coloplast.com Coloplast logo är ett registrerat varumärke, ägt av Coloplast A/S. © 2021-11 Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S

## Varningar och försiktighet

SpeediCath Compact Eve är avsedd för engångsbruk och återanvändning av produkten kan ge upphov till en potentiell risk för användaren. Ombearbetning, rengöring, desinficering och/eller sterilisering kan försämra produktens egenskaper och utsätta användaren för ökad risk för fysiska skador eller infektion.

Vårdpersonal ska kontaktas innan man utför självkateterisering för första gången. Vårdpersonal ska kontaktas om man som användare får symptom som feber, obehag vid blåstömning, överaktiv blåsa eller blod i urinen.


SpeediCath Compact Eve ska inte användas om förpackningen är skadad.

## Funktioner

### Klar-att-använda direkt

Alla SpeediCath katetrar ligger i steril vätska och är klara för användning direkt.

### Avfasade, atraumatiska kateterögon

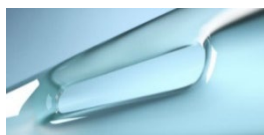

Genom att använda en tillverkningsprocess speciellt utvecklad för SpeediCath, är kanterna på varje kateteröga väl avfasade för att skapa en mjuk övergång mellan kateterögonen och kateterens yta och göra kateteriseringen så komfortabel och skonsam som möjligt.

## Unikt hydrofilt ytskikt

Alla SpeediCath katetrar har ett jämnt hydrofilt ytskikt för minimal friktion. Ytskiktet är utformat för att skydda uretra och är uppbyggd enligt följande:



1. Basytskiktet med hög viskositet, består av starkt tvärbundet PVP som säkerställer att ytskiktet förblir konstant under hela kateteriseringen.



2. Toppyskiktet med medium viskositet består av tvärbundet PVP med en konstant hög fuktighet, som gör ytan extremt hal och minimerar friktionen.



3. Steril vattenbaserad lösning med minimal viskositet gör ytan optimalt fuktad och klar att användas direkt.

## Koppling till urinpåse



Vid behov kan en urinpåse enkelt kopplas till en inbyggd konnektor. Katetern förblir steril när den kopplas till urinpåse.

## Produktsortiment

SpeediCath Compact Eve	Ch storlek	Längd cm	Antal/fp.	Coloplast art nr
Nelaton för flickor/kvinnor	● 10	9*	30	281109
	○ 12	9*	30	281129
	● 14	9*	30	281149

\*Kateterlängd exkl. handtagsdel

## Användarinstruktioner

För instruktioner hur SpeediCath Compact Eve ska användas, se separat bruksanvisning och steg-för-steg-instruktion på [coloplast.se](http://coloplast.se).

## Sterilisering

Produkten är steriliserad med hjälp av strålning.

## Förvaring

Förvaras i rumstemperatur såvida inte annan information anges på eller i förpackningen. Skydda produkten från solljus.

## Hållbarhet

Använd produkten före utgångsdatum angivet på förpackningen.

## Coloplast Care

### Helhetserbjudande med SpeediCath

Alla som använder SpeediCath tappningskatetrar erbjuds att gå med i Coloplast Care, ett kostnadsfritt medlemsprogram, som ger tillgång till:

- Personlig rådgivning, stöd och produktvägledning\* via telefon eller hemsida.
- Medlemstidningen RIKare Vetande som ges ut tre gånger per år.
- Digitala verktyg, användarberättelser och nyhetsbrev som hjälper användaren att ta kontroll över sin livssituation.

\*Kräver bekräftelse av giltig ordination

Anmälan till Coloplast Care görs via [coloplast.se/coloplast-care](http://coloplast.se/coloplast-care), telefon 0300-332 56 eller via e-post [se@coloplast.com](mailto:se@coloplast.com).

### Referenser:

1. Pascoe G, Clovis S. Evaluation of two coated catheters in intermittent self-catheterisation. Br J Nurs 2001;10:325-329.
2. Stensballe J et al. Hydrophilic coated catheters for intermittent catheterisation reduce urethral micro trauma. Eur Urol 2005;48(6):978-983.
3. Chartier-Kastler E et al. A prospective, randomized, crossover, multicenter study comparing quality of life using compact versus standard catheters for intermittent self-catheterization. J Urol 2013;190(3):942-947.
4. SCCE Evaluation (n=161), September 2015, Data on file.
5. Biering-Sørensen F, Hansen HV, Nielsen PN, et al. Residual urine after intermittent catheterization in females using two different catheters. Scand J Urol Nephrol 2007;41(4):341-345

