

Enkel

Snabb

Skonsam

SpeediCath® Compact Female

Tappningskateter för kvinnor

Den mest kompakta katetern



Produktinformation

Användning

SpeediCath Compact Female är en hydrofil tappningskateter för engångsbruk avsedd för ren intermittent kateterisering (RIK) vid svårighet att tömma urinblåsan.

Urinen tappas ut genom att katetern förs in i urinblåsan via urinröret. Flöde uppstår pga att trycket på utsidan är lägre än trycket i urinblåsan.

Indikationer

Steril tappningskateter för intermittent kateterisering.



Fördelar

- Klar-att-använda direkt
- Jämnt hydrofilt ytskikt - för minimal friktion
- Polerade kateterögon - för maximal komfort
- Enkel¹, snabb¹ och skonsam² kateterisering
- Minimal förberedelse och få handhavandesteg
- Enkel att öppna, även för personer med nedsatt handfunktion
- Diskret och kompakt design som leder till följsamhet och bättre livskvalitet³
- Skräddarsydd för den kvinnliga anatomin
- Tillräckligt kort för att vara diskret, tillräckligt lång för att tömma blåsan effektivt⁴
- Diskret och enkel att ta med och förvara
- Tillhandahålls i två längder och flera storlekar som passar kvinnor och flickor
- Kan enkelt kopplas till urinpåse, förlängningsslang eller spolspruta med hjälp av separat konnektor
- Konnektor som passar till på marknaden förekommande tillbehör
- Finns även SpeediBag som tillbehör
- Klar vätska utan risk för fläckar
- PVC-, latex- och ftalatfri

Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Interventional Urology

Coloplast AB, Box 10171, 434 22 Kungälv. Tel 0300-332 56. PM-19330
www.coloplast.com Coloplast logo är ett registrerat varumärke, ägt av Coloplast A/S. © 2021-11 Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S

Varningar och försiktighet

SpeediCath Compact Female är avsedd för engångsbruk och återanvändning av produkten kan ge upphov till en potentiell risk för användaren. Ombearbetning, rengöring, desinficering och/eller sterilisering kan försämra produktens egenskaper och utsätta användaren för ökad risk för fysiska skador eller infektion.

SpeediCath Compact Female är endast tillgänglig via recept. Vårdpersonal ska kontaktas innan man utför självkateterisering för första gången.

Vårdpersonal ska kontaktas om man som användare:

- upplever att katetern inte tömmer blåsan lika bra som vanligt.
- får symptom som feber, obehag vid blåstömning, överaktiv blåsa eller blod i urinen.

SpeediCath Compact Female ska inte användas om förpackningen är skadad.

Funktioner

Klar att använda direkt

Alla SpeediCath katetrar ligger i steril vätska och är klara för användning direkt.

Avfasade, atraumatiska kateterögon



Genom att använda en tillverkningsprocess speciellt utvecklad för SpeediCath, är kanterna på varje kateteröga väl avfasade för att skapa en mjuk övergång mellan kateterögonen och kateterens yta och göra kateteriseringen så komfortabel och skonsam som möjligt.

Unikt hydrofilt ytskikt

Alla SpeediCath katetrar har ett jämnt hydrofilt ytskikt för minimal friktion. Ytskiktet är utformat för att skydda uretra och är uppbyggd enligt följande:



1. Basytskiktet med hög viskositet, består av starkt tvärbundet PVP som säkerställer att ytskiktet förblir konstant under hela kateteriseringen.



2. Toppyskiktet med medium viskositet består av tvärbundet PVP med en konstant hög fuktighet, som gör ytan extremt hal och minimerar friktionen.



3. Steril vattenbaserad lösning med minimal viskositet gör ytan optimalt fuktad och klar att användas direkt.

Produktsortiment

SpeediCath Compact Female	Ch storlek	Längd cm	Antal/fp.	Coloplast art nr
Nelaton för flickor/kvinnor	● 06	7*	30	285769
	● 08	7*	30	285789
	● 10	7*	30	285809
	○ 12	7*	30	285829
	● 14	7*	30	285849
Plus Nelaton för flickor/kvinnor	● 10	9*	30	288109
	○ 12	9*	30	288129
	● 14	9*	30	288149
Konnektor			30	285900

*Kateterlängd exkl. handtagsdel

Användarinstruktioner

För instruktioner hur SpeediCath Compact Female ska användas, se separat bruksanvisning och steg-för-steg-instruktion på coloplast.se.

Sterilisering

Produkten är steriliserad med hjälp av strålning.

Förvaring

Förvaras i rumstemperatur såvida inte annan information anges på eller i förpackningen.

Hållbarhet

Använd produkten före utgångsdatum angivet på förpackningen.

Coloplast Care

Helhetserbjudande med SpeediCath

Alla som använder SpeediCath tappningskatetrar erbjuds att gå med i Coloplast Care, ett kostnadsfritt medlemsprogram, som ger tillgång till:

- Personlig rådgivning, stöd och produktvägledning* via telefon eller hemsida.
- Medlemstidningen RIKare Vetande som ges ut tre gånger per år.
- Digitala verktyg, användarberättelser och nyhetsbrev som hjälper användaren att ta kontroll över sin livssituation.

*Kräver bekräftelse av giltig ordination

Anmälan till Coloplast Care görs via coloplast.se/coloplast-care, telefon 0300-332 56 eller via e-post se@coloplast.com.

Referenser:

1. Pascoe G, Clovis S. Evaluation of two coated catheters in intermittent self-catheterisation. Br J Nurs 2001;10:325-329.
2. Stensballe J et al. Hydrophilic coated catheters for intermittent catheterisation reduce urethral micro trauma. Eur Urol 2005;48(6):978-983.
3. Chartier-Kastler E et al. A prospective, randomized, crossover, multicenter study comparing quality of life using compact versus standard catheters for intermittent self-catheterization. J Urol 2013;190(3):942-947.
4. Biering-Sørensen F, Hansen HV, Nielsen PN, et al. Residual urine after intermittent catheterization in females using two different catheters. Scand J Urol Nephrol 2007;41(4):341-345

