

Enkel

Snabb

Skonsam

# SpeediCath® Compact Male

## Tappningskateter för män

Den första kompakta katetern för män



## Produktinformation

### Användning

SpeediCath Compact Male är en hydrofil tappningskateter för engångsbruk avsedd för ren intermittent kateterisering (RIK) vid svårighet att tömma urinblåsan.

Urinen tappas ut genom att katetern förs in i urinblåsan via urinröret. Flöde uppstår pga trycket på utsidan är lägre än trycket i urinblåsan.

### Indikationer

Steril tappningskateter för intermittent kateterisering.

### Fördelar

- Klar att använda direkt
- Jämnt hydrofilt ytskikt - för minimal friktion
- Polerade kateterögon - för maximal komfort
- Enkel<sup>1</sup>, snabb<sup>1</sup> och skonsam<sup>2</sup> kateterisering
- Minimal förberedelse och få handhavandesteg
- Enkel att greppa och öppna, även för personer med nedsatt handfunktion
- Teleskopfunktion som gör katetern enkel att centrera i urinröret utan att behöva vidröra ytskiktet under kateteriseringen<sup>3,4</sup>
- Diskret och kompakt design som leder till följsamhet och bättre livskvalitet<sup>5,6</sup>
- Återförslutningsbar kateter för praktisk och hygienisk kassering
- Enkel att ta med och förvara
- Kan enkelt kopplas till urinpåse
- Konnektor som passar till på marknaden förekommande tillbehör
- Klar vätska utan risk för fläckar
- PVC-, latex- och ftalatfri

## Varningar och försiktighet

SpeediCath Compact Male är avsedd för engångsbruk och återanvändning av produkten kan ge upphov till en potentiell risk för användaren. Ombearbetning, rengöring, desinficering och/eller sterilisering kan försämra produktens egenskaper och utsätta användaren för ökad risk för fysiska skador eller infektion.

Vårdpersonal ska kontaktas innan man utför självkateterisering för första gången.

Vårdpersonal ska kontaktas om man som användare:

- har diagnostiserats med urinströmning.
- upplever att katetern inte tömmer blåsan lika bra som vanligt.
- får symptom som feber, obehag vid blåstömning, överaktiv blåsa eller blod i urinen.

SpeediCath Compact Male ska inte användas om förpackningen är skadad.

## Funktioner

### Klar att använda direkt

Alla SpeediCath katetrar ligger i steril vätska och är klara för användning direkt.

### Avfasade, atraumatiska kateterögon



Genom att använda en tillverkningsprocess speciellt utvecklad för SpeediCath, är kanterna på varje kateteröga väl avfasade för att skapa en mjuk övergång mellan kateterögonen och kateterens yta och göra kateteriseringen så komfortabel och skonsam som möjligt.

## Unikt hydrofilt ytskikt

Alla SpeediCath katetrar har ett jämnt hydrofilt ytskikt för minimal friktion. Ytskiktet är utformat för att skydda uretra och är uppbyggd enligt följande:



1. Basytskiktet med hög viskositet, består av starkt tvärbundet PVP som säkerställer att ytskiktet förblir konstant under hela kateteriseringen.



2. Toppyskiktet med medium viskositet består av tvärbundet PVP med en konstant hög fuktighet, som gör ytan extremt hal och minimerar friktionen.



3. Steril vattenbaserad lösning med minimal viskositet gör ytan optimalt fuktad och klar att användas direkt.

## Produktsortiment

SpeediCath Compact Male	Ch storlek	Längd cm	Antal/fp.	Coloplast art nr
Nelaton för män	o 12/18*	33	30	286929

\*En flexibel del i Ch 12 och en stadigare del i Ch 18

## Användarinstruktioner

För instruktioner hur SpeediCath Comact Male ska användas, se separat bruksanvisning och steg-för-steg-instruktion på [coloplast.se](http://coloplast.se).

## Sterilisering

Produkten är steriliserad med hjälp av strålning.

## Förvaring

Förvaras i rumstemperatur såvida inte annan information anges på eller i förpackningen.

## Hållbarhet

Använd produkten före utgångsdatum angivet på förpackningen.

## Coloplast Care

### Helhetserbjudande med SpeediCath

Alla som använder SpeediCath tappningskatetrar erbjuds att gå med i Coloplast Care, ett kostnadsfritt medlemsprogram, som ger tillgång till:

- Personlig rådgivning, stöd och produktvägledning\* via telefon eller hemsida.
- Medlemstidningen RIKare Vetande som ges ut tre gånger per år.
- Digitala verktyg, användarberättelser och nyhetsbrev som hjälper användaren att ta kontroll över sin livssituation.

\*Kräver bekräftelse av giltig ordination

Anmälan till Coloplast Care görs via [coloplast.se/coloplast-care](http://coloplast.se/coloplast-care), telefon 0300-332 56 eller via e-post [se@coloplast.com](mailto:se@coloplast.com).

### Referenser:

1. Pascoe G, Clovis S. Evaluation of two coated catheters in intermittent self-catheterisation. Br J Nurs 2001;10:325-329.
2. Stensballe J et al. Hydrophilic coated catheters for intermittent catheterisation reduce urethral micro trauma. Eur Urol 2005;48(6):978-983.
4. Bagi P et al. Safety of a new compact male intermittent catheter: a randomized, cross-over, single blind study in healthy male volunteers. Urol Int 2011;86:179-184.
5. SCCM Evaluation (n=482), November 2016, Data on file.
6. Chartier-Kastler E et al. A prospective, randomized, crossover, multicenter study comparing quality of life using compact versus standard catheters for intermittent self-catheterization. J Urol 2013;190(3):942-947.

