

Enkel

Snabb

Skonsam

**SpeediCath® Flex**

# Tappningskateter för män

*Den enda katetern med skyddshölje och flexibel tipp*

## Produktinformation


### Användning

SpeediCath Flex för män är en hydrofil tappningskateter för engångsbruk avsedd för ren intermittent kateterisering (RIK) vid svårighet att tömma urinblåsan.

Urinen tappas ut genom att katetern förs in i urinblåsan via urinröret. Flöde uppstår pga att trycket på utsidan är lägre än trycket i urinblåsan.

### Indikationer

Steril tappningskateter för intermittent kateterisering.

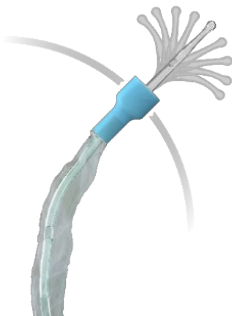

### Fördelar

- Klar att använda direkt
- Jämnt hydrofilt ytskikt - för minimal friktion
- Polerade kateterögon - för maximal komfort
- Enkel<sup>1</sup>, snabb<sup>1</sup> och skonsam<sup>2</sup> kateterisering
- Flexibel och väl rundad olivtipp för skonsam och enkel navigering
- Skyddshölje som gör katetern greppvänlig och enkel att föra in steg för steg på ett hygieniskt och kontrollerat vis
- Återförslutningsbar kateter och förpackning för praktisk och hygienisk kassering
- Förpackning tillgänglig i standard och fickformat
- Förpackning med diskret icke-mediciniskt utseende
- Förpackning som är enkel att öppna
- Enkel att ta med och förvara
- Kan enkelt kopplas till urinpåse
- Konnektor som passar till på marknaden förekommande tillbehör
- Klar vätska utan risk för fläckar
- PVC-, latex- och ftalatfri

Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Interventional Urology

Coloplast AB, Box 10171, 434 22 Kungälv. Tel 0300-332 56. PM-19334  
 www.coloplast.com Coloplast logo är ett registrerat varumärke, ägt av Coloplast A/S. © 2021-11 Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S

The Coloplast logo, consisting of a stylized globe icon followed by the brand name "Coloplast" in a bold, sans-serif font.

## Varningar och försiktighet

SpeediCath Flex är avsedd för engångsbruk och återanvändning av produkten kan ge upphov till en potentiell risk för användaren. Ombearbetning, rengöring, desinficering och/eller sterilisering kan försämra produktens egenskaper och utsätta användaren för ökad risk för fysiska skador eller infektion.

Vårdpersonal ska kontaktas innan man utför självkateterisering för första gången. Vårdpersonal ska kontaktas om man som användare får symptom som feber, obehag vid blåstömning, överaktiv blåsa eller blod i urinen.

SpeediCath Flex ska inte användas om förpackningen är skadad.

## Funktioner

### Klar-att-använda direkt

Alla SpeediCath katetrar ligger i steril vätska och är klara för användning direkt.

### Avfasade, atraumatiska kateterögon



Genom att använda en tillverkningsprocess speciellt utvecklad för SpeediCath, är kanterna på varje kateteröga väl avfasade för att skapa en mjuk övergång mellan kateterögonen och kateterens yta och göra kateteriseringen så komfortabel och skonsam som möjligt.

## Unikt hydrofilt ytskikt

Alla SpeediCath katetrar har ett jämnt hydrofilt ytskikt för minimal friktion. Ytskiktet är utformat för att skydda uretra och är uppbyggd enligt följande:



1. Basytskiktet med hög viskositet, består av starkt tvärbundet PVP som säkerställer att ytskiktet förblir konstant under hela kateteriseringen.



2. Toppytskiktet med medium viskositet består av tvärbundet PVP med en konstant hög fuktighet, som gör ytan extremt hal och minimerar friktionen.





3. Steril vattenbaserad lösning med minimal viskositet gör ytan optimalt fuktad och klar att användas direkt.

## Skyddshölje och flexibel olivtipp

SpeediCath Flex är försedd med ett torrt skyddshölje med mjukt handtag som gör katetern greppvänlig och enkel att hygieniskt föra in, steg för steg på ett kontrollerat sätt, utan att ta på katetern. Genom att klämma åt handtagets smala, mjuka del kan kateterens rörelse pausas.

SpeediCath Flex har också en flexibel, rundad olivtipp som säkerställer enkel och skonsam navigering genom böjar och eventuella hinder i det manliga urinröret.

## Produktsortiment

SpeediCath Flex	Ch storlek	Längd cm	Antal/fp.	Coloplast art nr
Olivtipp för män	● 10	44*	30	289109
Fickformat	○ 12	44*	30	289129
	● 14	44*	30	289149
Olivtipp för män	● 10	44	30	289209
Standardformat	○ 12	44	30	289229
	● 14	44	30	289249
	● 16	44	30	289169

## Användarinstruktioner

För instruktioner hur SpeediCath Flex ska användas, se separat bruksanvisning och steg-för-steg-instruktion på [coloplast.se](http://coloplast.se).

## Sterilisering

Produkten är steriliserad med hjälp av strålning.

## Förvaring

Förvaras i rumstemperatur såvida inte annan information anges på eller i förpackningen. Skydda produkten från solljus.

## Hållbarhet

Använd produkten före utgångsdatum angivet på förpackningen.

## Coloplast Care

### Helhetserbjudande med SpeediCath

Alla som använder SpeediCath tappningskatetrar erbjuds att gå med i Coloplast Care, ett kostnadsfritt medlemsprogram, som ger tillgång till:

- Personlig rådgivning, stöd och produktvägledning\* via telefon eller hemsida.
- Medlemstidningen RIKare Vetande som ges ut tre gånger per år.
- Digitala verktyg, användarberättelser och nyhetsbrev som hjälper användaren att ta kontroll över sin livssituation.

\*Kräver bekräftelse av giltig ordination

Anmälan till Coloplast Care görs via [coloplast.se/coloplast-care](http://coloplast.se/coloplast-care), telefon 0300-332 56 eller via e-post [se@coloplast.com](mailto:se@coloplast.com).

### Referenser:

1. Pascoe G, Clovis S. Evaluation of two coated catheters in intermittent self-catheterisation. Br J Nurs 2001;10:325-329.
2. Stensballe J et al. Hydrophilic coated catheters for intermittent catheterisation reduce urethral micro trauma. Eur Urol 2005;48(6):978-983.

