

Enkel

Snabb

Skonsam

SpeediCath® Standard

Tappningskateter för män

Klar att använda direkt



Produktinformation

Användning

SpeediCath Standard för män är en hydrofil tappningskateter för engångsbruk avsedd för ren intermittent kateterisering (RIK) vid svårighet att tömma urinblåsan.

Urinen tappas ut genom att katetern förs in i urinblåsan via urinröret.

Katetern är följsam och smidig.



Fördelar

- Klar-att-använda direkt
- Jämnt hydrofilt ytskikt - för minimal friktion
- Rundade och belagda kateterögon - för maximal mjukhet och komfort
- Enkel¹, snabb¹ och skonsam² kateterisering
- Peel-open förpackning med greppvänliga flikar och öppningsring som gör förpackningen enkel att öppna, även för personer med nedsatt handfunktion
- Klisteretikett på förpackningen som säkerställer att katetern hänger på plats
- Tillhandahålls med Nelaton- eller Tiemannstipp
- Kan vid behov förvaras ihoprullad i upp till 3 timmar
- Kan enkelt kopplas till urinpåse
- Färgkodad konnektor som passar till på marknaden förekommande tillbehör
- Klar vätska utan risk för fläckar
- Tillverkad utan PVC, latex och ftalater

Katetern

Klar att använda direkt

Alla SpeediCath katetrar ligger i steril vätska och är klara att använda direkt.

Tipp

SpeediCath Standard tillhandahålls med både Nelaton- och Tiemannstipp. Dessa är utformade för ett skonsamt införande i uretra. Tiemann, som förenklar införande vid förträngningar och strikturer, har en tydlig markering på konan i form av ett streck för att visa spetsens riktning.

Nelatonspets



Tiemannspets



Tiemann med tydlig markering på konan



Rundade och belagda kateterögon



Genom att använda en tillverkningsprocess speciellt utvecklad för SpeediCath, är kanterna på varje kateteröga väl avfasade för att skapa en mjuk övergång mellan kateterögonen och kateterns yta. Beläggningen är påförd som ett sista steg i processen. Detta för att göra kateteriseringen så komfortabel och skonsam som möjligt.

Triple Action Coating Technology™

Alla SpeediCath katetrar har ett jämnt och helt unikt hydrofilt ytskikt för minimal friktion. Ytskiktet är utformat för att skydda uretra och är uppbyggt enligt följande:



1. Basytskiktet med hög viskositet, består av starkt tvärbundet PVP som säkerställer att ytskiktet förblir konstant under hela kateteriseringen.



2. Toppytskiktet med medium viskositet består av tvärbundet PVP med en konstant hög fuktighet, som gör ytan extremt hal och minimerar friktionen.



3. Steril vattenbaserad lösning med minimal viskositet gör ytan optimalt fuktad och klar att användas direkt.

Friktionstestad

Låg friktion vid in- och utförelse är viktigt för att minimera obehag och skydda urinröret. Objektiva laborietester visar att alla SpeediCath katetrar uppvisar lägre friktion än motsvarande hydrofila och lubricerade katetrar som ingått i samma test. Produkterna har testats direkt efter öppning samt 5 minuter efter öppning³.



Produktsortiment

SpeediCath Standard	Ch storlek	Effektiv längd cm	Antal/ fp	Antal/ tfp	Coloplast art nr
Nelaton för pojkar/ ungdom	● 08	26	30	300	286089
	● 10	26	30	300	286109
	○ 12	26	30	300	286129
Nelaton för män	● 08	35	30	300	284089
	● 10	35	30	300	284109
	○ 12	35	30	300	284129
	● 14	35	30	300	284149
	● 16	35	30	300	284169
	● 18	35	30	300	284189
Tiemann för män	● 10	35	30	300	284909
	○ 12	35	30	300	284929
	● 14	35	30	300	284949
	● 16	35	30	300	284969

Användarinstruktioner

1. Om det förenklar, fäst förpackningen på väggen eller handfatet med hjälp av häftan på baksidan.
2. Öppna förpackningen genom att dra den övre fliken eller ringen nedåt ca 2–3 cm (Öppningsringen underlättar vid nedsatt handmotorik)
3. Ta katetern ur förpackningen.
4. Kateterisera

För fullständiga instruktioner hur SpeediCath Standard ska användas, se separat bruksanvisning eller steg-för-steg-instruktion på coloplast.se.

Förvaring

Förvaringstiden är två år. Förvaras i rumstemperatur såvida inte annan information anges på eller i förpackningen.

Hållbarhet

Använd produkten före det utgångsdatum som finns angivet på förpackningen.

Sterilisering

Produkten är steriliserad med hjälp av strålning.

Coloplast Care

Helhetserbjudande med SpeediCath

Alla som använder SpeediCath tappningskatetrar erbjuds att gå med i Coloplast Care, ett kostnadsfritt medlemsprogram, som ger tillgång till:

- Personlig rådgivning, stöd och produktvägledning* via telefon eller hemsida.
- Medlemstidningen RIKare Vetande som ges ut tre gånger per år.
- Digitala verktyg, användarberättelser och nyhetsbrev som hjälper användaren att ta kontroll över sin livssituation.

*Kräver bekräftelse av giltig ordination

Anmälan till Coloplast Care görs via coloplast.se/coloplast-care, telefon 0300-332 56 eller via e-post se@coloplast.com.

Referenser:

1. Pascoe G, Clovis S. Evaluation of two coated catheters in intermittent self-catheterisation. Br J Nurs 2001;10:325-329.
2. Stensballe J et al. Hydrophilic coated catheters for intermittent catheterisation reduce urethral micro trauma. Eur Urol 2005;48(6):978-983.
3. Data on file



Ostomy Care | Continence Care | Wound and Skin Care | Interventional Urology | Voice and Respiratory Care

Coloplast AB, Box 10171, 434 22 Kungälv, Tel 0300-332 56, PM-19336
www.coloplast.com Coloplast logo är ett registrerat varumärke, ägt av Coloplast A/S. © 2025-09 Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S

