

Enkel

Snabb

Skonsam

SpeediCath® Compact Female

Tappningskateter för kvinnor

Den mest kompakta katetern



Produktinformation

Användning

SpeediCath Compact Female är en hydrofil tappningskateter för engångsbruk avsedd för ren intermittent kateterisering (RIK) vid svårighet att tömma urinblåsan.

Urinen tappas ut genom att katetern förs in i urinblåsan via urinröret.



Fördelar

- Liten, smidig och enkel att föra in
- Klar-att-använda direkt
- Jämnt hydrofilt ytskikt - för minimal friktion
- Rundade och belagda kateterögon - för maximal mjukhet och komfort

- Enkel¹, snabb¹ och skonsam² kateterisering
- Minimal förberedelse och få handhavandesteg säkerställer en hygienisk hantering
- Enkel att öppna, även för personer med nedsatt handfunktion
- Diskret och kompakt design som leder till följsamhet och bättre livskvalitet³
- Skräddarsydd för den kvinnliga anatomin
- Tillräckligt kort för att vara diskret, tillräckligt lång för att tömma blåsan effektivt⁴
- Diskret och enkel att ta med och förvara
- Tillhandahålls i två längder och flera storlekar som passar kvinnor och flickor
- Färgkodad pil anger storlek och vridpunkt för öppning
- Klar vätska utan risk för fläckar
- Tillbehör: SpeediBag urinuppsamlingspåse kan enkelt kopplas direkt till katetern alt. kopplas ihop med SpeediCath Compact Konnektor som passar till på marknaden förekommande tillbehör (förlängningsslang, spolspruta, urinuppsamlingspåse etc.)
- PVC-, latex- och ftalatfri

Ostomy Care | Continence Care | Wound and Skin Care | Interventional Urology | Voice and Respiratory Care

Coloplast AB, Box 10171, 434 22 Kungälv. Tel 0300-332 56. PM-19330
www.coloplast.com Coloplast logo är ett registrerat varumärke, ägt av Coloplast A/S. © 2024-01 Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S

 **Coloplast**

Katetern

Klar att använda direkt

Alla SpeediCath katetrar ligger i steril vätska och är klara för användning direkt.

Rundade och belagda kateterögon



Genom att använda en tillverkningsprocess speciellt utvecklad för SpeediCath, är kanterna på varje kateteröga väl avfasade för att skapa en mjuk övergång mellan kateterögonen och kateterns yta, för att göra kateteriseringen så komfortabel och skonsam som möjligt.

Triple Action Coating Technology™

Alla SpeediCath katetrar har ett jämnt hydrofilt ytskikt för minimal friktion. Ytskiktet är utformat för att skydda uretra och är uppbyggt enligt följande:



1. Basytskiktet med hög viskositet, består av starkt tvärbundet PVP som säkerställer att ytskiktet förblir konstant under hela kateteriseringen.



2. Toppyskiktet med medium viskositet består av tvärbundet PVP med en konstant hög fuktighet, som gör ytan extremt hal och minimerar friktionen.





3. Steril vattenbaserad lösning med minimal viskositet gör ytan optimalt fuktad och klar att användas direkt.

Friktionstestad

Låg friktion vid in- och utförelse är viktigt för att minimera obehag och skydda urinröret. Objektiva laborietester visar att alla SpeediCath katetrar uppvisar lägre friktion än motsvarande hydrofila och lubricerade katetrar som ingått i samma test. Produkterna har testats direkt efter öppning samt 5 minuter efter öppning⁵.



Produktsortiment

SpeediCath Compact Female	Ch storlek	Längd cm	Antal/ fp	Antal/ Trp fp	Coloplast art nr
	● 06	7*	30	300	285769
	● 08	7*	30	300	285789
	● 10	7*	30	300	285809
	● 12	7*	30	300	285829
	● 14	7*	30	300	285849
	● 10	9*	30	300	288109
	● 12	9*	30	300	288129
	● 14	9*	30	300	288149
Konnektor			30	300	285900

*Effektiv längd, dvs kateterlängd exkl. handtagsdel

Ostomy Care | Continence Care | Wound and Skin Care | Interventional Urology | Voice and Respiratory Care

Coloplast AB, Box 10171, 434 22 Kungälv. Tel 0300-332 56. PM-19330
www.coloplast.com Coloplast logo är ett registrerat varumärke, ägt av Coloplast A/S. © 2024-01 Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S



Användarinstruktioner

Färgkodad pil på produkten anger vridpunkt för öppning.

1. Vrid för att öppna
2. Vicka loss katetern ur hylsan
3. Kateterisera

För fullständiga instruktioner hur SpeediCath Compact Female ska användas, se separat bruksanvisning och steg-för-steg-instruktion på coloplast.se.

Förvaring

Förvaras i rumstemperatur såvida inte annan information anges på eller i förpackningen. Skydda produkten från solljus.

Hållbarhet

Hållbarhetstiden är två år. Använd produkten före utgångsdatum angivet på förpackningen.

Sterilisering

Produkten är steriliserad med hjälp av strålning.

Coloplast Care

Helhetserbjudande med SpeediCath

Alla som använder SpeediCath tappningskatetrar erbjuds att gå med i Coloplast Care, ett kostnadsfritt medlemsprogram, som ger tillgång till:

- Personlig rådgivning, stöd och produktvägledning* via telefon eller hemsida.
- Medlemstidningen RIKare Vetande som ges ut tre gånger per år.
- Digitala verktyg, användarberättelser och nyhetsbrev som hjälper användaren att ta kontroll över sin livssituation.

Anmälan till Coloplast Care görs via coloplast.se/coloplast-care, telefon 0300-332 56 eller via e-post se@coloplast.com.

*Kräver bekräftelse av giltig ordination

Referenser:

1. Pascoe G, Clovis S. Evaluation of two coated catheters in intermittent self-catheterisation. Br J Nurs 2001;10:325-329.
2. Stensballe J et al. Hydrophilic coated catheters for intermittent catheterisation reduce urethral micro trauma. Eur Urol 2005;48(6):978-983.
3. Chartier-Kastler E et al. A prospective, randomized, crossover, multicenter study comparing quality of life using compact versus standard catheters for intermittent self-catheterization. J Urol 2013;190(3):942-947.
4. Biering-Sørensen F, Hansen HV, Nielsen PN, et al. Residual urine after intermittent catheterization in females using two different catheters. Scand J Urol Nephrol 2007;41(4):341-345
5. Data on file