

Enkel

Snabb

Skonsam

## SpeediCath® Compact Set

# Tappningskateter för kvinnor

En allt-i-ett-kateter för ökad frihet



## Produktinformation

### Användning

SpeediCath Compact Set Female är en hydrofil tappningskateter för engångsbruk med uppsamlingspåse, avsedd för ren intermittent kateterisering (RIK) vid svårighet att tömma urinblåsan.

Urinen tappas ut genom att katetern förs in i urinblåsan via urinröret.



### Fördelar

- Klar-att-använda direkt
- Jämnt hydrofilt ytskikt - för minimal friktion
- Rundade och belagda kateterögon - för maximal mjukhet och komfort
- Enkel<sup>1</sup>, snabb<sup>1</sup> och skonsam<sup>2</sup> kateterisering
- Integrerad lösning med både kateter och urinpåse i en och samma produkt
- Enkel att använda för personer som inte kan katetrisera direkt i toaletten
- Minimal förberedelse och få handhavandesteg
- Enkel att öppna, även för personer med nedsatt handfunktion
- Integrerat handtag som ger en hygienisk kateterisering
- Skräddarsydd för den kvinnliga anatomin
- Diskret och kompakt design som leder till följsamhet och bättre livskvalitet<sup>3</sup>
- Diskret och enkel att ta med och förvara
- Återförslutningsbar kateter för praktisk och hygienisk kassering
- Klar vätska utan risk för fläckar
- PVC-, latex- och ftalatfri

Ostomy Care | Continence Care | Wound and Skin Care | Interventional Urology | Voice and Respiratory Care

Coloplast AB, Box 10171, 434 22 Kungälv. Tel 0300-332 56. PM-19332  
www.coloplast.com Coloplast logo är ett registrerat varumärke, ägt av Coloplast A/S. © 2024-01 Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S

 **Coloplast**

## Katetern

### Klar att använda direkt

Alla SpeediCath katetrar ligger i steril vätska och är klara för användning direkt.

### Rundade och belagda kateterögon



Genom att använda en tillverkningsprocess speciellt utvecklad för SpeediCath, är kanterna på varje kateteröga väl avfasade för att skapa en mjuk övergång mellan kateterögonen och kateters yta, för att göra kateteriseringen så komfortabel och skonsam som möjligt.

### Triple Action Coating Technology™

Alla SpeediCath katetrar har ett jämnt hydrofilt ytskikt för minimal friktion. Ytskiktet är utformat för att skydda uretra och är uppbyggd enligt följande:



1. Basytskiktet med hög viskositet, består av starkt tvärbundet PVP som säkerställer att ytskiktet förblir konstant under hela kateteriseringen.



2. Toppyskiktet med medium viskositet består av tvärbundet PVP med en konstant hög fuktighet, som gör ytan extremt hal och minimerar friktionen.



3. Steril vattenbaserad lösning med minimal viskositet gör ytan optimalt fuktad och klar att användas direkt.

### Friktionstestad

Låg friktion vid in- och utförelse är viktigt för att minimera obehag och skydda urinröret. Objektiva laborietester visar att alla SpeediCath katetrar uppvisar lägre friktion än motsvarande hydrofila och lubricerade katetrar som ingått i samma test. Produkterna har testats direkt efter öppning samt 5 minuter efter öppning<sup>4</sup>.



## Produktsortiment

SpeediCath Compact Set	Ch storlek	Längd cm	Volym ml	Antal/ fp	Antal/ tpf	Coloplast art nr
Nelaton för flickor/kvinnor	12 ● 14	9*	750	20	60	285229

\*Kateterlängd exkl. handtagsdel

## Användarinstruktioner

För instruktioner hur SpeediCath Compact Set Female ska användas, se separat bruksanvisning och steg-för-steg-instruktion på [coloplast.se](http://coloplast.se).

## Förvaring

Förvaras i rumstemperatur såvida inte annan information anges på eller i förpackningen.

## Hållbarhet

Hållbarhetstiden är två år. Använd produkten före det utgångsdatum som finns angivet på förpackningen.

## Sterilisering

Produkten är steriliserad med hjälp av strålning.

## Coloplast Care

### Helhetserbjudande med SpeediCath

Alla som använder SpeediCath tappningskatetrar erbjuds att gå med i Coloplast Care, ett kostnadsfritt medlemsprogram, som ger tillgång till:

- Personlig rådgivning, stöd och produktvägledning\* via telefon eller hemsida.
- Medlemstidningen RIKare Vetande som ges ut tre gånger per år.
- Digitala verktyg, användarberättelser och nyhetsbrev som hjälper användaren att ta kontroll över sin livssituation.

\*Kräver bekräftelse av giltig ordination

Anmälan till Coloplast Care görs via [coloplast.se/coloplast-care](http://coloplast.se/coloplast-care), telefon 0300-332 56 eller via e-post [se@coloplast.com](mailto:se@coloplast.com).

### Referenser:

1. Pascoe G, Clovis S. Evaluation of two coated catheters in intermittent self-catheterisation. Br J Nurs 2001;10:325-329.
2. Stensballe J et al. Hydrophilic coated catheters for intermittent catheterisation reduce urethral micro trauma. Eur Urol 2005;48(6):978-983.
3. Chartier-Kastler E et al. A prospective, randomized, crossover, multicenter study comparing quality of life using compact versus standard catheters for intermittent self-catheterization. J Urol 2013;190(3):942-947.
4. Data on file