

# Urinuppsamlingspåse

- Knickfri slang
- PVC-fri
- Tömbar

**Conveen® Security+**



# Conveen® Security+

## Urinuppsamlingspåse

### Praktisk lösning

Urinläckage (inkontinens) kan ha olika omfattning; alltifrån några droppar till ofrivillig tömning av hela blåsan. Conveen Security+ urinuppsamlingspåse är, i kombination med alla typer av kvarliggande urinkatetrar och urindropsamlare (uridom), en mycket praktisk lösning för att kontrollera urinblåsan.

### Tömbar

Fördelarna med en tömbar påse är att risken för infektion minskar (slutet system), den behöver inte bytas lika ofta och den kan kopplas till en annan påse för att få större uppsamlingsvolym (t ex nattetid). Alla påsar är försedda med backventil mellan påse och slang.

Benpåsen finns i 3 volymer och töms med hjälp av en klämma som är lätt att hantera med en hand. Sängpåsen rymmer 2 liter och dess tvåstegsutlopp kan öppnas med en hand och ger bra kontroll vid tömning. Både klämma och tvåstegsutlopp signalerar tydligt om de är öppna eller stängda. Byt påse enligt gällande riktlinjer och rekommendationer, vanligtvis en gång per vecka.

### Material

Urinpåsar är fria från PVC och ftalater. Framsidan är transparent och volymgraderad\*. Benpåsens baksida har ett hudvänligt och mjukt non-woven material.

### Knickfri slang

Om slangen böjs kraftigt, rinner urinen fritt eftersom den är knickfri, liksom återtar ursprunglig form. Om du klipper av en slang, spara så mycket som möjligt av den släta delen, för att underlätta påtryckning av konnektor.

Benpåsens slang finns i olika längder och som avklippbar med lös konnektor eller med fast konnektor. Sängpåsens slang är avklippbar och ligger löst i förpackningen med fast konnektor. Konnektorn passar till marknadens förekommande katetrar och urindropsamlare.

### Fixeringsband och påshängare

Urinpåsar har förstansade hål, avsedda för Conveen påshängare eller Conveen fixeringsband.

Fixeringsband används för att fästa urinpåsen på benet. Banden är avklippbara, kan återanvändas och tvättas i 40°.


Påshängare används vid upphängning av urinpåse och på dess hållare fästs slangen. Hängaren kan användas flera gånger och tål rengöring i diskdesinfektor i 90°.

Conveen Security+	Avklippbar slang	Fast konnektor	Volym ml	Slanglängd cm	Förp styck	Coloplast art nr
Bempåse	ja	nej	350	30	30	051640
	nej	ja	350	30	30	051641
	nej	ja	500	6	30	210220
	ja	nej	500	30	30	051600
	nej	ja	500	30	30	051601
	ja	nej	500	50	30	051610
	nej	ja	500	50	30	051611
	ja	nej	750	30	30	051660
	nej	ja	750	30	30	051661
	ja	nej	750	50	30	051670
nej	ja	750	50	30	051671	
Sängpåse	ja	ja	2000	140	10	213460

\* gäller ej 350 ml påsen

### Conveen tillbehör

	Längd cm	Förp antal	Coloplast art nr
Fixeringsband med knappar	2,5x60; 3,5x60	10 par	050501
Fixeringsband	2,5x75; 2,5x45	10 par	213800
Påshängare		10 st	050700

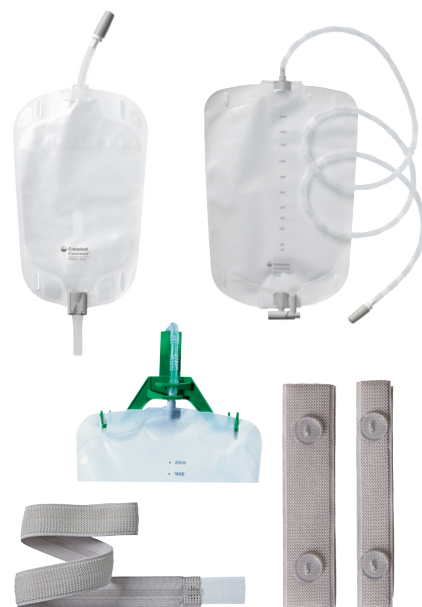

### Miljöfakta

Förpackning: Allt material är återvinningsbart, sortera och lämna på närmaste återvinningsstation. Vi är anslutna till FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

Produkt: Vi rekommenderar att produkten går till sopförbränning med energiutvinning.



Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Urology Care