

# Conveen® urindroppssamlare

- Latex
- Sitter säkert
- Knickfri



# Conveen®

## Urindroppssamlare

### Funktionell och hudvänlig lösning

Urinläckage (inkontinens) kan ha olika omfattning; alltifrån några droppar till ofrivillig tömning av hela blåsan. En urindroppssamlare (uridom) ansluten till en urinuppsamlingspåse är en funktionell och bra lösning för män med urinläckage eller som har svårt att hinna till toaletten. Huden kommer inte i kontakt med urin, som vid användning av absorberande skydd, så risken för hudirritation minskar och användaren slipper urinlukt.

Urindroppssamlaren är knickfri, vilket säkerställer att urinen rinner fritt i alla lägen. Conveen urindroppssamlare är tillverkad av latex.

### Självhäftande

Självhäftande urindroppssamlare gör fixeringen enkel och hygienisk tack vare applikatorn och den inbyggda häftan. Vid användning, placeras urindroppssamlaren över ollonet och rullas ut, applikatorn tas bort och urindroppssamlaren kramas till för att få ordentligt fäste runt penis.

### Häftstripp

Conveen urindroppssamlare finns även med häftstripp. Häftstrippet av curagard är elastiskt och fäster på båda sidor. Häftstrippet placeras runt penis mot penisroten och urindroppssamlaren rullas ut över det.

### Användartips

Vid tvätt av penis, använd inte återfettande tvål för att säkerställa att urindroppssamlaren fäster ordentligt.

Det är viktigt att ha rätt storlek på urindroppssamlaren. Penis ska mätas vid penisroten i avslappnat tillstånd. Använd t ex Conveen mätsticka som kan beställas utan kostnad från Coloplast kundservice, tel 0300-332 99.



Conveen®	Omkrets (mm)	Diameter (mm)	Längd (mm)	Förp (styck)	Coloplast art nr
Självhäftande med applikator	● 70	20	105	90	052120
	● 80	25	105	90	052000
	● 90	30	105	90	052050
	● 105	35	105	90	052100
	● 125	40	105	90	052150
Urindropssamlare med häftstripp (kombipack)	● 70	20	105	30	051200
	● 80	25	105	30	051250
	● 90	30	105	30	051300
	● 105	35	105	30	051350
	● 125	40	105	30	051400
Häftstripp			113x16 mm	20	051001



#### Miljöfakta

Förpackning: Allt material är återvinningsbart, sortera och lämna på närmaste återvinningsstation. Vi är anslutna till Svensk Förpackningsinsamling/REPA. Produkt: Vi rekommenderar att produkten går till sopförbränning med energitvinnning.

CE  
0543