

Latex-fri

DEHP-fri

Conveen® Contour

Urinuppsamlingspåse

Diskret flerkammarpåse

NYHET

Fri från DEHP



Produktinformation

Användning

Conveen Contour är en tömbar urinuppsamlingspåse avsedd för patient som använder KAD eller urindroppssamlare.

Conveen Contour urinuppsamlingspåse passar till på marknaden förekommande urinkatetrar och urindroppssamlare.

För en diskret känsla fördelas urinen i flera kamrar som gör att Conveen Contour formar sig efter benet och reducerar skvalp. Påsen är framtagen för att vara diskret därav ingen volymgradering.

Hålen i påsens övre del möjliggör att antingen sänghållare eller benfixering kan användas.

Fördelar

- Fixeringsband för att fästa på benet
- Slät slang som återtar sin form efter knickbildning
- Slutet system
- Tömningsventilen är enkel att öppna och stänga
- Backventil mellan påse och slang
- Transparent framsida
- Hudvänlig non-woven material
- Konnektorn passar till marknadens förekommande katetrar / urindroppssamlare utan att ge läckage
- Latex- och DEHP-fri
- Innehåller PVC



Funktioner

Conveen Contour är en tömbar påse med ett slutet system. Den behöver därför inte bytas lika ofta och den kan kopplas till en annan påse för att få större uppsamlingsvolym (t ex nattetid).

Conveen Contour rymmer 800ml och är försedd med backventil mellan påse och slang. Påsen töms med hjälp av en påsklämma som är enkel att hantera. Påsklämman signalerar tydligt om den är öppen eller stängd.

Lös konnektor medföljer förpackningen. Den passar till kateter och/eller urindroppssamlare, slangen kan kortas av till önskvärd längd.

Byt påse enligt gällande riktlinjer och rekommendationer, vanligtvis en gång per vecka. Engångsprodukt, ska ej återanvändas.

Material

Baksidan har ett hudvänligt non-woven material som känns mjukt mot benet och framsidan är transparent.

Produktsortiment

Conveen Contour	Avklippbar slang	Fast konnektor	Volym ml.	Slanglängd cm	Antal/ fp	Antal/ tfp	Coloplast Art nr
Benpåse	Ja	Nej	800	65	10	100	051760

Användarinstruktioner

För instruktioner hur Conveen Contour ska användas, se separat bruksanvisning.

Förvaring

Förvaras i rumstemperatur såvida inte annan information anges på eller i förpackningen.

Hållbarhet

Hållbarhetstiden är fem år. Använd produkten före utgångsdatum angivet på förpackningen.

