

Latex-fri

PVC-fri

Ftalat-fri

Conveen® Security+

Urinuppsamlingspåse

Benpåse



Produktinformation

Användning

Conveen Security+ är en tömbar urinuppsamlingspåse avsedd för patient som använder KAD eller urindroppssamlare.

Conveen Security+ urinuppsamlingspåse passar till på marknaden förekommande urinkatetrar och urindroppssamlare.


Påsen är avsedd att användas när man är uppegående och hålen i påsens övre del möjliggör att fixeringsband kan användas.

Påsens tömningsventil går att vid behov seriekoppla med en annan urinpåse med större kapacitet.

Återanvändning av engångsprodukten rekommenderas inte då kontaminering kan förekomma.

Fördelar

- Fixeringsband för att fästa på benet
- Knickfri slang
- Slang finns som avklippbar och ej avklippbar
- Slutet system
- Backventil mellan påse och slang
- Tömningsventilen är enkel att öppna och stänga
- Finns i 3 volymer
- Transparent framsida
- Volymgraderad (undantag 350 ml påsen)
- Inbyggd konnektor som passar till på marknaden förekommande urinkatetrar och urindroppssamlare utan att ge läckage
- PVC-, latex- och ftalatfri

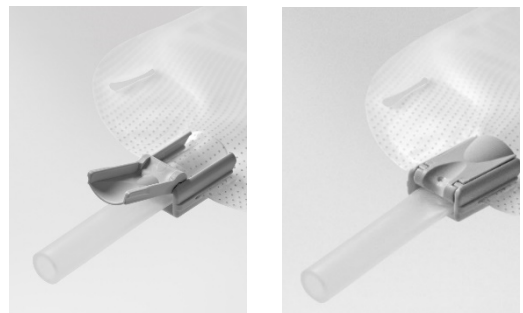

Funktioner

En tömbar påse med ett slutet system behöver inte bytas lika ofta och den kan kopplas till en annan påse för att få större uppsamlingsvolym (t ex nattetid). Alla påsar är försedda med backventil mellan påse och slang. Påsklämman signalerar tydligt om den är öppen eller stängd.

Byt påse enligt gällande riktlinjer och rekommendationer, vanligtvis en gång per vecka.

Material

Urinpåsar är fria från PVC, ftalater och latex. Framsidan är transparent och volymgraderad*. Benpåsens baksida har ett hudvänligt och mjukt non-woven material.

Knickfri slang

Böjs slangen kraftigt, rinner urinen fritt eftersom den är knickfri, liksom återtar ursprunglig form. Om slangen inte har konnektor som är fastsatt i förväg kan du korta slangen till den längd som du föredrar. Klipper du av slangen, spara så mycket som möjligt av den släta delen, för att underlätta påtryckningen av konnektor. Slangen finns i olika längder.



Produktsortiment

Conveen Security+	Avklippbar slang	Fast konnektor	Volym ml.	Slanglängd cm	Antal/fp.	Antal/tfp.	Coloplast art nr
Benpåse med avklippbar slang	Ja	Nej	350	30	30	30	051640
	Ja	Nej	500	30	30	30	051600
	Ja	Nej	500	50	30	30	051610
	Ja	Nej	750	30	30	30	051660
	Ja	Nej	750	50	30	30	051670

Conveen Security+	Avklippbar slang	Fast konnektor	Volym ml.	Slanglängd cm	Antal/fp.	Antal/tfp.	Coloplast art nr
Benpåse med fast konnektor	Nej	Ja	350	30	30	30	051641
	Nej	Ja	500	6	30	30	210220
	Nej	Ja	500	30	30	30	051601
	Nej	Ja	500	50	30	30	051611
	Nej	Ja	750	30	30	30	051661
	Nej	Ja	750	50	30	30	051671

I denna produktfamilj finns även en sängpåse med större kapacitet. Påsen är på 2000 ml med en avklippbar slang på 140 cm och har fast konnektor, artikelnummer 213460.

Användarinstruktioner

För instruktioner hur Conveen Security+ ska användas, se separat bruksanvisning.

Förvaring

Förvaras i rumstemperatur såvida inte annan information anges på eller i förpackningen.

Hållbarhet

Hållbarhetstiden är fem år. Använd produkten före utgångsdatum angivet på förpackningen.

* gäller ej 350 ml påsen

