

Latex-fri

PVC-fri

Ftalat-fri

# Conveen® Security+

## Urinuppsamlingspåse

Sängpåse



### Produktinformation

#### Användning

Conveen Security+ är en tömbar urinuppsamlingspåse med större kapacitet avsedd för patient som använder KAD eller urindroppssamlare.

Conveen Security+ urinuppsamlingspåse passar till på marknaden förekommande urinkatetrar och urindroppssamlare. Kan användas till sängliggande patient.

Hålen i påsens övre del möjliggör upphängning på sänghållare (även benfixering kan användas då slangens längd kan justeras).

Återanvändning av engångsprodukten rekommenderas inte då kontaminering kan förekomma.

#### Fördelar

- Fixeringsband för att fästa på benet
- Justerbar och knickfri slang
- Slutet system
- Tömningsventilen är enkel att öppna och stänga
- Backventil mellan påse och slang
- Transparent framsida
- Volymgraderad
- Inbyggd konnektor som passar till på marknaden förekommande katetrar/urindroppssamlare
- PVC-, latex- och ftalatfri



## Funktioner

En tömbar påse med ett slutet system behöver inte bytas lika ofta och den kan kopplas till en annan påse för att få större uppsamlingsvolym (t ex nattetid) Påsen är försedd med backventil mellan påse och slang.

Sängpåsen rymmer 2 liter och dess tömningsventil kan öppnas med en hand och ger bra kontroll vid tömning samt visar tydligt om den är öppen eller stängd.

Byt påse enligt gällande riktlinjer och rekommendationer, vanligtvis en gång per vecka.

Urinpåsen är fri från PVC, ftalater och latex.

### Knickfri slang

Om slangen böjs kraftigt rinner urinen fritt eftersom den är knickfri, liksom återtar ursprungsform. Slangen kan kortas av till önskvärd längd. Om du klipper av slangen, spara så mycket som möjligt av den släta delen, för att underlätta fastsättning av slangen på påsen.

## Produktsortiment

Conveen Security+	Avklippbar slang	Fast konnektor	Volym ml.	Slanglängd cm	Antal/ fp.	Antal /tfp	Coloplast Art nr
Sängpåse	Ja	Ja	2000	140	30	120	213460

## Användarinstruktioner

För instruktioner hur Conveen Security+ ska användas, se separat bruksanvisning.

## Förvaring

Förvaras i rumstemperatur såvida inte annan information anges på eller i förpackningen.

## Hållbarhet

Hållbarhetstiden är fem år. Använd produkten före utgångsdatum angivet på förpackningen.



0543