

Latex-fri

PVC-fri

Ftalat-fri

Conveen® Security+

Urindroppssamlare

Brett sortiment i många varianter



Produktinformation

Användning

Urinuppsamling för män i kombination med en urinuppsamlingspåse.

Urinläckage (inkontinens) kan ha olika omfattning alltifrån några droppar till ofrivillig tömning av hela blåsan. En urindroppssamlare (uridom) ansluten till en urinuppsamlingspåse är en funktionell och bra lösning för män med urinläckage eller som har svårt att hinna till toaletten.

Anslutningen passar till de på marknaden förekommande urinpåsar och anslutningen ger ett säkert skydd mot läckage.

Huden kommer inte i kontakt med urin, som vid användning av absorberande skydd, så risken för hudirritation minskar och användaren slipper urinlukt.

Återanvändning av engångsprodukten rekommenderas inte då kontaminering kan förekomma.




Fördelar

- PVC- ftalat- och latexfri
- Självhäftande (gäller ej kombipack)
- Knickfri
- Enkel applicering
- Applikator
- Hygienisk

Användartips

Vid tvätt av penis, använd inte återfettande tvål för att säkerställa att urindroppssamlaren fäst ordentligt.

Det är viktigt att ha rätt storlek på urindroppssamlaren. Penis ska mätas vid bredaste diametern i avslappnat tillstånd. Om storleken på penis är mellan två storlekar bör den mindre storleken väljas. Använd t ex Conveen måtsticka som kan beställas utan kostnad från Coloplast kundservice, tel 0300-332 99.

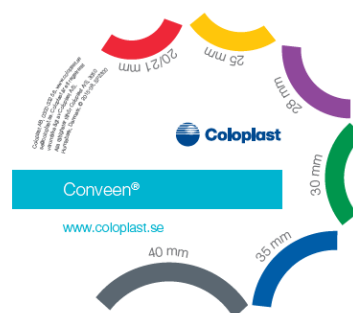

Funktioner

Conveen Security+ självhäftande med applikator blir fixeringen enkel och hygienisk.



Urindroppssamlaren är knickfri, vilket säkerställer att urinen rinner fritt i alla lägen, även om den böjs.

Vid användning, placeras urindroppssamlaren över ollonet och rullas ut, applikatorn tas bort och urindropp samlaren kramas till för att få ordentligt fäste runt penis.

Conveen Security+ kan sitta på i ett dygn, innan det är dags att byta.

Tillbehör

Dubbelhäftande häftremsa. Häftremsan placeras runt penis mot penisroten och urindroppssamlaren rullas ut över häftremsan.

Produktsortiment

Conveen Security+	Omkrets mm	Diameter mm	Längd mm	Antal/fp	Antal/tp	Coloplast art nr
Självhäftande Standard med applikator	● 70	21	82	30	180	052210
	● 80	25	82	30	180	052250
	● 90	30	82	30	180	052300
	● 105	35	82	30	180	052350
	● 125	40	82	30	180	052400
<hr/>						
Conveen Security+	Omkrets mm	Diameter mm	Längd mm	Antal/fp	Antal/tp	Coloplast art nr
Självhäftande Kort med applikator	● 70	21	50	30	180	220110
	● 80	25	50	30	180	220120
	● 90	30	50	30	180	220130
	● 105	35	50	30	180	220140
<hr/>						
Conveen Security+	Omkrets mm	Diameter mm	Längd mm	Antal/fp	Antal/tp	Coloplast art nr
Kombipack med häftremsa	● 70	21	82	30	180	050210
	● 80	25	82	30	180	050250
	● 90	30	82	30	180	050300
	● 105	35	82	30	180	050350
	● 125	40	82	30	180	050400
Häftremsa			113 x 16	20	500	051001

Användarinstruktioner

För instruktioner hur Conveen Security+ ska användas, se separat bruksanvisning.

Förvaring

Förvaras i rumstemperatur såvida inte annan information anges på eller i förpackningen.

Hållbarhet

Hållbarhetstiden är tre år. Använd produkten före utgångsdatum angivet på förpackningen.

