

Latex-fri

Ftalat-fri

Conveen® Standard Urinuppsamlingspåse

Påse med stor volymkapacitet



Produktinformation

Användning

Conveen Standard är en tömbar urinuppsamlingspåse avsedd för patient som använder KAD eller urindropsamlare.

Conveen Standard urinuppsamlingspåse passar till på marknaden förekommande urinkatetrar och urindropsamlare.

Conveen Standard har en volym på 1500 ml och lämplig vid behov av större volymkapaciteter. Den passar som både ben- och sängpåse.

Återanvändning av engångsprodukten rekommenderas inte då kontaminering kan förekomma.

Fördelar

- Fixeringsband för att fästa på benet
- Slät slang som återtar sin form efter knickbildning
- Slutet system
- Backventil mellan påse och slang
- Tömningsventilen är enkel att öppna och stänga
- Hudvänlig non-woven material
- Transparent framsida
- Tydlig volymgradering
- Konnektorn passar till marknadens förekommande katetrar och urindropsamlare utan att ge läckage
- Latex- och ftalatfri
- Innehåller PVC



Funktioner

En tömbar påse med ett slutet system behöver inte bytas lika ofta och den kan kopplas till en annan påse för att få större uppsamlingsvolym (t ex nattetid). Alla påsar är försedda med backventil mellan påse och slang. Påsklämman signalerar tydligt om den är öppen eller stängd.

Påsen rymmer 1500 ml och påsklämman kan öppnas med en hand och ger bra kontroll vid tömning.

Byt påse enligt gällande riktlinjer och rekommendationer, vanligtvis en gång per vecka.

Material

Baksidan har ett hudvänligt non-woven material som känns mjukt mot benet och framsidan är transparent. Conveen Standard är latex- och ftalatfri.

Produktsortiment

Conveen Standard	Avklippbar slang	Fast konnektor	Volym ml.	Slanglängd cm	Antal/ fp	Antal/ tfp	Coloplast Art nr
	Ja	Nej	1500	90	10	100	050620

Användarinstruktioner

För instruktioner hur Conveen Standard ska användas, se separat bruksanvisning.

Förvaring

Förvaras i rumstemperatur såvida inte annan information anges på eller i förpackningen.

Hållbarhet

Hållbarhetstiden är fem år. Använd produkten före utgångsdatum angivet på förpackningen.

