

Peristeen®

Peristeen® Analpropp

Bidrar till god livskvalitet vid
avföringsläckage

Latex-
och
PVC-fri



Enkel, säker och diskret

Peristeen analpropp är ett enkelt och effektivt hjälpmedel mot avföringsläckage. Eftersom den är mycket liten, får analproppen plats i din ficka eller väska och ger dig självförtroendet att delta i aktiviteter där du behöver känna dig trygg, till exempel vid resor, sociala och fysiska aktiviteter, även vid bad och simning. Analproppen förs in som ett stolppiller.

Funktion och egenskap

- Latex- och PVC-fri
- Effektiv och dokumenterad i kliniska studier¹
- Förhindrar avföringsläckage och minskar relaterad lukt
- Ger ökad frihet
- Säker
- Skadar inte rektalslemhinnan

Funktion

Med Peristeen analpropp stannar avföringen i tarmen, vilket:

- Minskar risken för t ex sår och obehaglig lukt relaterad till avföringsläckage
- Ökar möjligheten till t ex bad, samliv och valet av klädsel.

Hur det fungerar

Förs in som ett stolpillär, detta diskreta hjälpmedel hjälper till att:

- Förhindra okontrollerad tömning av avföring.
- Bidrar till minskad obehaglig doft, relaterad till avföringsläckage

Lämplig vid

- Ofrivilligt läckage av avföring hos vuxna och barn från 3 års ålder.

Viktigt vid användning

- Gel kan användas för att underlätta införandet.
- Användningstid upp till 12 timmar.

Får ej användas vid

- Analstenos.
- Hemorrojder (tredje & fjärde graden).

Analinkontinens

Analinkontinens är ett problem som är vanligare än man tror och som innebär nedsatt förmåga att hålla tätt för gaser och avföring. Flertalet söker inte hjälp, utan försöker dölja sina problem med egna lösningar, men det måste inte vara så.

Peristeen analpropp är en effektiv och unik problemlösare som används vid avföringsläckage (även lös, ej diarré), förebygger relaterad lukt och reducerar hudirritationer. Vid användning vidgar sig analproppen och formar sig efter tarmväggen och sitter säkert på plats. Effektiviteten hos Peristeen analpropp är dokumenterad i kliniska studier¹.

Material

Analproppen är tillverkad i ett mjukt, luftgenomsläppligt skummaterial och har ett polyesterband ingjutet för enkelt och säkert avlägsnande. Analproppen hålls sammanpressad av en vattenlöslig film och expanderar när den kommer i kontakt med fukt och värme inuti tarmen. Peristeen analpropp hindrar läckage i 12 timmar. Den kan tryggt användas varje dag. Produkten är latexfri och PVC-fri.

Har du frågor om våra produkter?

Kontakta vår kundservice: 0300-332 56

Peristeen Analpropp	Längd	Diameter	Diameter utvidgad	Antal i förp	Coloplast art. nr
Liten	26 mm	12 mm	37 mm	20 st	014500
Stor	26 mm	13 mm	45 mm	20 st	014510
Provkit	26 mm	12 & 13 mm	37 & 45 mm	2 av varje storlek	290041

1. W. PFrommer, A. M. Holschneider, N. Löffler, B. Schaff, B. M. Lire. A new Polyurethane Anal Plug in the Treatment of Incontinence after Anal Atresia repair (European Journal of Pediatric Surgery, October 2000:10, pp 186-190).

Coloplast AB, 0300-332 56, www.coloplast.se, mail@coloplast.com. PM-38816

Coloplast är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2025-06. Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Danmark.