

Peristeen® Light



PVC-fri

Lågvolyms Transanal irrigation (250 ml)

Frihet i ett litet format

Lock som är designat för att skjuta över behållaren, för enklare öppning



Backventil för att förhindra backflöde av avföringsvatten

Vattenbehållare med greppvänlig design, enkel att hålla i med en hand och enkel att klämma på

Rundad topp, med två ögon, designad för att minimera obehag vid införande



Konans bas är utformad för att minimera risk att avföringsvatten kommer i kontakt med vattenbehållarens utsida

Mjuk, flexibel konkateter med hydrofil beläggning för smidigt införande

Produktinformation

Användning

Peristeen Light är en transanal irrigationsenhet (TAI) med låg volym (250 ml vatten) för personer som behöver hjälp med att hantera tarmdysfunktion så som förstoppning eller avföringsinkontinens.

Den är avsedd att vara enkel att använda, så oavsett om dina patienter är hemma eller på resande fot kan de utföra TAI med låg volym och uppleva den lindring och lättnad som Peristeen Light kan ge.

Har du frågor om våra produkter?

Kontakta något av våra team nedan.

Consumer Care för privatpersoner: 0300-332 56

Kundservice för vårdpersonal: 0300-332 99

Fördelar

Peristeen Light är ergonomiskt utformad för att vara enkel och användarvänlig, både för personer med nedsatt handfunktion och personer på språng:

- Monteras enkelt i två steg och fylls på under vattenkran via den stora öppningen.
- Lock som är utformat för att skjuta ut över behållaren för att vara enkel att öppna och för att underlätta tömning.
- Backventil utformad för att förhindra att avföringsvatten kommer in i behållaren.
- Formen på konkateterns nederdel minimerar risk för läckage under genomförandet.
- Lock utformat för att skjuta ut över behållaren för att underlätta tömning.
- Vattenbehållaren är utformad för att göra den lätt att hålla i och klämma på.
- Praktiska råd, inspiration och support för bättre tarmkontroll, rutin och följsamhet till behandlingen genom vårt kostnadsfria supportprogram Coloplast Care

Indikationer

Peristeen Light är indikerad för patienter som lider av avföringsinkontinens, kronisk förstoppning och/eller tidskrävande tarmhanteringsprocedurer. Produkten är indikerad för vuxna samt barn från tre år.

Kontraindikationer

Peristeen Light transanal irrigation ska inte användas i följande situationer, eftersom den mekaniska obstruktionen eller den försvagade vävnaden i tjocktarmen orsakad av något av nedanstående ökar risken för tarmperforering, trauma eller blödning:

- Känd anal eller kolorektal stenosis
- Kolorektalcancer (aktiv/recidiv)
- Ischemisk kolit
- Akut inflammatorisk tarmsjukdom
- Akut divertikulit

Eftersom listan inte är komplett måste läkare/sjukvårdspersonal alltid även överväga individuella faktorer.

Funktioner

Hydrofil konkateter för engångsbruk

Konkatetern har en rundad topp, med två ögon, utformad för att minimera obehag, samt ett hydrofilt ytskikt som enkelt och snabbt aktiveras med vatten.

Konkatetern är avsedd för engångsbruk, för optimal hygien och för att säkerställa smidig införing vid varje tillfälle.

Formen på konkateterns nederdel minimerar risk för läckage under genomförandet.

Greppvänlig vattenbehållare

Vattenbehållaren är utformad för att vara enkel att hålla i och att klämma på. Den fylls enkelt på under vattenkran eller från flaska och kan fyllas med upp till 250 ml vatten.

Enkel montering i två steg

Locket är utformat för att vara lätt att öppna samt skjuter ut över behållaren för att underlätta tömning.

Backventilen är utformad för att förhindra att avföringsvatten kommer in i behållaren.

Produkten är utformad för att vara bekväm att använda både i hemmet eller när man är på språng.



Produktsortiment

Peristeen Light System	Innehåll (minsta beställningsbara enhet)	Antal/TFP*	Artikelnummer
Peristeen Light 250 ml	1 vattenbehållare, 30 konkaterar	8 system/TFP	291760
Peristeen Light 250 ml	1 vattenbehållare, 15 konkaterar	12 system/TFP	291750
Peristeen Light 250 ml	Startset, 1 vattenbehållare, 5 konkaterar	24 system/TFP	291780

Peristeen Light Tillbehör	Innehåll	Antal/TFP*	Artikelnummer
15 katetrar	15 hydrofila konkaterar	12 avd Fp/TFP	291720

*TFP=transportförpackning

Hantering

Användarinstruktioner

För instruktioner hur Peristeen Light ska användas, se separat bruksanvisning och steg-för-steg guide.

Rengöring och förvaring

Produkten rengörs med vatten och mild tvål. Torka med handduk eller liknande och förvara produkten med locket öppet.

Konkatetern är avsedd för engångsbruk och ska slängas i enlighet med lokala riktlinjer, dvs. med vanligt hushållsavfall.

Vattenbehållaren är avsedd för flergångsbruk och ska slängas efter 30 användningar i enlighet med lokala riktlinjer, dvs. med vanligt hushållsavfall.

Hållbarhet och byte

Produktkomponent	Antal tillåtna återanvändningstillfällen
Kateter	1
Vattenbehållare inkl. lock	30

Hållbarhetstid (shelf life) är 3 år för vattenbehållare och konkaterar.

Coloplast Care

Helhetserbjudande med Peristeen

Coloplast Care anses vara det bästa support-programmet för tarmkontroll enligt vårdgivare⁵. För att lyckas med en ny typ av behandling är det viktigt att man lär sig grunderna och skapar en rutin som fungerar väl. Därför erbjuds alla som använder Peristeen Light ett kostnadsfritt supportprogram - Coloplast Care - som ger tillgång till:

- Personlig kontakt med utbildade rådgivare
- Rådgivare som är experter och måna om att hjälpa användare att komma igång och lyckas med behandlingen
- Praktiska råd, inspiration och support för bättre tarmkontroll, rutin och följsamhet till behandlingen
- Individuellt behovsanpassat stöd via telefon när användaren behöver det
- Rådgivning som utgår från en problemlösningssguide framtagen av bland annat experter inom tarm och TAI.
- Rådgivning enbart kring produktrelaterade frågor
- Skriftlig information såsom motiverande brev och faktablad kring olika ämnen som är relevanta för personer med tarmbesvär

Anmälan till Coloplast Care görs via hemsidan: www.coloplast.se/coloplast-care alternativt via telefon: 0300-332 56 eller via mail: se@coloplast.com.

Referens:
5. Integron Usage and Attitude Survey Bowel Management, Healthcare Professional and Patient, Nederländerna, 2019.