


Förberedelse

Börja med att tvätta dina händer och området kring urinrörsmynningen. Det här är viktigt för att undvika att föra över bakterier från dina händer till katetern.

Se till att du är helt klar att genomföra kateterisering innan du öppnar förpackningen. Slutför kateteriseringen utan onödigt dröjsmål och avlägsna katetern när urinblåsan har tömts.

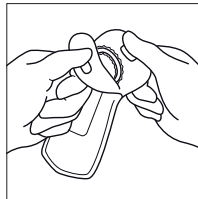


Öppningsmetod 1:

Dra isär förpackningens två flikar. Ta ut katetern.




Öppningsmetod 2:


Fäst förpackningen vid ett horisontellt underlag med hjälp av den övre delen av den självhäftande etiketten på baksidan. Dra isär förpackningens två flikar. Ta ut katetern.

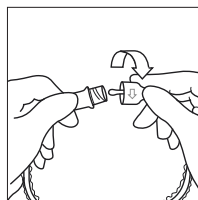


Vrid för att öppna katetern.

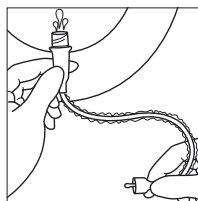

Töm ut vattnet genom utloppet i toaletten eller handfatet före kateterisering.

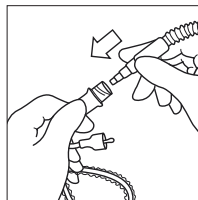

Alternativt kan en urinpåse kopplas till utloppet/konnektorn för att tömma ut vattnet.

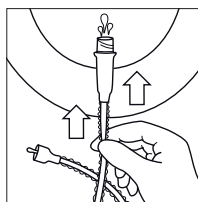

Dra fingrarna längs hela hylsan för att tömma de sista vattendropparna.



Bruksanvisning

23320448 Version 1

Coloplasts logotyp är ett registrerat varumärke som tillhör Coloplast A/S. Med ensamrätt. © 2018-10-08

Indikationer

Steril tappningskateter för intermittent kateterisering.

Information

Coloplast antar inget ansvar för eventuella skador eller förluster som kan uppstå om produkten används på ett sätt som strider mot Coloplasts aktuella rekommendationer.

Den vätska som katetern ligger i är ofarlig. Vätskan kan dock orsaka fläckar.

Kateteriseringen ska ske så snart som möjligt efter att förpackningen har öppnats. Katetern ska alltid avlägsnas så fort urinblåsan har tömts.

Steriliserad med strålning.

Försiktighetsåtgärder

Använd inte produkten om förpackningen är skadad.

Skyddas från solljus.

Kontakta vårdpersonal innan du utför självkateterisering för första gången.


Kontakta vårdpersonal om du:

- får symptom som feber, obehag vid blåstömning, överaktiv blåsa eller blod i urinen.

Varningar

Återanvändning av denna engångsprodukt kan utsätta användaren för risker. Ombearbetning, rengöring, desinficering och/eller sterilisering kan försämra produktens egenskaper och utsätta användaren för ökad risk för fysiska skador eller infektion.


Införande av kateter

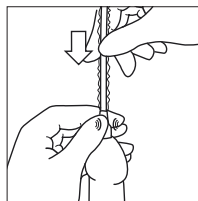


Håll din penis medan du för in katertippen i urinrörsmynningen.

När tippen har placerats i urinröret ska du se till att du håller din penis och det turkosa handtaget i samma hand.

Med den andra handen fortsätter du att stegvis föra in katetern som omges av skyddshöljet.

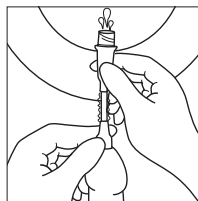


Avbryt införingen av katetern när det börjar rinna urin.

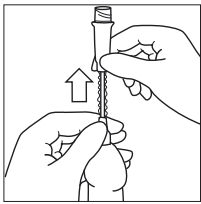


När urinen slutar rinna drar du ut katetern ca 1–2 cm. Om urinen börjar rinna igen väntar du tills den slutar rinna. Dra sedan ut katetern 1–2 cm igen. Avlägsna katetern när urinblåsan är tom.


Avfallshantering

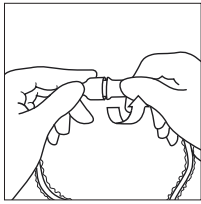

Efter användning kan katetern stängas igen genom att handtaget och utloppet/konnektorn vrids ihop.

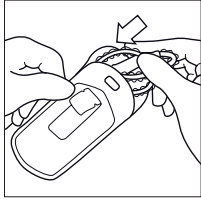

Lägg tillbaka katetern i förpackningen.

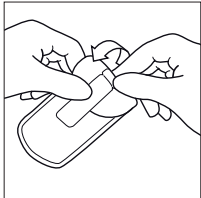

Använd den stora klisteretiketten på baksidan för att stänga förpackningen igen.

Produkten är endast avsedd för engångsbruk och ska kastas i enlighet med lokala föreskrifter t.ex. med vanligt hushållsavfall.

Spola inte ner produkten i toaletten.

Symboler



Ej tillverkad av naturgummilatex.



Använd inte produkten om förpackningen är skadad.