

Sängpåse

Conveen Basic
Conveen Standard
Simpla Profile
Simpla S

Hängare/stativ för påse

Conveen®
Conveen Basic
Simpla



Bruksanvisning

23314593 Version 2
Coloplasts logotyp är ett registrerat varumärke som tillhör Coloplast A/S. Med ensamrätt. © [2013-04]

Miljöfakta

Coloplast fabriker i Danmark, Ungern och Kina är miljöcertifierade enligt den internationella standarden SS/EN/ISO 4001. Övriga fabriker kommer successivt att bli certifierade. Coloplast AB är anslutna till Svensk Förpackningsinsamling/REPA. Produkt: Efter användning rekommenderar vi att produkten går till söföbränning med energitvinnning. Förpackning: Sortera och lämna till förpackningsinsamling. Allt material i Coloplast förpackningar kan återvinnas.

Indikation

Urinuppsamlingspåse

Information

Coloplast tar inget ansvar för eventuella skador eller förluster som kan uppstå om produkten används på ett sätt som står i strid med Coloplasts aktuella rekommendationer.

Försiktighet

Använd inte produkten om förpackningen är skadad.

Varning

Återanvändning av denna engångsprodukt utgör en potentiell risk för användaren. Ombearbetning, tvättning, desinficering och sterilisering äventyrar produktens egenskaper, vilket utsätter patienten för en ökad risk för fysiska skador eller infektion. Denna produkt innehåller ftalater och ska inte användas av barn eller av gravida eller ammande kvinnor utan föregående bedömning från vårdpersonal.

Använda en Coloplast sängpåse med en hängare eller ett stativ från Coloplast

Förberedelser

1. En sängpåse kan kopplas direkt till en urindropsamlare eller kvarliggande kateter. Den kan även anslutas till en benpåse för att erbjuda extra volymkapacitet nattetid. När kopplingen ska hållas etablerad hela natten måste benpåsen ha en mjuk utloppsslang som går att ansluta till inloppet på sängpåsen.

Intermittent kateterisering
En sängpåse kan även anslutas till en tappningskateter för urinuppsamling vid intermittent kateterisering.

2. Om påsen har en provtagningsport kan urinprov tas vid behov. Använd en spruta med eller utan nål, beroende på behov.

Conveen Standard Simpla Profile

3. Om slangens lösa konnektor, eller om själva slangens inte redan är fäst vid påsen, kan slangens längd kortas till önskvärd längd. Klipp av slangens med en sax.

Simpla S

4. Sätt fast konnektorn på slangens genom att trycka och samtidigt vrida in den smala änden av konnektorn så långt in som möjligt i slangens. För anslutning av slang till påse, tryck och vrid in den avklippta änden av slangens i i påsens inloppskoppling.

När du klipper av en veckad slang ska du lämna kvar så mycket av den släta delen som möjligt. Det gör att anslutning mellan slangens och konnektorn blir så säker som möjligt då konnektorn monteras, och detsamma gäller för anslutning mellan påse och slang.

5. Använd en påhängare eller stativ från Coloplast för att hänga upp sängpåsen. Fäst påsen ordentligt vid hängaren eller stativet genom att föra in de tandade delarna på hängaren eller stativet i skåromma överst på påsen. Haka fast påhängaren på sänggräcket eller ställ stativet på golvet vid sidan av sängen.


För att urinflödet ska bli så bra som möjligt är det viktigt att sängpåsen placeras lägre än du själv då du ligger i sängen.

Intermittent kateterisering
Häng upp eller placera påsen på det sätt du tycker är mest praktiskt. Kom ihåg att se till att placera påsen längre än ditt bäckenområde, och detta gäller oberoende av om du föredrar att utföra kateteriseringen sittande, stående eller liggande.


6. Kontrollera att utloppsventilen är stängd.

Vikutlopp Conveen Standard Kran Simpla Profile
Tryck-/dragutlopp Conveen Basic Kran med skjutreglage Conveen Basic Simpla S

Användning

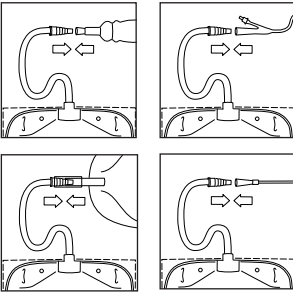
7. Avlägsna skyddshatten om konnektorn är försedd med en sådan.
- 
- Anslut konnektorn ordentligt till en urindroppsamlare eller kvarliggande kateter.
- Konnektorn kan också anslutas till utloppet på benpåsen. Öppna utloppsventilen på benpåsen.
- Urinuppsamlingsystemet kan nu användas.
- Intermittent kateterisering*
Anslut påsens konnektor med tappningskatetern.

När du börjar kateteriseringen kommer urinen att rinna ner i sängpåsen.

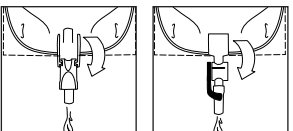
8. Vi rekommenderar att påsen töms då den är något mer än halvfull för att urinflödet ska bli optimalt.
- 
- Intermittent kateterisering*
Töm sängpåsen efter varje kateterisering.

Vikutlopp
Conveen Standard


Kran
Simpla Profile

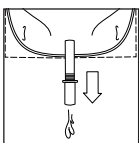


Tryck-/dragutlopp
Conveen Basic

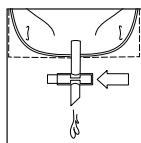

Kran med skjutreglage
Conveen Basic
Simpla S

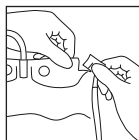

Utan utloppskran
Conveen Basic
Simpla S

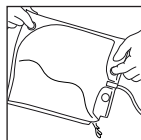

Borttagning

9. Avlägsna sängpåsen från urindroppsamlaren eller den kvarliggande katetern.

Om sängpåsen är ansluten till benpåsen ska du i stället stänga utloppsventilen på en benpåse. Koppla därefter bort sängpåsen. Undvik att röra vid den öppna änden på benpåsens utlopp.

Intermittent kateterisering
När kateteriseringen är slutförd, koppla bort sängpåsen från tappningskatetern.

Ta bort påsen från hängaren eller stativet.

Avfallshantering

10. Byt påse enligt gällande riktlinjer och rekommendationer.

Hängare och stativ kan återanvändas.

Töm påsen innan den kasseras.

Påsen är endast avsedd för engångsbruk och ska kastas i hushållsavfallet. Spola inte ned produkten i toaletten.

Symboler



Innehåller ftalater/förekomst av ftalater:
diethylhexylftalat (DEHP).



Använd inte produkten om förpackningen är skadad.