

**Bruksanvisning**

23314459 Version 1

Coloplasts logotyp är ett registrerat varumärke som tillhör Coloplast A/S. Med ensamrätt. © [2013-03]

Miljöfakta

Coloplast fabriker i Danmark, Ungern och Kina är miljöcertifierade enligt den internationella standarden SS/EN/ISO 4001. Övriga fabriker kommer successivt att bli certifierade. Coloplast AB är anslutna till Svensk Förpackningsinsamling/REPA. Produkt: Efter användning rekommenderar vi att produkten går till sopförbränning med energiutvinning.

Förpackning: Sortera och lämna till förpackningsinsamling.

Allt material i Coloplast förpackningar kan återvinnas.

Indikation

Peristeen analpropp är avsedd som en barriär mot avföring i ändtarmen.

Kontraindikation

Du får inte använda Peristeen analpropp om du lider av
 – hemorrojder (tredje och fjärde gradens)
 – Anal stenos

Information

Coloplast tar inget ansvar för eventuella skador eller förluster som kan uppstå om produkten används på ett sätt som står i strid med Coloplasts aktuella rekommendationer.

Det tar lite tid att vänja sig vid analproppen om du har normal känslighet i ändtarmsregionen. Normalt sett är det dock inte så för den som har försämrad eller nedsatt känsla. Avföringen bör vara fast och formad.

Analproppen finns i två olika storlekar. Det går inte att i förväg fastställa vilken av dem som ska användas. Prova båda storlekarna och välj den som fungerar bäst. Vid regelbunden användning av analproppen händer det emellanåt att den trycks ut ur ändtarmen. Det finns ingen uppenbar orsak till denna reaktion, men erfarenheten visar att samma användare kan återuppta användningen av proppen utan problem efter en kortare proppfri period.

Försiktighet!

Denna produkt får inte användas utan föregående bedömning från vårdpersonal. Kontakta vårdpersonal innan du använder Peristeen analpropp för första gången eftersom det är väldigt viktigt att du får information om hur den ska användas.

Använd inte analproppen om du lider av diarré.

Om Peristeen analpropp stoppas i munnen expanderar den och kan orsaka kvävning.

Avlägsna analproppen om du känner att du behöver tömma tarmen. Om du inte har någon känsla i ändtarmsregionen och inte känner något behov av att tömma tarmen bör proppen bytas regelbundet.

Peristeen analpropp måste tas ut senast tolv timmar efter insättning. Om du får problem med att avlägsna Peristeen analpropp måste du kontakta vårdpersonal.

Om du upprepade gånger upplever obehag i samband med användning av Peristeen analpropp ska du sluta att använda den och kontakta vårdpersonal.

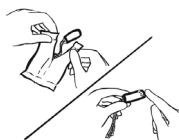
Förvaras utom räckhåll för barn.

Varning

Återanvändning av denna engångsprodukt utgör en potentiell risk för användaren. Ombearbetning, tvättning, desinficering och sterilisering äventyrar produktens egenskaper, vilket utsätter patienten för en ökad risk för fysiska skador eller infektion.

Bruksanvisning för Peristeen analpropp

Analproppen kan användas av personer som lider av avföringsinkontinens eller flatulens (ofrivillig gasavgång). Den utgör en effektiv avföringsbarriär i ändtarmen.

**1. Förberedelser**

Stryk på en liten mängd gel/salva på toppen av Peristeen analpropp.

2. Insättning

För försiktigt in Peristeen analpropp i ändtarmen, precis som ett vanligt stolpiller. Se till att hela analproppen är införd i ändtarmen, precis innanför ringmuskeln. Låt bandet hänga kvar utanför kroppen.

**3. Användning**

Peristeen analpropp är nu korrekt placerad i ändtarmen där den snabbt expanderar till full storlek i takt med att filmen löses upp av den naturliga värmen och fukten inuti kroppen. Proppen kan lämnas kvar i ändtarmen i upp till 12 timmar.

**4. Avlägsnande**

Du tar ut Peristeen analpropp ur ändtarmen genom att försiktigt dra i bandet som sitter ingjuten i proppen. Observera att avlägsnandet av analproppen inte utlöser ändtarmens tömningsreflex. Det finns alltså ingen anledning till brådska. En ny analpropp kan sättas in omedelbart efter att den gamla har avlägsnats. Kasta analproppen i soppåsen efter användning, INTE i toaletstolen.



Obs! Peristeen analpropp måste tas ut senast tolv timmar efter insättning. Om det är svårt att avlägsna analproppen måste du kontakta läkare.