


SpeediCath Compact och SpeediCath Compact Plus1

1 Hädanefter endast benämnd SpeediCath Compact.


SpeediCath Compact lämpar sig utmärkt för kateterisering på toaletten.

SpeediCath Compact är en unik och diskret kateterlösning som har utvecklats särskilt med tanke på den kvinnliga anatomin. Den hydrofila SpeediCath Compact-katetern är helt pvc-fri och levereras klar att använda i en steril koksaltlösning.


Börja med att tvätta händerna och området runt urinrörets mynning. Det är viktigt att undvika bakterieöverföring från händerna eller könsorganen till katetern. SpeediCath Compact ligger förpackad i en steril koksaltlösning. Se till att du är helt redo att inleda kateteriseringen innan du öppnar kateterförpackningen.

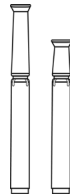


1. SpeediCath Compact och SpeediCath Compact Plus

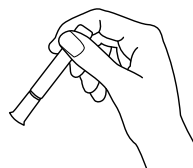


2. Håll produkten lodrätt med greppet vänt nedåt.

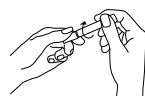

3. Bryt förseglingen genom att försiktigt vrida de två delarna av hylsan i motsatt riktning.

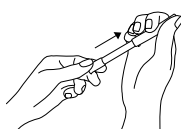

4. Sära långsamt på den utvändiga och invändiga hylsan tills de låses fast i det helt utdragna läget. Den utvändiga hylsan fungerar som kateterns handtag. Katetern ligger i den invändiga hylsan.

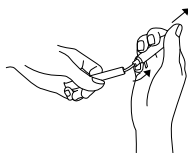

5. Frigör katetern genom att fatta tag i den invändiga hylsan med fast hand och avlägsna den invändiga hylsan genom att försiktigt vrida och dra av det. Den invändiga hylsan kan kasseras eller tömmas och behållas för diskret kassering senare. Katetern är nu klar att användas.



6. Sära på blygdläpparna med ena handen för att frilägga urinrörets mynning. För försiktigt in katetern i urinröret med den andra handen, ca 2 cm i taget. Strax innan katetern når urinblåsan kan det hända att blåsans slutmuskel ger upphov till ett visst motstånd. Fortsätt att föra in katetern i urinröret tills urinen börjar rinna. När urinen slutar rinna, drag ut katetern 1-2 cm.

Om urinen åter börjar rinna, vänta ett par sekunder innan fortsatt utdragande av katetern ytterligare 1-2 cm. När blåsan är fullständigt tom, drag långsamt ut katetern och kassera katetern på ett hygieniskt sätt.



Bruksanvisning

23313784 Version 2

Coloplasts logotyp är ett registrerat varumärke som tillhör Coloplast A/S.

Med ensamrätt. © [2013-01]

Miljöfaktaruta

Coloplast fabriker i Danmark, Ungern och Kina är miljöcertifierade enligt den internationella standarden SS/EN/ISO 4001. Övriga fabriker kommer successivt att bli certifierade. Coloplast AB är anslutna till Svensk Förpackningsinsamling/REPA.

Produkt: Efter användning rekommenderar vi att produkten går till sopförbränning med energiutvinning.

Förpackning: Sortera och lämna till förpackningsinsamling.

Allt material i Coloplast förpackningar kan återvinnas.

Indikation

Tappningskateter för intermitterent kateterisering.

Information

Coloplast tar inget ansvar för eventuella skador eller förluster som kan uppstå om produkten används på ett sätt som står i strid med Coloplasts aktuella rekommendationer.

Katetern kan utsättas för extrema temperaturer (under 0 °C och upp till 60 °C) i upp till ett dygn utan att ta skada.

Den vätska som katetern ligger i är ofarlig. Vätskan kan dock orsaka fläckar.

Kateteriseringen ska ske så snart som möjligt efter att förpackningen har öppnats.

Katetern ska alltid avlägsnas så fort urinblåsan har tömts.

Försiktighet

Använd inte produkten om förpackningen är skadad.

Kontakta vårdpersonal innan du utför självkateterisering för första gången.

Kontakta vårdpersonal om du:

- upplever att katetern inte tömmer blåsan lika bra som vanligt.
- får symptom som feber, obehag vid blåstömning, överaktiv blåsa eller blod i urinen.

Varning

Återanvändning av denna engångsprodukt utgör en potentiell risk för användaren.

Ombearbetning, tvättning, desinficering och sterilisering äventyrar produktens egenskaper, vilket utsätter patienten för en ökad risk för fysiska skador eller infektion.

Symboler



Använd inte produkten om förpackningen är skadad.