

Security+ urindroppsamlare med häftstrip

Miljöfaktaruta

Coloplast fabriker i Danmark, Ungern och Kina är miljöcertifierade enligt den internationella standarden SS/EN/ISO 14001. Övriga fabriker kommer successivt att bli certifierade. Coloplast AB är anslutna till Svensk Förfärdningsinsamling/REPA. Produkt: Efter användning rekommenderar vi att produkten går till sopförbränning med energiutvinning. Förfärdningsinsamling: Sortera och lämna till förfärdningsinsamling. Allt material i Coloplast förfärdningar kan återvinnas.



Coloplast A/S
3050 Denmark

IFU10341 Coloplasts logotyp är ett registrerat varumärke som tillhör Coloplast A/S.

© [2009-10] Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark. Med ensamrätt.

Varning!

Återanvändning av denna engångsprodukt utgör en potentiell risk för användaren. Ombearbetning, rengöring, desinficering och sterilisering äventyrar produkterns integritet, vilket i sin tur ökar risken för fysisk skada eller infektion för patienten.

Försiktighet!

Coloplast tar inget ansvar för eventuella skador eller andra förluster som kan uppstå om produkten används på ett sätt som står i strid med Coloplasts aktuella rekommendationer.

Bruksanvisning för Conveen Security+ urindroppsamlare med häftstrip

- Klipp ner pubishären vid behov.
 - Tvätta och torka penis och området kring den.
1. Öppna förfärdningen genom att riva upp från ena änden till den andra.
 2. Avlägsna skyddspappret från båda sidor av häftstripen. Sträck försiktigt häftstripen för att aktivera dess elasticitet. Placera ena änden av häftstripen vid penisroten. Dra försiktigt i häftstripen och linda den runt penis.
 3. Rulla ut urindroppsamlaren längs penis och över häftstripen.
 4. Kläm försiktigt åt urindroppsamlaren runt penis så att den fäster vid häftstripen. Något ytterligare häftmedel behövs inte.
 5. Anslut urindroppsamlaren till en Conveen urinpåse. Urindroppsamlaren är försedd med en särskild kopplingsring i änden av utloppet som gör det lätt att trycka på urinpåsens konnektör.
 6. Urindroppsamlaren och häftstripen kan användas i ett dygn. De får inte återanvändas. Avlägsnande: Rulla av urindroppsamlaren från penis och häftstripen följer med.

