


Security+ självhäftande urindroppssamlare

Coloplast fabriker i Danmark, Ungern och Kina är miljöcertifierade enligt den internationella standarden SS/EN/ISO 14001. Övriga fabriker kommer successivt att bli certifierade. Coloplast AB är anslutna till Svensk Förpackningsinsamling/REPA. Produkt: Efter användning rekommenderar vi att produkten går till söföbränning med energitvinnning. Förpackning: Sortera och lämna till förpackningsinsamling. Allt material i Coloplast förpackningar kan återvinnas.

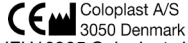

Coloplast A/S
3050 Denmark
IFU10305 Coloplasts logotyp är ett registrerat varumärke som tillhör Coloplast A/S.
© [2009-10] Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark. Med ensamrätt.

Varning!

Återanvändning av denna engångsprodukt utgör en potentiell risk för användaren. Ombearbetning, rengöring, desinficering och sterilisering äventyrar produktens integritet, vilket i sin tur ökar risken för fysisk skada eller infektion för patienten.

Försiktighet!

Coloplast tar inget ansvar för eventuella skador eller andra förluster som kan uppstå om produkten används på ett sätt som står i strid med Coloplasts aktuella rekommendationer.

Bruksanvisning för Conveen Security+ självhäftande urindroppssamlare

- Klipp ner pubishåren vid behov.
- Tvätta och torka penis och det omgivande området.

1. Öppna förpackningen genom att riva upp från ena änden till den andra.



2. Håll applikatorn med två fingrar för att underlätta placering. Placera urindroppssamlaren över ollonet, men håll ett avstånd på 1 cm mellan ollonet och utloppsslangen. Dra strippen långsamt mot dig med andra handen så att urindroppssamlaren vecklas ut smidigt och jämnt.



3. Kassera applikatorn.



4. Kläm försiktigt åt urindroppssamlaren runt penis för att säkerställa vidhäftning. Något ytterligare häftmedel behövs inte. Urindroppssamlaren kan lämnas kvar i ett dygn innan det är dags för byte. Den får inte återanvändas.



5. Anslut urindroppssamlaren till en Conveen urinpåse. Urindroppssamlaren har en ring i änden av utloppet som du kan hålla i vid anslutning till urinpåsen.



6. Avlägsnande: Lossa urindroppssamlaren från urinpåsen och rulla av den försiktigt.