



Självhäftande urindroppssamlare

Miljöfaktaruta

Coloplast fabriker i Danmark, Ungern och Kina är miljöcertifierade enligt den internationella standarden SS/EN/ISO 14001. Övriga fabriker kommer successivt att bli certifierade. Coloplast AB är anslutna till Svensk Förpackningsinsamling/REPA. Produkt: Efter användning rekommenderar vi att produkten går till sophförbränning med energiutvinning. Förpackning: Sortera och lämna till förpackningsinsamling. Allt material i Coloplast förpackningar kan återvinnas.



23311503 v.5 Coloplasts logotyp är ett registrerat varumärke som tillhör Coloplast A/S. © [2011-08] Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark. Med ensamrätt.

Varning!

Denna produkt innehåller naturgummilatex och kan orsaka allergiska reaktioner hos personer som är känsliga för latex.

Återanvändning av denna engångsprodukt utgör en potentiell risk för användaren. Ombearbetning, rengöring, desinficering och sterilisering äventyrar produktens integritet, vilket i sin tur ökar risken för fysisk skada eller infektion för patienten.

Försiktighet!

Coloplast tar inget ansvar för eventuella skador eller andra förluster som kan uppstå om produkten används på ett sätt som står i strid med Coloplasts aktuella rekommendationer.

Indikation

Extern kateter för män.

Bruksanvisning för Conveen självhäftande urindroppssamlare

- Klipp ner pubishåren vid behov.
 - Tvätta penis och området kring den.
1. Öppna förpackningen genom att riva upp från ena änden till den andra.
 2. Håll i den smala änden av applikatorn och placera urindroppssamlaren vid ollonet på penis.
 3. Håll i applikatorn och penis. Dra långsamt strippen ner mot penisroten med andra handen så att urindroppssamlaren vecklas ut i hela sin längd. Se till att båda sidorna av urindroppssamlaren vecklas ut jämnt.
 4. Kassera applikatorn.
 5. Kläm försiktigt åt urindroppssamlaren runt penis för att säkerställa vidhäftning. Något ytterligare häftmedel behövs inte.
 6. Avlägsnande: Lossa den självhäftande urindroppssamlaren från urinpåsen och rulla försiktigt av urindroppssamlaren.