



Urindroppssamlare med häftstrip

Miljöfaktaruta

Coloplast fabriker i Danmark, Ungern och Kina är miljöcertifierade enligt den internationella standarden SS/EN/ISO 14001. Övriga fabriker kommer successivt att bli certifierade. Coloplast AB är anslutna till Svensk Förpackningsinsamling/REPA. Produkt: Efter användning rekommenderar vi att produkten går till sopförbränning med energiutvinning. Förpackning: Sortera och lämna till förpackningsinsamling. Allt material i Coloplast förpackningar kan återvinnas.



23311472 v.6 Coloplasts logotyp är ett registrerat varumärke som tillhör Coloplast A/S.

© [2011-08] Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark. Med ensamrätt.

Varning!

Denna produkt innehåller naturgummilatex och kan orsaka allergiska reaktioner hos personer som är känsliga för latex.

Återanvändning av denna engångsprodukt utgör en potentiell risk för användaren. Ombearbetning, rengöring, desinficering och sterilisering äventyrar produktens integritet, vilket i sin tur ökar risken för fysisk skada eller infektion för patienten.

Försiktighet!

Coloplast tar inget ansvar för eventuella skador eller andra förluster som kan uppstå om produkten används på ett sätt som står i strid med Coloplasts aktuella rekommendationer.

Indikation

Extern kateter för män.

Bruksanvisning för Conveen urindroppssamlare med häftstrip


- Klipp ner pubishåren vid behov.
- Tvätta och torka penis och det omgivande området.



1. Öppna förpackningen genom att riva upp från ena änden till den andra.




2. Avlägsna skyddspappret från båda sidor av häftstripen. Sträck försiktigt på häftstripen för att aktivera dess elasticitet. Placera ena änden av häftstripen vid penisroten. Dra försiktigt i häftstripen och linda den runt penis.

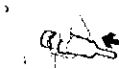

3. Rulla ut urindroppssamlaren längs penis och över häftstripen.



4. Kläm försiktigt åt urindroppssamlaren runt penis så att den fäster vid häftstripen. Något ytterligare häftmedel behövs inte.

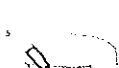

5. Anslut urindroppssamlaren till en Conveen urinpåse.



6. Urindroppssamlaren och häftstripen kan användas i ett dygn. De får inte återanvändas. Avlägsnande: Rulla av urindroppssamlaren från penis och häftstripen följer med.