

Hydrofil tappningskateter som ger större kontroll vid införandet.

SpeediCath Control för män, CH 12

SpeediCath Control är en klar att använda, hydrofil, pvc-fri kateter som levereras förpackad i en steril koksaltlösning. Katetern är lätt att hantera och har god styrförmåga under införandet.

SpeediCath Control-katetern har en fast, men böjlig del nära konnektorn som ger större kontroll vid införandet. I vissa fall måste katetern föras in fram till eller något förbi den fasta delen så att urinblåsan töms helt. Katetern har utformats på detta sätt eftersom den yttersta delen av urinröret är mer flexibelt.


1. Börja med tvätta händerna med tvål och vatten och tvätta området runt urinrörets mynning. Det är viktigt att undvika bakterieöverföring från händerna till tappningskatetern.

Förpackningen innehåller den hydrofila katetern placerad i en koksaltlösning. Se till att du är helt redo att utföra kateteriseringen innan du öppnar kateterförpackningen.

Kateterna ska förvaras liggande. Om katetern har förvarats stående ska den läggas ner för att se till att den sterila koksaltlösningen fördelas jämnt. På så sätt ser du till att hela kateterns ytbeläggning blöts ner för bästa möjliga glidförmåga.

Använd klisteretiketten på förpackningens baksida för att fästa förpackningen till en jämn, glatt, torr och horisontell yta. Öppna förpackningen genom att dra ringen mot dig och sedan neråt. Ta ut SpeediCath-katetern som är klar att användas direkt.

2. Håll upp penis med ena handen för att rätta ut urinröret. För in katetern i urinröret med den andra handen, ca 2 cm i taget.

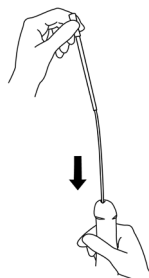

3. Strax innan katetern når urinblåsan kan det hända att blåsans ringmuskel ger upphov till ett visst motstånd. Kläm inte ihop penis eftersom det kan försvåra införandet av katetern.

Slappna av och fortsätt att föra in katetern i urinröret tills urinflödet börjar. Om det inte finns någon toalett i närheten kan en urinpåse eller en förlängningsslang kopplas till katetern.

Dra försiktigt ut katetern 2–3 cm när urinflödet upphör. Vänta i några sekunder om urinflödet återupptas innan du försiktigt drar ut katetern ytterligare 1–2 cm.

4. Dra långsamt ut katetern när urinblåsan är fullständigt tömd och kassera den på ett hygieniskt sätt. Torka bort eventuell vätska från penis och tvätta händerna.

Symboler



Använd inte produkten om förpackningen är skadad.



Bruksanvisning

23313900 Version 2

Coloplasts logotyp är ett registrerat varumärke som tillhör Coloplast A/S. Med ensamrätt. © [2013-01]

Miljöfaktaruta

Coloplast fabriker i Danmark, Ungern och Kina är miljöcertifierade enligt den internationella standarden SS/EN/ISO 4001. Övriga fabriker kommer successivt att bli certifierade. Coloplast AB är anslutna till Svensk Förpackningsinsamling/REPA. Produkt: Efter användning rekommenderar vi att produkten går till sopförbränning med energiutvinning.

Förpackning: Sortera och lämna till förpackningsinsamling.

Allt material i Coloplast förpackningar kan återvinnas.

Indikation

Tappningskateter för intermitterent kateterisering.

Information

Coloplast tar inget ansvar för eventuella skador eller förluster som kan uppstå om produkten används på ett sätt som står i strid med Coloplasts aktuella rekommendationer.

Katetern kan utsättas för extrema temperaturer (under 0 °C och upp till 60 °C) i upp till ett dygn utan att ta skada.

Katetern kan ligga hoprullad i upp till tre timmar utan att påverkas.

Den vätska som katetern ligger i är ofarlig. Vätskan kan dock orsaka fläckar.

Kateteriseringen ska ske så snart som möjligt efter att förpackningen har öppnats.

Katetern ska alltid avlägsnas så fort urinblåsan har tömts.

Försiktighet!

Använd inte produkten om förpackningen är skadad.

Kontakta vårdpersonal innan du utför självkateterisering för första gången.

Kontakta vårdpersonal om du:

- får symptom som feber, obehag vid blåstömning, överaktiv blåsa eller blod i urinen.

Varning

Återanvändning av denna engångsprodukt utgör en potentiell risk för användaren.

Ombearbetning, tvättning, desinficering och sterilisering äventyrar produktens egenskaper, vilket utsätter patienten för en ökad risk för fysiska skador eller infektion.