

Conveen® Optima

Gör det möjligt

- Latexfri
- Självhäftande
- Diskret förpackning

Conveen® Optima



Conveen® Optima

Urindroppssamlare

Funktionell och hudvänlig lösning

Urinläckage (inkontinens) kan ha olika omfattning; alltifrån några droppar till ofrivillig tömning av hela blåsan. En urindroppssamlare (uridom) ansluten till en urinuppsamlingspåse är en funktionell och bra lösning för män med urinläckage eller som har svårt att hinna till toaletten.

Huden kommer inte i kontakt med urin, som vid användning av absorberande skydd, så risken för hudirritation minskar och användaren slipper urinlukt.

Knickfri och självhäftande

Conveen Optima är en självhäftande urindroppssamlare i silikon som är skonsam mot huden. Den är förpackad i en diskret förpackning, som är enkel att ta med sig. Genom att dra i dubbelstrippen rullas Conveen Optima enkelt och jämnt ut över penis och kramas sedan till för att få ordentligt fäste.

Urindroppssamlaren är knickfri, vilket säkerställer att urinen rinner fritt i alla lägen. Konnektoring och räfflor gör att urinen passerar utan möjlighet till läckage.

Conveen Optima kan sitta på i ett dygn, innan det är dags att byta.

Användartips


Vid tvätt av penis, använd inte återfettande tvål för att säkerställa att urindroppssamlaren fäster ordentligt.

Det är viktigt att ha rätt storlek på urindroppssamlaren. Penis ska mätas vid penisroten i avslappnat tillstånd. Använd t ex Conveen mätsticka som kan beställas utan kostnad från Coloplast kundservice, tel 0300-332 99.



Conveen Optima har tilldelats priset "Look Good Feel Good 2006" från British Association of Urological Nurses, för den mest innovativa kontinensprodukten.

Conveen Optima har också tilldelats det internationella designpriset "Medical Design Excellence Award".

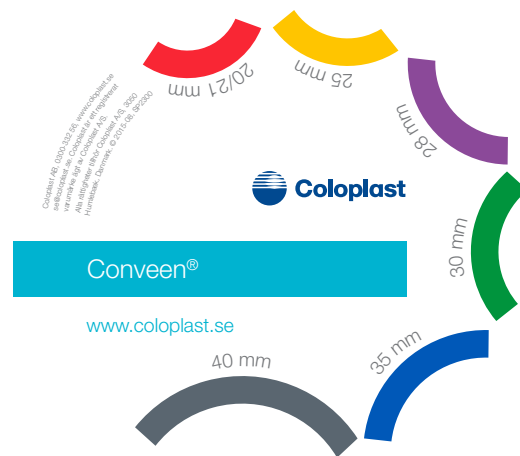

Conveen® Optima	Omkrets mm	Diameter mm	Längd	Förp styck	Coloplast art nr
Självhäftande Standard	80	25	Standard	30	220250
	85	28	Standard	30	220280
	90	30	Standard	30	220300
	105	35	Standard	30	220350
	125	40	Standard	30	220400
Självhäftande Kort	70	21	Kort	30	221210
	80	25	Kort	30	221250
	90	30	Kort	30	221300
	105	35	Kort	30	221350

Miljöfakta

Förpackning: Allt material är återvinningsbart, sortera och lämna på närmaste återvinningsstation. Vi är anslutna till FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

Produkt: Vi rekommenderar att produkten går till sopförbränning med energiutvinning.

