

# Tryggt i alla lägen – SenSura Flex

## 2-dels urostomipåse



### 1. Optimalt hudskydd

Häftan i två lager håller plattan säkert på plats samtidigt som den skyddar huden.



### 2. Tydlig blå linje för enkel applicering

Påsen sätts säkert fast mot kragen genom att placera den yttre häft-ringens kant mot den nedre blå linjen på kragen på basplattan. Håll gärna ett finger under kragen.



### 3. Snabb och säker vidhäftning

Tryck häftkopplingen på plats mot kragen.



### 4. Stark häfta håller påsen på plats

Den starka häftkopplingen håller påsen på plats utan risk att den lossnar.



### 5. Diskret påse

Den unika flerkammarpåsen fördelar urinen jämnt vilket gör påsen platt och minskar skvalpljud. Utloppet kan gömmas i fickan på framsidan.



### 6. Enkelt att tömma påsen

Håll utloppet uppåt, kläm ihop den yttersta delen av utloppet, dra ut tappen. Släpp greppet om utloppet och töm påsen.



### 7. Mycket hygienisk

Kragen kan enkelt göras ren med lite papper.




### 8. Koppla ihop med nattpåsen

För större bekvämlighet på natten kan den speciellt designade nattpåsen kopplas direkt till utloppet på urostomipåsen.



# Vår unika flerkammarpåse

**SenSura** urostomipåsar har en unik flerkammarpåse som har många fördelar. Kamrarna fördelar urinen jämnt i påsen, så att påsen varken syns eller hörs. Kamrarna hjälper påsen att forma sig efter kroppen så att du får bättre rörelsefrihet och hindrar också påsen från att vrida sig på natten. Finns också som klar, genomskinlig, påse.

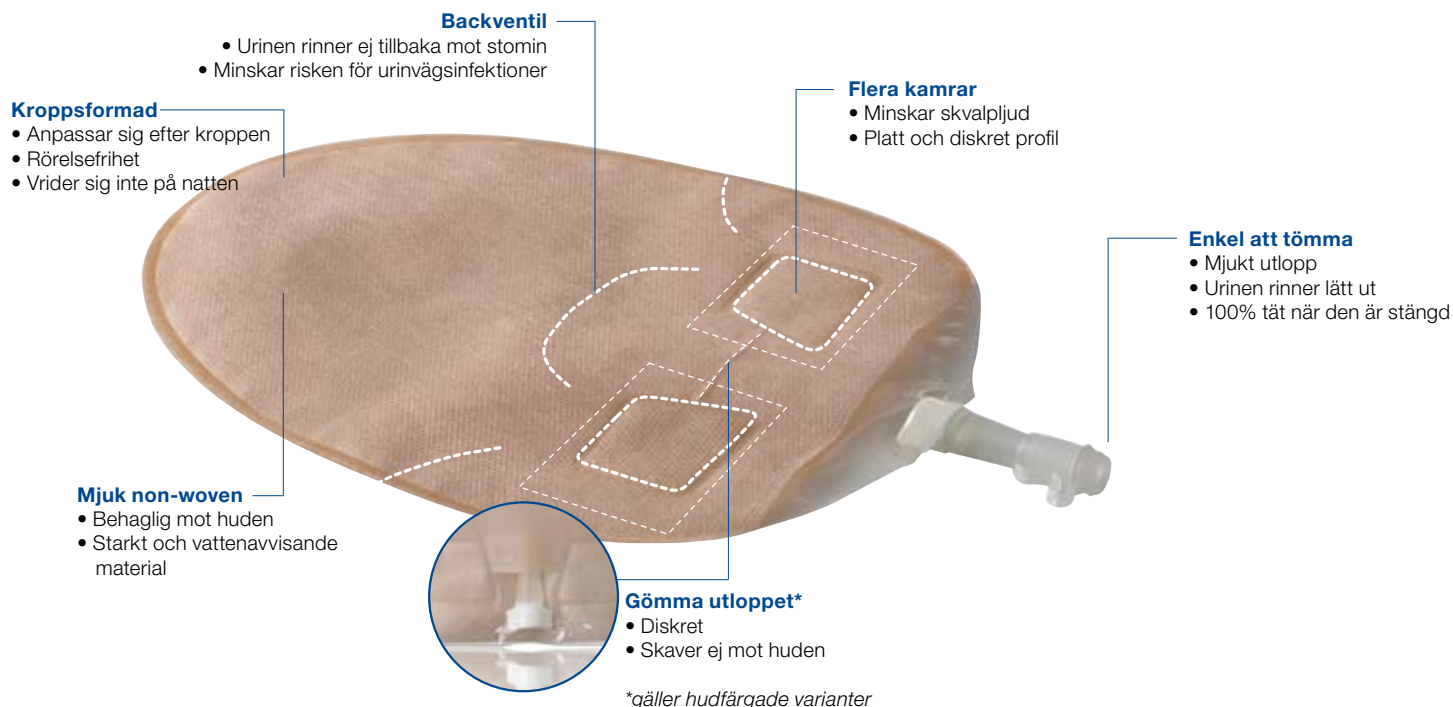

## För support dag och natt



### Coloplast Uro Nattpåse\*

Nattpåsen rymmer 2 liter och har en 120 cm lång slang, vilket ökar komforten och ger en bättre nattvila. Nattpåsen kopplas direkt till utloppet på **SenSura** urostomipåse. Konnektorn är en fast del av slangen, vilket ger en säker koppling till utloppet på urostomipåsen. Anti-knick slangen säkerställer att urinen kan flöda fritt. Du kan själv klippa slangen till önskad längd.

\* Gick tidigare under namnet Assura.



Coloplast AB  
Box 10171  
434 22 Kungsbacka  
**Växel** 0300-332 50  
**Kundservice** 0300-332 56  
Fax: 0300-188 66  
e-post: [se@coloplast.com](mailto:se@coloplast.com)  
[www.coloplast.se](http://www.coloplast.se)