

För dubbel kontroll – SenSura Click

2-dels urostomipåse



1. Optimalt hudskydd

Häftan i två lager håller plattan säkert på plats samtidigt som den skyddar huden.



5. Enkelt att tömma påsen

Håll utloppet uppåt, kläm ihop den yttersta delen av utloppet, dra ut tappen. Släpp greppet om utloppet och töm påsen.



2. Enkel att applicera

Koppla påsen mot plattan, som en vanlig 2-dels koppling. Börja nedifrån.



6. Byta påse

Att byta påse är enkelt och hygieniskt. Öppna låsringen genom att trycka mitt på låset med fingret. Lyft upp och dra påsen utåt från häftan. När säkerhetsringen är öppen kan påsen även vridas till önskad position utan att man tar av den. Stäng säkerhetsringen när påsen är på plats.



3. Lås med ett klick

Se till att påsen sitter fast mot plattan hela vägen runt. Tryck ihop säkerhetsringen tills du hör ett ljudligt "klick". Klicket är en bekräftelse på att kopplingen är låst.



7. Lätt att byta påse

Öppna säkerhetsringen genom att trycka mitt på låset med fingret. Ta tag i den vita tappen. Avlägsna påsen genom att samtidigt lyfta upp och dra påsen utåt från häftan.



4. Diskret påse

Den unika flerkammarpåsen fördelar urinen jämnt vilket gör påsen platt och minskar skvalpljud. Utloppet kan gömmas i fickan på framsidan.




8. Enkel att hålla ren

Rengör basplattan med lite papper innan applicering av ny påse.



Vår unika flerkammarpåse

SenSura urostomipåsar har en unik flerkammarpåse som har många fördelar. Kamrarna fördelar urinen jämnt i påsen, så att påsen varken syns eller hörs. Kamrarna hjälper påsen att forma sig efter kroppen så att du får bättre rörelsefrihet och hindrar också påsen från att vrida sig på natten. Finns också som klar, genomskinlig, påse.

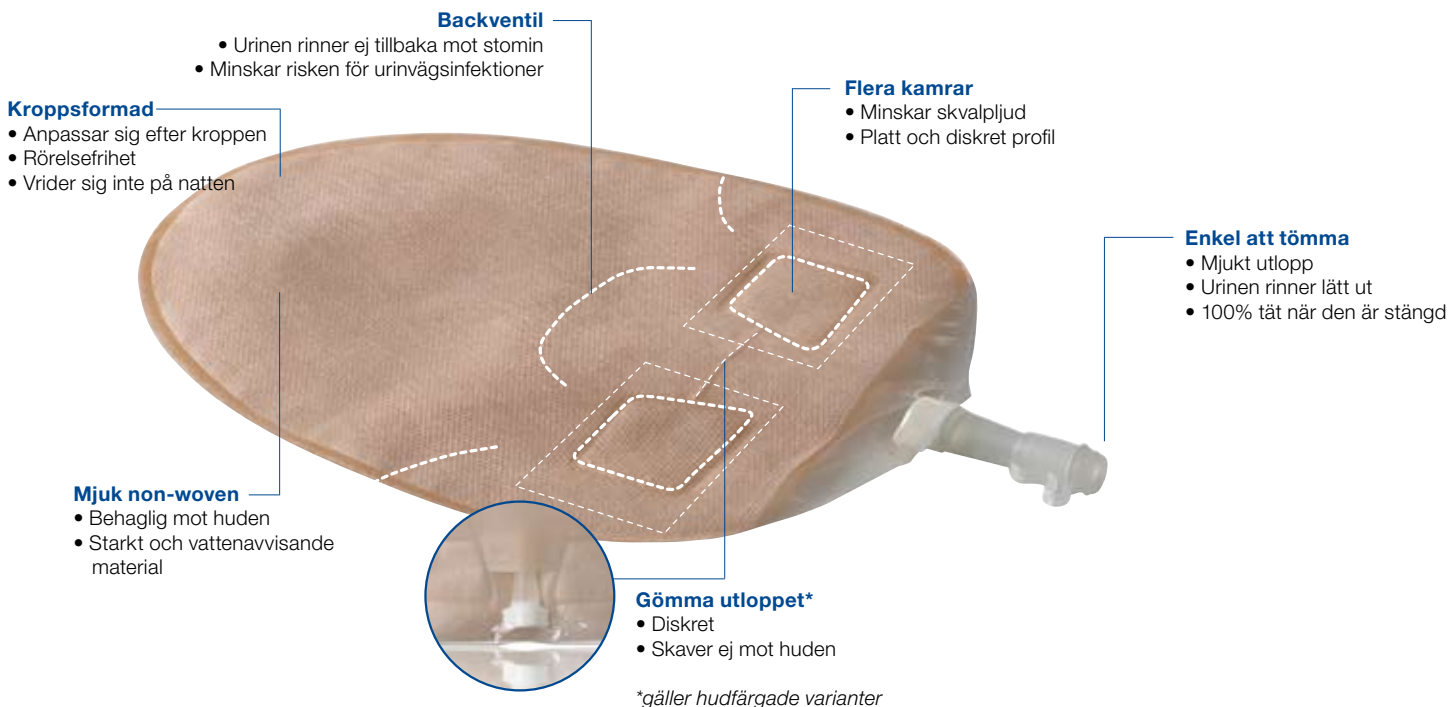

För support dag och natt



Coloplast Uro Minicap*

Denna påse har utvecklats för kortare stunder när du vill ha ett mer diskret bandage, t ex i simhallen, när du tränar eller i mer intima situationer.

Coloplast Uro Minicap används tillsammans med en **SenSura** Click basplatta. Den rymmer ca 100 ml urin och ger vanligtvis upp till en timmas säker och bekymmersfri användning.



Coloplast Uro Micropåse*

Denna påse ger förutsättningar för en behagligare nattvila.

Använd tillsammans med en **SenSura** Click basplatta kan den kopplas direkt till Coloplast Uro Nattpåse. Coloplast Uro Micropåse kan vridas till önskat läge för en behagligare sömn. Till skillnad från vanliga urostomipåsar vrider sig inte micropåsen, vilket gör att urinen kan flöda fritt ner i påsen utan stopp under natten.



Coloplast Uro Nattpåse*

Nattpåsen rymmer 2 liter och har en 120 cm lång slang, vilket ökar komforten och ger en bättre nattvila. Nattpåsen kopplas direkt till utloppet på Coloplast Uro Micropåse eller **SenSura** urostomipåse. Konnektorn är en fast del av slangen, vilket ger en säker koppling till utloppet på Micropåsen eller urostomipåsen. Anti-knick slangen säkerställer att urinen kan flöda fritt. Du kan själv klippa slangen till önskad längd.

* Gick tidigare under namnet Assura.



Coloplast AB
Box 10171
434 22 Kungsbacka
Växel 0300-332 50
Kundservice 0300-332 56
Fax: 0300-188 66
e-post: se@coloplast.com
www.coloplast.se