

Trygghet i alla situationer – SenSura

SenSura



1-dels urostomipåse



1. Optimalt hudskydd

Häftan i två lager håller plattan säkert på plats samtidigt som den skyddar huden.




2. Säker vidhäftning mot huden

Applicera häftan runt stomin. Tryck fast häftan genom att föra fingrarna nerifrån och upp.



3. Komfort och diskretion

Utloppet kan gömmas i fickan på framsidan för att göra påsen mer diskret och bekväm.

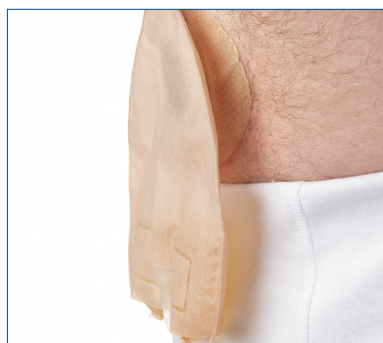

4. Diskret påse

Den unika flerkammar-påsen fördelar urinen jämnt vilket gör påsen platt och minskar skvalpljud.



5. Enkelt att tömma påsen

Håll utloppet uppåt, kläm ihop den yttersta delen av utloppet, dra ut tappen. Släpp greppet om utloppet och töm påsen.



6. Avlägsna påsen

Ta tag i det vita örat på häftan och dra försiktigt av häftan från huden. Håll huden sträckt med den andra handen medan du drar påsen nedåt.




7. Koppla ihop med nattpåsen

För större bekvämlighet på natten kan den speciellt designade nattpåsen kopplas direkt till utloppet på urostomipåsen.



Vår unika flerkammarpåse

SenSura urostomipåsar har en unik flerkammarpåse som har många fördelar. Kamrarna fördelar urinen jämnt i påsen, så att påsen varken syns eller hörs. Kamrarna hjälper påsen att forma sig efter kroppen så att du får bättre rörelsefrihet och hindrar också påsen från att vrida sig på natten. Finns också som klar, genomskinlig, påse.

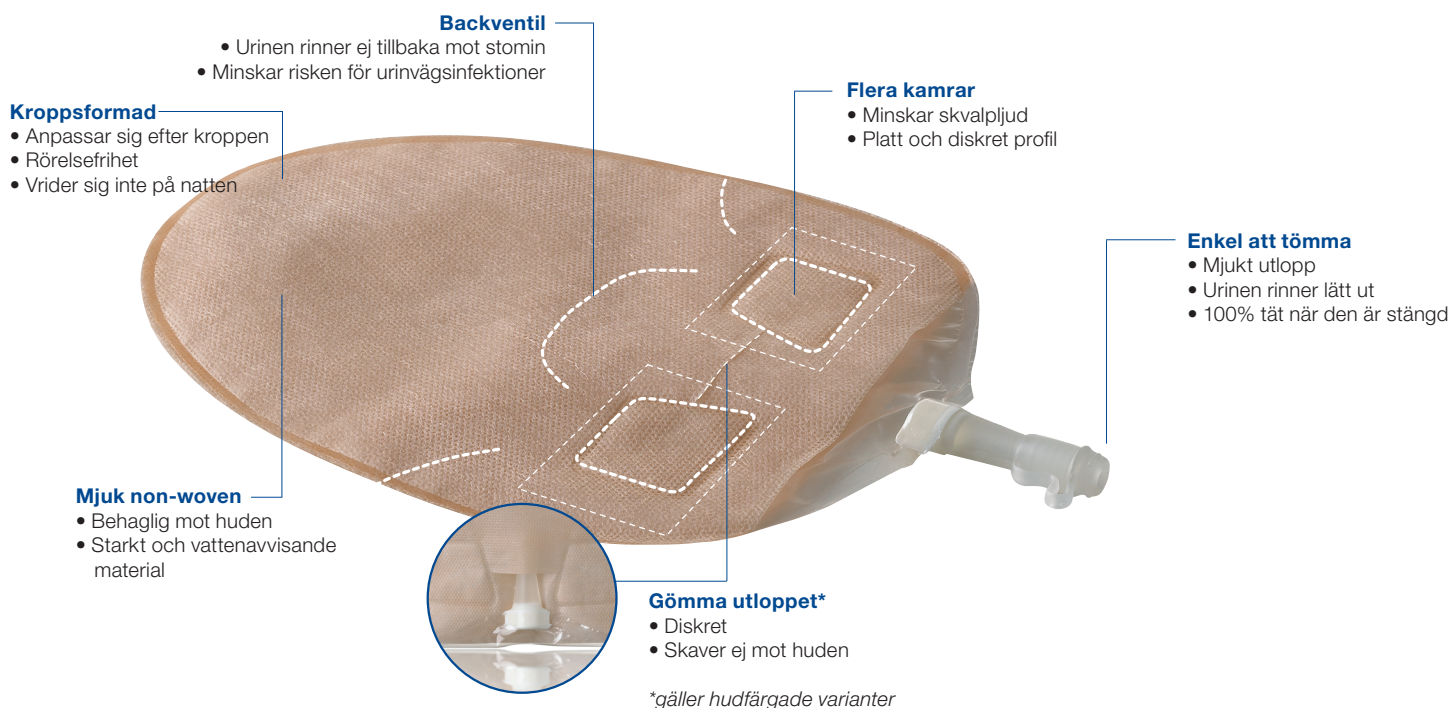

För support dag och natt



Coloplast Uro Nattpåse*

Nattpåsen rymmer 2 liter och har en 120 cm lång slang, vilket ökar komforten och ger en bättre nattvila. Nattpåsen kopplas direkt till utloppet på **SenSura** urostomipåse. Konnektorn är en fast del av slangen, vilket ger en säker koppling till utloppet på urostomipåsen. Anti-knick slangen säkerställer att urinen kan flöda fritt. Du kan själv klippa slangen till önskad längd.

** Gick tidigare under namnet Assura.*



Coloplast AB
Box 10171
434 22 Kungsbacka
Växel 0300-332 50
Kundservice 0300-332 56
Fax: 0300-188 66
e-post: se@coloplast.com
www.coloplast.se