

Elastisk
basplatta

Unikt
cirkelfilter

Hygieniskt
utlopp

Sensura[®]Mio

1-dels Convex sluten och tömbar påse

Det elastiska stomibandaget som följer kroppens former och rörelser



Framsida | Baksida



Cirkelfilter


Inspektionslucka

Kardborrepunkt #2

Kardborrepunkt #1

Kardborreflikar

Hide-away
utlopp

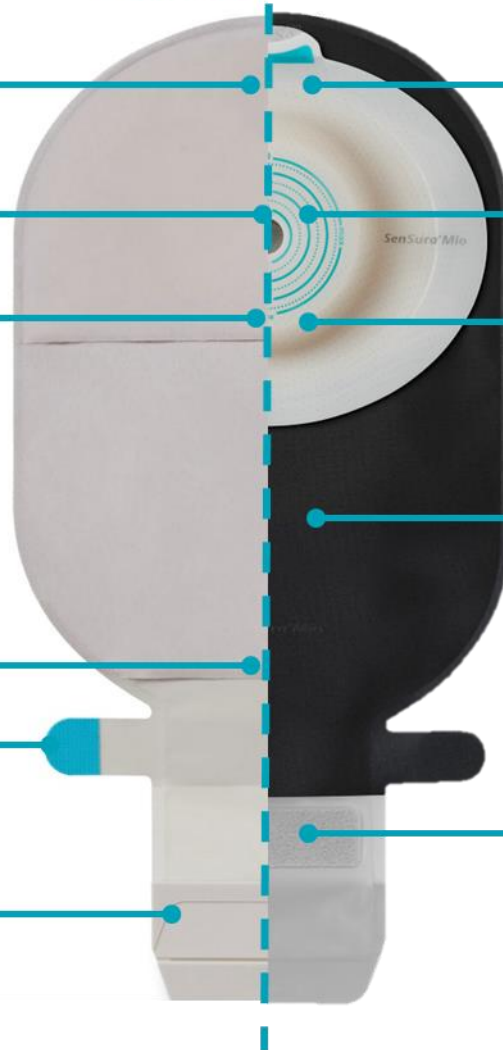

Skyddsfilm

Klippguide

Elastisk basplatta
(Hudskyddsplatta)

Mjuk textil som är
vattenavstötande.
Välj mellan svart och
neutralt grått tyg.

Kardborreplatta



Ostomy Care | Continence care | Wound and Skin Care | Interventional Urology | Voice and Regulatory Care

Coloplast AB, 0300-332 56, www.coloplast.se, mail@coloplast.com. Coloplast är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2024-03.
Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Danmark.



Produktinformation

Användning

Stomibandaget är avsett att fästas runt stomin och samla avföring. Basplattan är permanent fäst vid stomipåsen, ett så kallat 1-dels stomibandage. SenSura® Mio 1-dels Convex stomibandage är huvudsakligen framtagen för personer med inbuktad kroppsprofil och stomier som behöver stöd eller hjälp att skjutas fram. Den slutna påsen är främst avsedd för kolostomi med fastare avföring och den tömbara påsen för ileostomi med tunnare avföring.

Fördelar

- **Unik elastisk basplatta** – SenSura Mio basplattor är utformade med hjälp av den patenterade tekniken BodyFit Technology som är grunden till rätt passform för att förebygga läckage och hudproblem. SenSura Mios unika elastiska basplatta finns i tre olika sammansättningar beroende på vilket behov den ska uppfylla. Den elastiska basplattan följer kroppens form och rörelser och skapar en säker vidhäftning vid ärr, rynkor eller hudveck. Basplattan är dubbelt så töjbar¹ och ger en bättre passform än ett traditionellt stomibandage.
- **Basplatta som skyddar huden** – De hydrokolloida egenskaperna i basplattan absorberar fukt och skonar huden från uppluckring vilket bidrar till god hudhälsa. Basplattan går att avlägsna från huden på ett skonsamt sätt utan att irritera och skada huden. Basplattan har en sammansättning av ingredienser som bevarar hudens pH-balans.
- **Unikt cirkelfilter** – Det unika cirkelformade förfiltret minskar risken för att filtret täpps igen och tillåter ett jämnt flöde av tarmgaser att strömma igenom filtret. Det är kliniskt bevisat att cirkelfiltret minskar uppkomsten av luft i påsen (ballooning) med upp till 61%² och det tar 82%³ längre tid innan filtret mätts jämfört med ett traditionellt stomibandage. Detta hjälper användaren att sova bättre på natten. Det unika cirkelfiltret är utformat för att rena tarmgaser och neutralisera lukt. Filtret på slutna påse är optimerat för kolostomi med fastare avföring och filtret på tömbar påse är optimerat för ileostomi med lösare avföring.
- **Mjuk textil** – Den mjuka textilen, som är Oeko-Tex certifierad, är behaglig mot kroppen och har låg friktion mot kläderna. Textilen är trådtät vilket gör att man inte ser påsens innehåll till skillnad från tex non-woven påsar. Textilen är vattenavstötande och torkar snabbt efter dusch & bad.
- **Två färger för att erbjuda valmöjlighet** – Användare vill kunna välja mellan olika färger utifrån tex livsstil, aktivitet, färg på kläderna/underkläderna. Välj mellan neutralt grått och svart tyg. Den unika grå färgen är diskret och syns inte under kläderna – inte ens under vita. En svart påse är mer diskret till svarta kläder/underkläder och drar inte till sig lika mycket uppmärksamhet vid tillfällen där påsen är synlig, tex på stranden, vid träning eller vid intima stunder.
- **Inspektionslucka** – En inspektionslucka på framsidan av påsen gör appliceringen och kontrollen av stomin enklare.
- **Smidigt och hygieniskt hide-away utlopp på tömbar påse** – Enkelt att tömma påsen och rengöra utloppets mynning utan kladd. Utloppet stängs med ett integrerat kardborrelås som är tät efter stängning. Utloppet kan vikas in och gömmas på framsidan för diskretion eller ökad komfort. Välj mellan två lägen: Kardborrepunkt #1 eller #2 (påsen halveras).
- **Artikelnummer på påsen** – Artikelnumret är tryckt längst upp på påsen under tyget där det står "Cirkelfilter 500" vilket förenklar för patient och vårdpersonal.
- **Konvexitetssymbol på påsen** – Symbolen för Convex Soft, Convex Light och Convex Deep är tryckt längst upp på påsen där det står "Cirkelfilter 500" vilket förenklar för patient och vårdpersonal.
- **Bälte för bättre passform och säkerhet** – Använd Brava fyrpunktsbälte för att hålla den konvexa basplattan på plats för extra säkerhet. Bältet skapar ett jämt tryck på basplattan.
- **En Mio för alla patienter** – SenSura Mio har marknadens största sortiment av stomibandage med basplattor framtagna för platta, inbuktade eller utbuktade kroppsprofiler. Det finns stomibandage för alla åldrar från prematura bebisar (vecka 30) och små barn till vuxna. Det finns även ett brett utbud av högflödespåsar och postoperativa bandage.

SenSura Mio 1-dels

Basplattan är permanent fäst vid stomipåsen, ett så kallat 1-dels stomibandage.



SenSura Mio Convex - En unik kombination av flexibilitet och stabilitet

SenSura Mio Convex finns i tre varianter av konvexitet för att möta olika behov. De ger en avsevärt bättre passform och kliniska studier har visat på minskad förekomst av läckage jämfört med platta stomibandage.^{4,5}

SenSura Mio Convex Soft (6 mm)



För stomier med stomimynningen **över hudplanet**, som **behöver lite stöd** vid t ex rynkor eller veck i området runt stomin.

SenSura Mio Convex Light (6 mm)



För stomier med stomimynningen i **nivå med hudplanet**, som behöver **lätt hjälp** med att skjutas fram.

SenSura Mio Convex Deep (9 mm)



För stomier med stomimynningen **under hudplanet**, som behöver **mycket hjälp** med att skjutas fram.

Två unika egenskaper för SenSura Mio Convex som säkerställer en unik kombination av flexibilitet och stabilitet

BodyFit Technology är den patenterade tekniken bakom den unika elastiska häftan i SenSura Mio. Den följer kroppens rörelser samtidigt som den sitter säkert mot huden.

De integrerade flexlinjerna är utformade för att ge större flexibilitet utan att kompromissa med stabiliteten. Resultatet är en bekväm och säker passform. Flexlinjemönstret minskar tjockleken på materialet och säkerställer att basplattan böjer sig runt stomin utan att klämma ihop den.



SenSura Mio Convex Deep är dubbelt så flexibel som en traditionell Convex Light⁶

1. Coloplast, Laboratory Report, Stretchability of SenSura Mio (VV-0197750)

2. Global Claiming Document number PM-14891

3. Coloplast, Clinical Study, 2010 (VV-0009690)

4. Walker H, Hopkins G, Waller M, Storling Z. Raising the bar: New flexible convex stoma appliance - a randomized controlled trial. WCET. 2016;36(1):S6-S11.

5. Kruse, M. T et al, Considering the benefits of a new stoma appliance: a clinical trial, British Journal of Nursing, Nov 2015 (Stoma Supplement), Vol 24, No 22

6. Coloplast, Verification Report, Bendability of convex shells and baseplates, 2017.

Produktsortiment

SenSura® Mio 1-dels sluten Convex Soft

Neutralt grå

	Hålstorlek	Volym	Inspektions-lucka	Bältes-öron	Antal/fp	Antal/TFP	Artikelnr	Apoteks-varunnr
Midi	15–33 mm	390 ml	•	•	10	100	165010	737740
Maxi	10–50 mm	430 ml	•	•	10	100	165060	737741
	15–33 mm	430 ml	•	•	10	100	165050	737742
	25–33 mm	430 ml	•	•	10	100	165100	737743
	28–33 mm	430 ml	•	•	10	100	165110	737744
	31–50 mm	430 ml	•	•	10	100	165120	737745
	35–50 mm	430 ml	•	•	10	100	165130	737746



SenSura® Mio 1-dels sluten Convex Light

Neutralt grå

	Hålstorlek	Volym	Inspektions-lucka	Bältes-öron	Antal/fp	Antal/TFP	Artikelnr	Apoteks-varunnr
Midi	10–23 mm	390 ml	•	•	10	100	165210	737747
	15–33 mm	390 ml	•	•	10	100	165220	737748
	31–43 mm	390 ml	•	•	10	100	165230	737749
Maxi	10–23 mm	430 ml	•	•	10	100	165250	737750
	10–43 mm	430 ml	•	•	10	100	165320	738368
	15–33 mm	430 ml	•	•	10	100	165260	737751
	25–33 mm	430 ml	•	•	10	100	165300	737752
	28–33 mm	430 ml	•	•	10	100	165310	737753
	31–43 mm	430 ml	•	•	10	100	165270	737754
	35–43 mm	430 ml	•	•	10	100	165330	737755
	38–43 mm	430 ml	•	•	10	100	165340	737756



SenSura® Mio 1-dels sluten Convex Deep

Neutralt grå

	Hålstorlek	Volym	Inspektions-lucka	Bältes-öron	Antal/fp	Antal/TFP	Artikelnr	Apoteks-varunnr
Midi	10–23 mm	390 ml	•	•	10	100	165410	737757
	15–33 mm	390 ml	•	•	10	100	165420	737758
	31–43 mm	390 ml	•	•	10	100	165430	737759
Maxi	10–23 mm	430 ml	•	•	10	100	165450	737760
	10–43 mm	430 ml	•	•	10	100	165520	737761
	15–33 mm	430 ml	•	•	10	100	165460	738367
	25–33 mm	430 ml	•	•	10	100	165500	737762
	28–33 mm	430 ml	•	•	10	100	165510	737763
	31–43 mm	430 ml	•	•	10	100	165470	737764
	35–43 mm	430 ml	•	•	10	100	165530	737765
	38–43 mm	430 ml	•	•	10	100	165540	737766



SenSura® Mio 1-dels tömbar Convex Soft

Neutralt grå

	Hålstorlek	Volym	Inspektions-lucka	Bältes-öron	Antal/fp	Antal/TFP	Artikelnr	Apoteks-varunnr
Midi	15–33 mm	340 ml	•	•	10	100	166010	735607
Maxi	10–50 mm	490 ml	•	•	10	100	166060	735608
	15–33 mm	490 ml	•	•	10	100	166050	735609
	25–33 mm	490 ml	•	•	10	100	166100	735610
	28–33 mm	490 ml	•	•	10	100	166110	735611
	31–50 mm	490 ml	•	•	10	100	166120	735612
	35–50 mm	490 ml	•	•	10	100	166130	735613



SenSura® Mio 1-dels tömbar Convex Soft

Svart

	Hålstorlek	Volym	Inspektions-lucka	Bältes-öron	Antal/fp	Antal/TFP	Artikelnr	Apoteks-varunnr
Midi	15–33 mm	340 ml	•	•	10	100	189770	-
Maxi	10–50 mm	490 ml	•	•	10	100	189790	-
	15–33 mm	490 ml	•	•	10	100	189780	-
	25–33 mm	490 ml	•	•	10	100	189800	-
	28–33 mm	490 ml	•	•	10	100	189810	-
	31–50 mm	490 ml	•	•	10	100	189820	-
	35–50 mm	490 ml	•	•	10	100	189830	-



SenSura® Mio 1-dels tömbar Convex Light

Neutralt grå

	Hålstorlek	Volym	Inspektions-lucka	Bältes-öron	Antal/fp	Antal/TFP	Artikelnr	Apoteks-varunnr
Midi	10–23 mm	340 ml	•	•	10	100	166210	735614
	15–33 mm	340 ml	•	•	10	100	166220	735615
	31–43 mm	340 ml	•	•	10	100	166230	735616
Maxi	10–23 mm	490 ml	•	•	10	100	166250	735617
	10–43 mm	490 ml	•	•	10	100	166330	-
	15–33 mm	490 ml	•	•	10	100	166260	735618
	21–23 mm	490 ml	•	•	10	100	166300	735619
	25–33 mm	490 ml	•	•	10	100	166310	735620
	28–33 mm	490 ml	•	•	10	100	166320	735621
	31–43 mm	490 ml	•	•	10	100	166270	735622
	35–43 mm	490 ml	•	•	10	100	166340	735623



SenSura® Mio 1-dels tömbar Convex Light

Neutralt grå

	Hålstorlek	Volym	Inspektions-lucka	Bältes-öron	Antal/fp	Antal/TFP	Artikelnr	Apoteks-varunn
Midi	10-23 mm	340 ml	•	•	10	100	189600	-
	15-33 mm	340 ml	•	•	10	100	189610	-
Maxi	10-23 mm	490 ml	•	•	10	100	189620	-
	10-43 mm	490 ml	•	•	10	100	189680	-
	15-33 mm	490 ml	•	•	10	100	189630	-
	21-23 mm	490 ml	•	•	10	100	189650	-
	25-33 mm	490 ml	•	•	10	100	189660	-
	28-33 mm	490 ml	•	•	10	100	189670	-
	31-43 mm	490 ml	•	•	10	100	189640	-
	35-43 mm	490 ml	•	•	10	100	189690	-



SenSura® Mio 1-dels tömbar Convex Deep

Neutralt grå

	Hålstorlek	Volym	Inspektions-lucka	Bältes-öron	Antal/fp	Antal/TFP	Artikelnr	Apoteks-varunn
Midi	10-23 mm	340 ml	•	•	10	100	166410	735624
	15-33 mm	340 ml	•	•	10	100	166420	735625
	31-43 mm	340 ml	•	•	10	100	166430	735626
Maxi	10-23 mm	490 ml	•	•	10	100	166450	735627
	10-43 mm	490 ml	•	•	10	100	166540	-
	15-33 mm	490 ml	•	•	10	100	166460	735628
	21-23 mm	490 ml	•	•	10	100	166500	735629
	25-33 mm	490 ml	•	•	10	100	166510	735630
	28-33 mm	490 ml	•	•	10	100	166520	735631
	31-43 mm	490 ml	•	•	10	100	166470	735632
	35-43 mm	490 ml	•	•	10	100	166530	735633



SenSura® Mio 1-dels tömbar Convex Deep

Svart

	Hålstorlek	Volym	Inspektions-lucka	Bältes-öron	Antal/fp	Antal/TFP	Artikelnr	Apoteks-varunn
Midi	10-23 mm	340 ml	•	•	10	100	189400	-
	15-33 mm	340 ml	•	•	10	100	189410	-
Maxi	10-23 mm	490 ml	•	•	10	100	189420	-
	10-43 mm	490 ml	•	•	10	100	189490	-
	15-33 mm	490 ml	•	•	10	100	189430	-
	21-23 mm	490 ml	•	•	10	100	189450	-
	25-33 mm	490 ml	•	•	10	100	189460	-
	28-33 mm	490 ml	•	•	10	100	189470	-
	31-43 mm	490 ml	•	•	10	100	189440	-
	35-43 mm	490 ml	•	•	10	100	189480	-



Användarinstruktioner

För instruktioner hur SenSura Mio 1-dels Convex slutet och tömbar påse ska användas, se separat bruksanvisning på coloplast.se.

Bruksanvisning/IFU:



coloplast.to/bruksanvisningar

Instruktionsfilm:



coloplast.to/instruktionsfilmer/stomi/care

Förvaring

Produkterna ska förvaras i lådan tills de tas ur för användning, eftersom lådan skyddar produkterna och etiketten på lådan innehåller viktig information, som Lot-nummer, utgångsdatum och en unik streckkod.

Förvara produkten horisontellt.
Undvik direkt solljus.

Hållbarhet

Använd produkten före utgångsdatum angivet på förpackningen.

Sterilisering

Produkten är inte steriliserad

Coloplast Care

Alla som använder Coloplast stomiprodukter erbjuds att gå med i Coloplast Care, ett kostnadsfritt medlemsprogram, som ger tillgång till:

- Personlig rådgivning, stöd och produktvägledning via telefon eller hemsida
- Medlemstidningen Stomiliv som ges ut tre gånger per år
- Digitala verktyg, användarberättelser och nyhetsbrev som hjälper användaren att ta kontroll över sin livssituation

Anmälan till Coloplast Care görs via coloplast.se/coloplast-care, telefon 0300-332 56 eller via e-post se@coloplast.com.