

Elastisk
basplatta

Unikt
cirkelfilter

Mjukt
utlopp

SenSura[®] Mio

1-dels Höglödespåse

Stomibandage för postoperativt användande och för höga flöden



Baksida

Cirkelfilter



Inspektions-
lucka

Skåra för att
dölja utloppet

Mjukt utlopp

Skyddsfilm

Klippguide

Elastisk basplatta
(Hudskyddsplatta)

Mjuk textil som är
vattenavstötande.
Neutralt grått tyg



BodyFit
Technology[®]

Ostomy Care | Continence care | Wound and Skin Care | Interventional Urology | Voice and Regulatory Care

Coloplast AB, 0300-332 56, www.coloplast.se, mail@coloplast.com. Coloplast är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2024-03.
Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Danmark.

 **Coloplast**

Produktinformation

Användning

Stomibandaget är avsett att fästas runt stomin och samla avföring. Basplattan är permanent fäst vid stomipåsen, ett så kallat 1-dels stomibandage. SenSura® Mio 1-dels högflödespåse är huvudsakligen framtagen för postoperativt användande och för patienter med höga flöden. Välj mellan platt och konvex basplatta, beroende på om patientens stomi behöver hjälp med att skjutas fram.

Fördelar

- **Underlätta patientens övergång** - Patienterna kan använda en SenSura Mio produkt direkt efter sin operation, vilket gör att de inte behöver lära sig ett nytt stomibandage allt eftersom behoven förändras. SenSura Mio täcker patientens behov från dag ett på sjukhuset och hem.
- **Unik elastisk basplatta** – SenSura Mio basplattor är utformade med hjälp av den patenterade tekniken BodyFit Technology som är grunden till rätt passform för att förebygga läckage och hudproblem. SenSura Mios unika elastiska basplatta finns i tre olika sammansättningar beroende på vilket behov den ska uppfylla. Den elastiska basplattan följer kroppens form och rörelser och skapar en säker vidhäftning vid ärr, rynkor eller hudveck. Basplattan är dubbelt så töjbar¹ och ger en bättre passform än ett traditionellt stomibandage.
- **Basplatta som skyddar huden** – De hydrokolloida egenskaperna i basplattan absorberar fukt och skonar huden från uppluckring vilket bidrar till god hudhälsa. Basplattan går att avlägsna från huden på ett skonsamt sätt utan att irritera och skada huden. Basplattan har en sammansättning av ingredienser som bevarar hudens pH-balans.
- **Välj mellan olika basplattor** - Välj en platt eller konvex basplatta, beroende på om patientens stomi behöver hjälp med att skjutas fram. Platt basplatta finns upp till 100 mm för stora och/eller komplicerade stomier.
- **Unikt cirkelfilter** – Det unika cirkelformade förfiltret minskar risken för att filtret täpps igen och tillåter ett jämnt flöde av tarmgaser att strömma igenom filtret. Det är kliniskt bevisat att cirkelfiltret minskar uppkomsten av luft i påsen (ballooning) med upp till 61%² och det tar 82%³ längre tid innan filtret mätas jämfört med ett traditionellt stomibandage. Detta hjälper användaren att sova bättre på natten. Det unika cirkelfiltret är utformat för att rena tarmgaser och neutralisera lukt.
- **Mjuk textil** – Den mjuka textilen, som är Oeko-Tex certifierad, är behaglig mot kroppen och har låg friktion mot kläderna. Textilen är trådtät vilket gör att man inte ser påsens innehåll till skillnad från tex non-woven påsar. Textilen är vattenavstötande och torkar snabbt efter dusch & bad.
- **Neutralt grått tyg** – Den unika grå färgen är diskret och syns inte under kläderna – inte ens under vita.
- **Inspektionsslucka** – En inspektionsslucka på framsidan av påsen gör appliceringen och kontrollen av stomin enklare.
- **Mjukt utlopp** – Effektiv tömning tack vare det mjuka utloppet. Mindre innerlumen för lösare avföring. Utloppet kan vikas in och gömmas undan på framsidan för diskretion och ökad komfort.
- **Kan kopplas direkt till Coloplast Sängpåse** (artnr 140100) eller övriga säng/nattpåsar för minskat antal byten på natten
- **Artikelnummer på påsen** - Artikelnumret är tryckt längst på påsen vilket förenklar för patient och vårdpersonal.
- **Bälte för bättre passform och säkerhet** – Använd Brava fyrpunktsbälte för att hålla den konvexa basplattan på plats för extra säkerhet. Bältet skapar ett jämt tryck på basplattan.
- **En Mio för alla patienter** – SenSura Mio har marknadens största sortiment av stomibandage med basplattor framtagna för platta, inbuktade eller utbuktade kroppsprofiler. Det finns stomibandage för alla åldrar från prematura bebisar (vecka 30) och små barn till vuxna. Det finns även ett brett utbud av högflödespåsar och postoperativa bandage.

SenSura Mio 1-dels

Basplattan är permanent fäst vid stomipåsen, ett så kallat 1-dels stomibandage.



SenSura Mio Convex - En unik kombination av flexibilitet och stabilitet

SenSura Mio Convex för SenSura Mio 1-dels Högflödespåse finns i två varianter av konvexitet för att möta olika behov. De ger en avsevärt bättre passform och kliniska studier har visat på minskad förekomst av läckage jämfört med platta stomibandage.^{4,5}

SenSura Mio Convex Soft (6 mm)



För stomier med stomimynningen **över hudplanet**, som **behöver lite stöd** vid t ex rynkor eller veck i området runt stomin.

SenSura Mio Convex Light (6 mm)



För stomier med stomimynningen i **nivå med hudplanet**, som behöver **lätt hjälp** med att skjutas fram.

Två unika egenskaper för SenSura Mio Convex som säkerställer en unik kombination av flexibilitet och stabilitet

BodyFit Technology är den patenterade tekniken bakom den unika elastiska häftan i SenSura Mio. Den följer kroppens rörelser samtidigt som den sitter säkert mot huden.

De integrerade flexlinjerna är utformade för att ge större flexibilitet utan att kompromissa med stabiliteten. Resultatet är en bekväm och säker passform. Flexlinjemönstret minskar tjockleken på materialet och säkerställer att basplattan böjer sig runt stomin utan att klämma ihop den.



1. Coloplast, Laboratory Report, Stretchability of SenSura Mio (VV-0197750)

2. Global Claiming Document number PM-14891

3. Coloplast, Clinical Study, 2010 (VV-0009690)

4. Walker H, Hopkins G, Waller M, Storling Z. Raising the bar: New flexible convex stoma appliance - a randomized controlled trial. WCET. 2016;36(1):S6-S11.

5. Kruse, M. T et al, Considering the benefits of a new stoma appliance: a clinical trial, British Journal of Nursing, Nov 2015 (Stoma Supplement), Vol 24, No 22

Produktsortiment

SenSura® Mio 1-dels högflödespåse med mjukt utlopp

Neutralt grå

| Hålstorlek | Volym | Inspektions-lucka | Bältesöron | Antal/fp | Antal/TFP | Artikelnr | Apoteks-varunr |
|------------|--------|-------------------|------------|----------|-----------|-----------|----------------|
| 10-70 mm | 630 ml | • | | 30 | 120 | 186601 | 737375 |
| 10-100 mm | 725 ml | • | | 30 | 120 | 186611 | 737376 |



SenSura® Mio 1-dels Convex Soft högflödespåse med mjukt utlopp

Neutralt grå

| Hålstorlek | Volym | Inspektions-lucka | Bältesöron | Antal/fp | Antal/TFP | Artikelnr | Apoteks-varunr |
|------------|--------|-------------------|------------|----------|-----------|-----------|----------------|
| 10-50 mm | 630 ml | • | • | 10 | 90 | 186700 | 737377 |



SenSura® Mio 1-dels Convex Light högflödespåse med mjukt utlopp

Neutralt grå

| Hålstorlek | Volym | Inspektions-lucka | Bältesöron | Antal/fp | Antal/TFP | Artikelnr | Apoteks-varunr |
|------------|--------|-------------------|------------|----------|-----------|-----------|----------------|
| 10-43 mm | 630 ml | • | • | 10 | 90 | 186750 | 737378 |



Användarinstruktioner

För instruktioner hur SenSura Mio 1-dels Höglödespåse ska användas, se separat bruksanvisning på coloplast.se.

Bruksanvisning/IFU:



coloplast.to/bruksanvisningar

Förvaring

Produkterna ska förvaras i lådan tills de tas ur för användning, eftersom lådan skyddar produkterna och etiketten på lådan innehåller viktig information, som Lot-nummer, utgångsdatum och en unik streckkod.

Förvara produkten horisontellt.
Undvik direkt solljus.

Hållbarhet

Använd produkten före utgångsdatum angivet på förpackningen.

Sterilisering

Produkten är inte steriliserad

Coloplast Care

Alla som använder Coloplast stomiprodukter erbjuds att gå med i Coloplast Care, ett kostnadsfritt medlemsprogram, som ger tillgång till:

- Personlig rådgivning, stöd och produktvägledning via telefon eller hemsida
- Medlemstidningen Stomiliv som ges ut tre gånger per år
- Digitala verktyg, användarberättelser och nyhetsbrev som hjälper användaren att ta kontroll över sin livssituation

Anmälan till Coloplast Care görs via coloplast.se/coloplast-care, telefon 0300-332 56 eller via e-post se@coloplast.com.