

Elastisk
basplatta

Fler-
kammars
påse

Mjukt
utlopp


SenSura[®]Mio

2-dels Click Convex Flip Urostomipåse

Det elastiska stomibandaget som följer kroppens former och rörelser



Framsida | Baksida

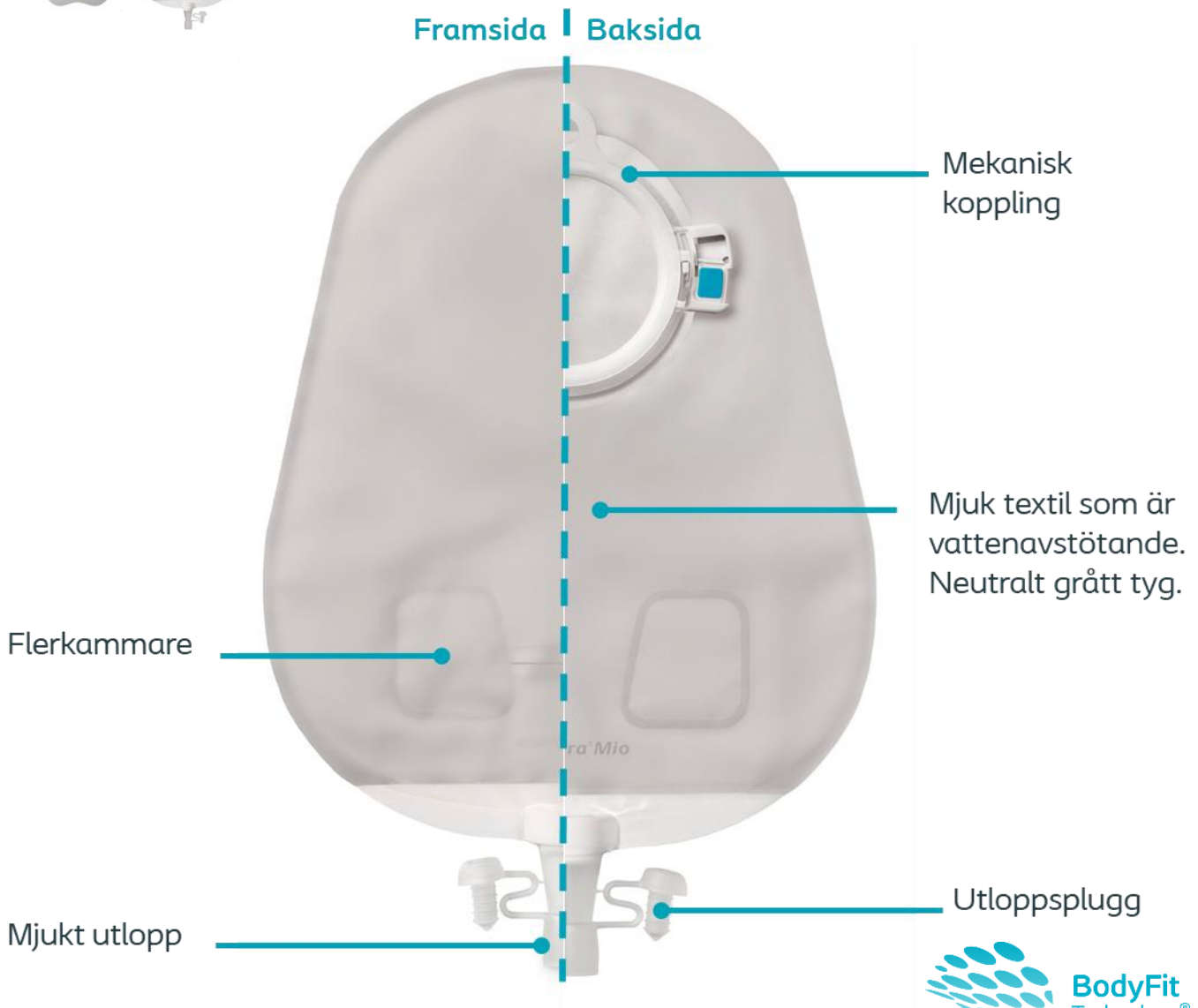

Ostomy Care | Continence care | Wound and Skin Care | Interventional Urology | Voice and Regulatory Care

Coloplast AB, 0300-332 56, www.coloplast.se, mail@coloplast.com. Coloplast är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2024-03.
Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Danmark.

 **Coloplast**

Produktinformation

Användning

Stomibandaget är avsett att fästas runt stomin och samla urin. Basplattan och påsen är två separata delar, ett så kallat 2-dels stomibandage. SenSura® Mio 2-dels Click Convex Flip urostomibandage är huvudsakligen framtagen för personer med utbuktad peristomal kroppsprofil.

Fördelar

- **Unik elastisk basplatta** – SenSura Mio basplattor är utformade med hjälp av den patenterade tekniken BodyFit Technology som är grunden till rätt passform för att förebygga läckage och hudproblem. SenSura Mios unika elastiska basplatta finns i tre olika sammansättningar beroende på vilket behov den ska uppfylla. Den elastiska basplattan följer kroppens form och rörelser och skapar en säker vidhäftning vid ärr, rynkor eller hudveck. Basplattan är dubbelt så töjbar¹ och ger en bättre passform än ett traditionellt stomibandage.
- **Basplatta som skyddar huden** – De hydrokolloida egenskaperna i basplattan absorberar fukt och skonar huden från uppluckring vilket bidrar till god hudhälsa. Basplattan går att avlägsna från huden på ett skonsamt sätt utan att irritera och skada huden. Basplattan har en sammansättning av ingredienser som bevarar hudens pH-balans.
- **Mjuk textil** – Den mjuka textilen, som är Oeko-Tex certifierad, är behaglig mot kroppen och har låg friktion mot kläderna. Textilen är trådtät vilket gör att man inte ser påsens innehåll till skillnad från tex non-woven påsar. Textilen är vattenavstötande och torkar snabbt efter dusch & bad.
- **Neutralt grått tyg** – Den unika grå färgen är diskret och syns inte under kläderna – inte ens under vita.
- **Backventil** – förhindrar urinen från att rinna tillbaka in mot stomin.
- **Mjukt utlopp** – utloppet är lätt att använda och kan gömmas undan när det inte används. Detta förhindrar att det skaver mot benet eller ljumsken, vilket ger bättre komfort och diskretion.
- **Utloppspluggen fjädrar tillbaka** efter öppning och är inte i vägen vid tömning.
- **Flerkammarpåse** – påsen är uppdelad i kammare som sprider urinen jämnt i påsen. Detta ger en platt, diskret profil och minskar skvalpande ljud.
- **Kan kopplas direkt till Coloplast Uro Sängpåse** (artnr 213650) – Utloppet på urostomipåsen kan kopplas direkt till sängpåsen utan att använda adaptor. Använd dock medföljande adaptor för att koppla ihop med urin-uppsamlingspåse från annan tillverkare.
- **Artikelnummer på påsen** - Artikelnumret är tryckt längst upp på påsen vilket förenklar för patient och vårdpersonal.
- **Bälte för bättre passform och säkerhet** – Använd Brava fyrpunktsbälte för att hålla den konkava basplattan på plats för extra säkerhet. Bältet skapar ett jämt tryck på basplattan.
- **En Mio för alla patienter** – SenSura Mio har marknadens största sortiment av stomibandage med basplattor framtagna för platta, inbuktade eller utbuktade kroppsprofiler. Det finns stomibandage för alla åldrar från prematura bebisar (vecka 30) och små barn till vuxna. Det finns även ett brett utbud av höglödespåsar och postoperativa bandage.

1. Coloplast, Laboratory Report, Stretchability of SenSura Mio (VV-0197750)

SenSura Mio 2-dels Click - mekanisk koppling

Basplattan och påsen är två separata delar, ett så kallat 2-dels stomibandage. SenSura Mio 2-dels Click är en mekanisk koppling med låsring som ger en ökad trygghet.


- ✓ **Ökad trygghet** - när påsen appliceras på basplattan och låses fast så hörs ett tydligt "klick" vilket ger en ökad känsla av trygghet hos stomipatienten.
- ✓ **Vridbar** - efter att påsen klickats fast kan man vrida påsen till önskad position utan att behöva ta bort påsen från basplattan.



SenSura Mio Convex Flip – en böjd, konkav basplatta för utbuktade områden

SenSura® Mio Convex Flip är det första stomibandaget på marknaden som är framtaget för utbuktningar och bråck. Är bevisat att ge bättre kontakt med huden och minska risken för läckage jämfört med platta basplattor.

Den unika kombinationen SenSura Mio Convex Flip och Brava Skyddande Tätningsring Convex ger tillsammans 99% kontakt med huden och skapar en tät och säker förslutning mellan basplattan och huden⁴.

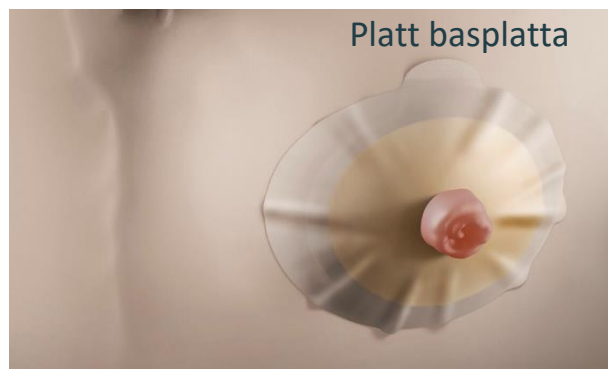

Stjärnformad basplatta som sitter säkert över utbuktade områden



Flikarna på den stjärnformade, konkava basplattan formar sig efter utbuktningen utan att det skapas veck, rynkor eller kanaler i basplattan.

Flexzoner för ökad komfort vid kroppsrörelser

Flexzonerna i basplattans yttre kanter är avfasade och följer kroppens rörelser. Flexzonerna i mitten av ringen ger flexibilitet närmast stomin.

Inbyggd stabilitetsring stabiliserar mittzonen

Den inbyggda ringen stabiliserar mittdelen av basplattan och ger stomin det stöd som behövs.

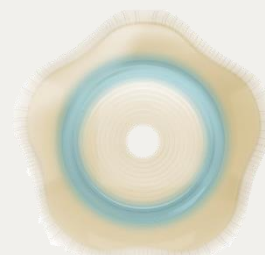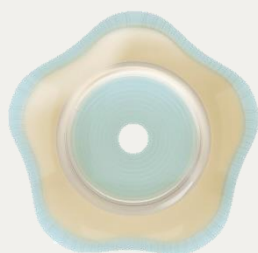

4. För användare med ett utbuktat peristomalt område samt för stomier i hudplanet eller indragna stomier.

Produktsortiment

SenSura® Mio 2-dels Click Convex Flip basplatta

Ringstorlek	Hålstorlek	Bältesöron	Antal/fp	Antal/tp	Artikelnr	Apoteksvarunr
40 mm	10–35 mm	•	5	100	185000	738260
40 mm	20–35 mm	•	5	100	185010	738261
50 mm	10–45 mm	•	5	100	185100	738262
50 mm	25–45 mm	•	5	100	185110	738263
50 mm	30–45 mm	•	5	100	185120	738264
50 mm	35–45 mm	•	5	100	185130	738265
60 mm	10–55 mm	•	5	120	185200	738266
60 mm	30–55 mm	•	5	120	185210	738267
60 mm	35–55 mm	•	5	120	185220	738268
60 mm	40–55 mm	•	5	120	185230	738269
60 mm	45–55 mm	•	5	120	185240	738270



SenSura® Mio 2-dels Click Uro

Neutralt grå

	Ringstorlek	Volym	Antal/fp	Antal/tp	Artikelnr	Apoteksvarunr
Midi	50 mm	380 ml	30	240	114960	734542
Maxi	40 mm	550 ml	30	240	114910	734540
	50 mm	480 ml	30	240	114970	734543
	60 mm	480 ml	30	240	114990	738072



Klar

	Ringstorlek	Volym	Antal/fp	Antal/tp	Artikelnr	Apoteksvarunr
Maxi	40 mm	550 ml	30	240	114920	734541
	50 mm	480 ml	30	240	114980	734544

Användarinstruktioner

För instruktioner hur SenSura Mio 2-dels Click Convex Flip urostomipåse ska användas, se separat bruksanvisning på coloplast.se.

Bruksanvisning/IFU:



coloplast.to/bruksanvisningar

Instruktionsfilm:



coloplast.to/instruktionsfilmer/stomi/care

Förvaring

Produkterna ska förvaras i lådan tills de tas ur för användning, eftersom lådan skyddar produkterna och etiketten på lådan innehåller viktig information, som Lot-nummer, utgångsdatum och en unik streckkod.

Förvara produkten horisontellt.
Undvik direkt solljus.

Hållbarhet

Använd produkten före utgångsdatum angivet på förpackningen.

Sterilisering

Produkten är inte steriliserad

Coloplast Care

Alla som använder Coloplast stomiprodukter erbjuds att gå med i Coloplast Care, ett kostnadsfritt medlemsprogram, som ger tillgång till:

- Personlig rådgivning, stöd och produktvägledning via telefon eller hemsida
- Medlemstidningen Stomiliv som ges ut tre gånger per år
- Digitala verktyg, användarberättelser och nyhetsbrev som hjälper användaren att ta kontroll över sin livssituation

Anmälan till Coloplast Care görs via coloplast.se/coloplast-care, telefon 0300-332 56 eller via e-post se@coloplast.com.