

Elastisk  
basplatta

Unikt  
cirkelfilter

Två olika  
utlopp

**SenSura<sup>®</sup> Mio**

## 2-dels Höglödespåse

Stomibandage för postoperativt användande och för höga flöden



**Baksida**

Cirkelfilter



Inspektions-  
lucka

Skåra för att  
dölja utloppet

Välj mellan  
mjukt och  
original utlopp

Välj mellan  
mekanisk koppling  
eller häftkoppling

Mjuk textil som är  
vattenavstötande.  
Neutralt grått tyg



**BodyFit**  
Technology<sup>®</sup>

Ostomy Care | Continence care | Wound and Skin Care | Interventional Urology | Voice and Regulatory Care

Coloplast AB, 0300-332 56, [www.coloplast.se](http://www.coloplast.se), [mail@coloplast.com](mailto:mail@coloplast.com). Coloplast är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2024-03.  
Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Danmark.

 **Coloplast**

# Produktinformation

## Användning

Stomibandaget är avsett att fästas runt stomin och samla avföring. Basplattan och påsen är två separata delar, ett så kallat 2-dels stomibandage. SenSura® Mio 2-dels högflödespåse är huvudsakligen framtagen för postoperativt användande och för patienter med höga flöden. Välj mellan Click- och Flexkoppling samt en platt, konvex eller konkav (Convex Flip) basplatta.

## Fördelar

- **Underlätta patientens övergång** - Patienterna kan använda en SenSura Mio produkt direkt efter sin operation, vilket gör att de inte behöver lära sig ett nytt stomibandage allt eftersom behoven förändras. SenSura Mio täcker patientens behov från dag ett på sjukhuset och hem.
- **Unik elastisk basplatta** – SenSura Mio basplattor är utformade med hjälp av den patenterade tekniken BodyFit Technology som är grunden till rätt passform för att förebygga läckage och hudproblem. SenSura Mios unika elastiska basplatta finns i tre olika sammansättningar beroende på vilket behov den ska uppfylla. Den elastiska basplattan följer kroppens form och rörelser och skapar en säker vidhäftning vid ärr, rynkor eller hudveck. Basplattan är dubbelt så töjbar<sup>1</sup> och ger en bättre passform än ett traditionellt stomibandage.
- **Basplatta som skyddar huden** – De hydrokolloida egenskaperna i basplattan absorberar fukt och skonar huden från uppluckring vilket bidrar till god hudhälsa. Basplattan går att avlägsna från huden på ett skonsamt sätt utan att irritera och skada huden. Basplattan har en sammansättning av ingredienser som bevarar hudens pH-balans.
- **Välj mellan olika basplattor** - Välj en platt, konkav eller konvex basplatta, beroende på om patientens stomi behöver hjälp med att skjutas fram.
- **Unikt cirkelfilter** – Det unika cirkelformade förfiltret minskar risken för att filtret täpps igen och tillåter ett jämnt flöde av tarmgaser att strömma igenom filtret. Det är kliniskt bevisat att cirkelfiltret minskar uppkomsten av luft i påsen (ballooning) med upp till 61%<sup>2</sup> och det tar 82%<sup>3</sup> längre tid innan filtret mättas jämfört med ett traditionellt stomibandage. Detta hjälper användaren att sova bättre på natten. Det unika cirkelfiltret är utformat för att rena tarmgaser och neutralisera lukt
- **Mjuk textil** – Den mjuka textilen, som är Oeko-Tex certifierad, är behaglig mot kroppen och har låg friktion mot kläderna. Textilen är trådtät vilket gör att man inte ser påsens innehåll till skillnad från tex non-woven påsar. Textilen är vattenavstötande och torkar snabbt efter dusch & bad.
- **Neutralt grått tyg** – Den unika grå färgen är diskret och syns inte under kläderna – inte ens under vita.
- **Olika typer av påse** – Gradering på transparenta påsar för tydlig indikering av mängden avföring. Minipåse för diskretion i övergången till hemmet.
- **Inspektionslucka** – En inspektionslucka på framsidan av påsen gör appliceringen och kontrollen av stomin enklare.
- **Två olika utlopp** – Välj mellan *mjukt utlopp* med mindre innerlumen för lösare avföring och *original utlopp* med större innerlumen för tjockare flöden. Effektiv tömning via utloppet. Utloppet kan vikas in och gömmas undan på framsidan för diskretion och ökad komfort.
- **Kan kopplas direkt till Coloplast Sängpåse** (artnr 140100) eller övriga säng/nattpåsar för minskat antal byten på natten
- **Artikelnummer på påsen** - Artikelnumret är tryckt längst på påsen vilket förenklar för patient och vårdpersonal.
- **Bälte för bättre passform och säkerhet** – Använd Brava fyrpunktsbälte för att hålla den konvexa basplattan på plats för extra säkerhet. Bältet skapar ett jämt tryck på basplattan.
- **En Mio för alla patienter** – SenSura Mio har marknadens största sortiment av stomibandage med basplattor framtagna för platta, inbuktade eller utbuktade kroppsprofiler. Det finns stomibandage för alla åldrar från prematura bebisar (vecka 30) och små barn till vuxna. Det finns även ett brett utbud av högflödespåsar och postoperativa bandage.

## SenSura Mio 2-dels Click - mekanisk koppling

Basplattan och påsen är två separata delar, ett så kallat 2-dels stomibandage. SenSura Mio 2-dels Click är en mekanisk koppling med låsring som ger en ökad trygghet.


- ✓ **Ökad trygghet** - när påsen appliceras på basplattan och låses fast så hörs ett tydligt "klick" vilket ger en ökad känsla av trygghet hos stomipatienten.
- ✓ **Vridbar** - efter att påsen klickats fast kan man vrida påsen till önskad position utan att behöva ta bort påsen från basplattan.



## SenSura Mio 2-dels Flex - häftkoppling

Basplattan och påsen är två separata delar, ett så kallat 2-dels stomibandage. SenSura Mio 2-dels Flex är en häftkoppling som är bekväm att använda och följer kroppens rörelser.

- ✓ **Lätt att applicera** - Häftkoppling appliceras med ett lätt tryck mot magen. Perfekt för nyopererade patienter, på känsliga områden och på mjuka magar. Även om påsen går att lossa från plattan och fästa igen är vidhäftningen stark och sitter säkert. Häftkopplingen är bred för att underlätta placeringen och den turkosa markeringen på häftan vägleder vid applikation.
- ✓ **Diskret** - Kopplingens låga profil gör att den är nästan lika platt som ett 1-delsbandage och syns mindre under kläderna
- ✓ SenSura® Mio Flex och SenSura® Flex är kompatibla

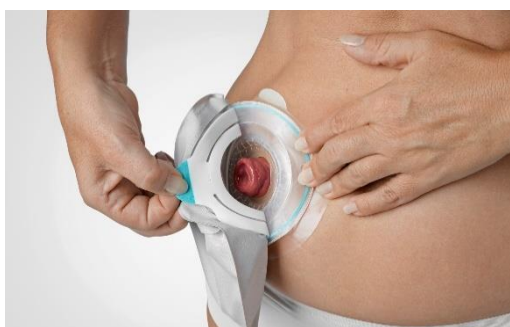

1. Coloplast, Laboratory Report, Stretchability of SenSura Mio (VV-0197750)

2. Global Claiming Document number PM-14891

3. Coloplast, Clinical Study, 2010 (VV-009690)

## Produktsortiment

### SenSura® Mio 2-dels Click högflödespåse med original utlopp

#### Neutralt grå

Ringstorlek	Volym	Inspektionslucka	Antal/fp	Antal/TFP	Artikelnr	Apoteksvarunr
40 mm	1160 ml	•	10	120	186000	737360
50 mm	1120 ml	•	10	120	186010	737361
60 mm	1080 ml	•	10	120	186020	737362
70 mm	1040 ml	•	10	120	186030	737363



### SenSura® Mio 2-dels Click högflödespåse Mini med original utlopp

#### Neutralt grå

Ringstorlek	Volym	Inspektionslucka	Antal/fp	Antal/TFP	Artikelnr	Apoteksvarunr
40 mm	650 ml	•	10	120	186200	737364
50 mm	581 ml	•	10	120	186210	737365
60 mm	546 ml	•	10	120	186220	737366



### SenSura® Mio 2-dels Click högflödespåse med mjukt utlopp

#### Neutralt grå

Ringstorlek	Volym	Inspektionslucka	Antal/fp	Antal/TFP	Artikelnr	Apoteksvarunr
50 mm	1120 ml	•	10	120	186300	737367
60 mm	1080 ml	•	10	120	186310	737368
70 mm	1040 ml	•	10	120	186320	737369



#### Klar, med gradering

Ringstorlek	Volym	Inspektionslucka	Antal/fp	Antal/TFP	Artikelnr	Apoteksvarunr
50 mm	1120 ml		10	120	186400	737370
60 mm	1080 ml		10	120	186410	737371
70 mm	1040 ml		10	120	186420	737372

### SenSura® Mio 2-dels Flex högflödespåse med mjukt utlopp

#### Neutralt grå

Kragstorlek	Volym	Inspektionslucka	Antal/fp	Antal/TFP	Artikelnr	Apoteksvarunr
50 mm	980 ml	•	10	120	186500	737373
70 mm	906 ml	•	10	120	186510	737374



## Användarinstruktioner

För instruktioner hur SenSura Mio 2-dels Högflödespåse ska användas, se separat bruksanvisning på [coloplast.se](https://coloplast.se).

Bruksanvisning/IFU:



[coloplast.to/bruksanvisningar](https://coloplast.to/bruksanvisningar)

## Förvaring

Produkterna ska förvaras i lådan tills de tas ur för användning, eftersom lådan skyddar produkterna och etiketten på lådan innehåller viktig information, som Lot-nummer, utgångsdatum och en unik streckkod.

Förvara produkten horisontellt.  
Undvik direkt solljus.

## Hållbarhet

Använd produkten före utgångsdatum angivet på förpackningen.

## Sterilisering

Produkten är inte steriliserad

## Coloplast Care

### Helhetserbjudande med SenSura Mio & Brava

Alla som använder Coloplast stomiprodukter erbjuds att gå med i Coloplast Care, ett kostnadsfritt medlemsprogram, som ger tillgång till:

- Personlig rådgivning, stöd och produktvägledning via telefon eller hemsida
- Medlemstidningen Stomiliv som ges ut tre gånger per år
- Digitala verktyg, användarberättelser och nyhetsbrev som hjälper användaren att ta kontroll över sin livssituation

Anmälan till Coloplast Care görs via [coloplast.se/coloplast-care](https://coloplast.se/coloplast-care), telefon 0300-332 56 eller via e-post [se@coloplast.com](mailto:se@coloplast.com).