


Elastisk
basplatta

Unikt
cirkelfilter

Hygieniskt
utlopp

SenSura[®] Mio Kids stomibandage

För barn – så barn kan röra sig som barn

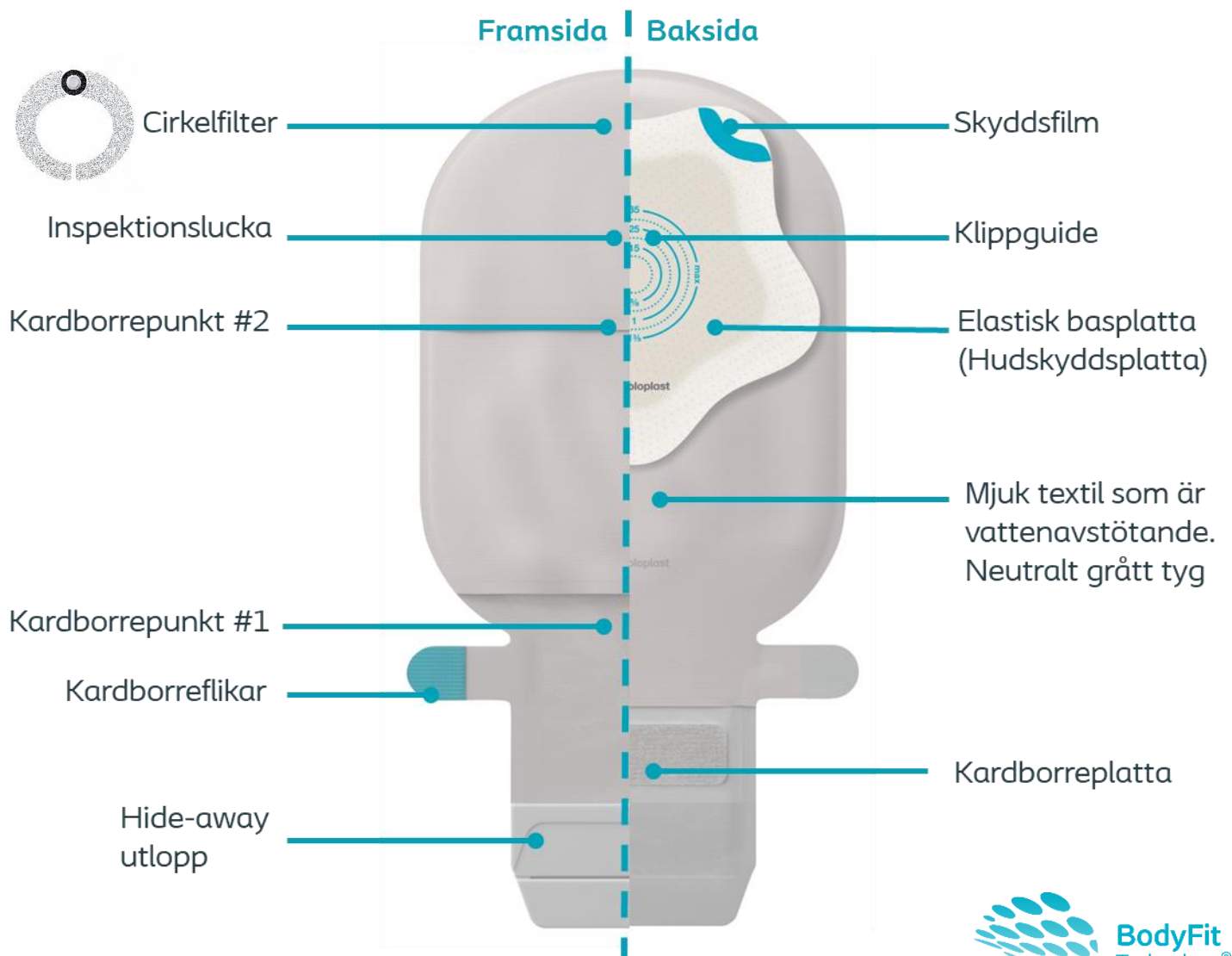

Ostomy Care | Continence care | Wound and Skin Care | Interventional Urology | Voice and Regulatory Care

Coloplast AB, 0300-332 56, www.coloplast.se, mail@coloplast.com. Coloplast är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2024-03.
Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Danmark.

 **Coloplast**

Produktinformation

Användning

Stomibandaget är avsett att fästas runt stomin och samla avföring eller urin. SenSura® Mio 2-Kids stomibandage är specifikt framtaget för barn. Produkten kan användas för barn mellan 6 månader och 4 år och ger barnen möjlighet att röra sig som de vill. möjligheten att röra sig som detidigt födda spädbarn från och med 30:e graviditetsveckan och upp till 6 månaders ålder. SenSura Mio Kids finns som i både 1-dels och 2-delbandage i tömbar påse samt urostomipåse,

Fördelar

- **Unik elastisk basplatta** – SenSura Mio basplattor är utformade med hjälp av den patenterade tekniken BodyFit Technology som är grunden till rätt passform för att förebygga läckage och hudproblem. SenSura Mios unika elastiska basplatta finns i tre olika sammansättningar beroende på vilket behov den ska uppfylla. Den elastiska basplattan följer kroppens form och rörelser och skapar en säker vidhäftning vid ärr, rynkor eller hudveck. Basplattan är dubbelt så töjbar¹ och ger en bättre passform än ett traditionellt stomibandage.
- **Basplatta som skyddar huden** – De hydrokolloida egenskaperna i basplattan absorberar fukt och skonar huden från uppluckring vilket bidrar till god hudhälsa. Basplattan går att avlägsna från huden på ett skonsamt sätt utan att irritera och skada huden. Basplattan har en sammansättning av ingredienser som bevarar hudens pH-balans.
- **Mjuk textil** – Den mjuka textilen, som är Oeko-Tex certifierad, är behaglig mot kroppen och har låg friktion mot kläderna. Textilen är trådtät vilket gör att man inte ser påsens innehåll till skillnad från tex non-woven påsar. Textilen är vattenavstötande och torkar snabbt efter dusch & bad.
- **Neutralt grått tyg** – Den unika grå färgen är diskret och syns inte under kläderna – inte ens under vita.
- **Unikt cirkelfilter på tömbar påse** – Det unika cirkelformade förfiltret minskar risken för att filtret täpps igen och tillåter ett jämnt flöde av tarmgaser att strömma igenom filtret. Det är kliniskt bevisat att cirkelfiltret minskar uppkomsten av luft i påsen (ballooning) med upp till 61%² och det tar 82%³ längre tid innan filtret mätas jämfört med ett traditionellt stomibandage. Detta hjälper användaren att sova bättre på natten. Det unika cirkelfiltret är utformat för att rena tarmgaser och neutralisera lukt.
- **Inspektionslucka på tömbar påse** – En inspektionslucka på framsidan av påsen gör appliceringen och kontrollen av stomin enklare.
- **Smidigt och hygieniskt hide-away utlopp på tömbar påse** – Enkelt att tömma påsen och rengöra utloppets mynning utan kladd. Utloppet stängs med ett integrerat kardborrelås som är tät efter stängning. Utloppet kan vikas in och gömmas på framsidan för diskretion eller ökad komfort. Välj mellan två lägen: Kardborrepunkt #1 eller #2 (påsen halveras).
- **Artikelnummer på påsen** – Artikelnumret är tryckt på påsen vilket förenklar för patient och vårdpersonal.
- **En Mio för alla patienter** – SenSura Mio har marknadens största sortiment av stomibandage med basplattor framtagna för platta, inbuktade eller utbuktade kroppsprofiler. Det finns stomibandage för alla åldrar från prematura bebisar (vecka 30) och små barn till vuxna. Det finns även ett brett utbud av höglödespåsar och postoperativa bandage.

1. Coloplast, Laboratory Report, Stretchability of SenSura Mio (VV-0197750)

2. Global Claiming Document number PM-14891

3. Coloplast, Clinical Study, 2010 (VV-0009690)

SenSura Mio 1-dels

Basplattan är permanent fäst vid stomipåsen, ett så kallat 1-dels stomibandage.



SenSura Mio 2-dels Flex - häftkoppling

Basplattan och påsen är två separata delar, ett så kallat 2-dels stomibandage. SenSura Mio 2-dels Flex är en häftkoppling som är bekväm att använda och följer kroppens rörelser.

- ✓ **Lätt att applicera** - Häftkoppling appliceras med ett lätt tryck mot magen. Perfekt för nyopererade patienter, på känsliga områden och på mjuka magar. Även om påsen går att lossa från plattan och fästa igen är vidhäftningen stark och sitter säkert. Häftkopplingen är bred för att underlätta placeringen och den turkosa markeringen på häftan vägleder vid applikation.
- ✓ **Diskret** - Kopplingens låga profil gör att den är nästan lika platt som ett 1-delsbandage och syns mindre under kläderna



SenSura Mio Kids – en böjd, konkav basplatta för små runda magar

Aktiva barn har flera unika utmaningar när det gäller tillpassningar. De behöver ett stomibandage som omfamnar deras små, runda magar och samtidigt låter dem röra sig och leka.


Stjärnformad basplatta som sitter säkert över barnmagen

Flikarna på den stjärnformade, konkava basplattan formar sig efter barnens runda mage utan att det skapas veck, rynkor eller kanaler i basplattan.



Flexzoner för maximal rörelsefrihet

Flexzonerna i basplattans yttre kanter är avfasade och följer kroppens rörelser. Flexzonerna i mitten av ringen ger flexibilitet närmast stomin.

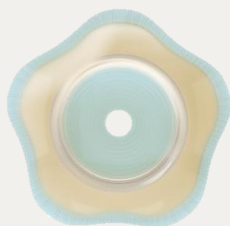

Produktsortiment

SenSura® Mio Kids 1-dels tömbar

Neutralt grå

	Hålstorlek	Volym	Inspektionslucka	Antal/fp	Antal/TFP	Artikelnr	Apoteksvarunr
Midi	0-35 mm	180 ml	•	30	120	187101	739162

Klar

	Hålstorlek	Volym	Inspektionslucka	Antal/fp	Antal/TFP	Artikelnr	Apoteksvarunr
Midi	0-35 mm	180 ml		30	120	187111	739163



SenSura® Mio Kids 1-dels Uro

Neutralt grå

	Hålstorlek	Volym	Antal/fp	Antal/TFP	Artikelnr	Apoteksvarunr
	10-35 mm	200 ml	30	120	187131	739165

Klar

	Hålstorlek	Volym	Antal/fp	Antal/TFP	Artikelnr	Apoteksvarunr
	10-35 mm	200 ml	30	120	187121	739164



SenSura® Mio Kids 2-dels Flex basplatta

Kragstorlek	Hålstorlek	Antal/fp	Antal/TFP	Artikelnr	Apoteksvarunnr
27 mm	0–27 mm	10	320	187351	739174
35 mm	0–35 mm	10	320	187471	739175



SenSura® Mio Kids 2-dels Flex tömbar

Neutralt grå

	Kragstorlek	Volym	Inspektionslucka	Antal/fp	Antal/TFP	Artikelnr	Apoteksvarunnr
Mini	27 mm	85 ml	•	30	120	187201	739166
Midi	27 mm	200 ml	•	30	120	187221	739168
	35 mm	200 ml	•	30	120	187241	739170



Klar

	Kragstorlek	Volym	Inspektionslucka	Antal/fp	Antal/TFP	Artikelnr	Apoteksvarunnr
Mini	27 mm	85 ml		30	120	187211	739167
Midi	27 mm	200 ml		30	120	187231	739169
	35 mm	200 ml		30	120	187251	739171

SenSura® Mio Kids 2-dels Flex Uro

Neutralt grå

Kragstorlek	Volym	Antal/fp	Antal/TFP	Artikelnr	Apoteksvarunnr
27 mm	200 ml	30	120	187301	739172
35 mm	200 ml	30	120	187311	739173



Användarinstruktioner

För instruktioner hur SenSura Mio Kids stomibandage ska användas, se separat bruksanvisning på coloplast.se.

Bruksanvisning/IFU:



coloplast.to/bruksanvisningar

Förvaring

Produkterna ska förvaras i lådan tills de tas ur för användning, eftersom lådan skyddar produkterna och etiketten på lådan innehåller viktig information, som Lot-nummer, utgångsdatum och en unik streckkod.

Förvara produkten horisontellt.
Undvik direkt solljus.

Hållbarhet

Använd produkten före utgångsdatum angivet på förpackningen.

Sterilisering

Produkten är inte steriliserad

Coloplast Care

Helhetserbjudande med SenSura Mio & Brava

Alla som använder Coloplast stomiprodukter erbjuds att gå med i Coloplast Care, ett kostnadsfritt medlemsprogram, som ger tillgång till:

- Personlig rådgivning, stöd och produktvägledning via telefon eller hemsida
- Medlemstidningen Stomiliv som ges ut tre gånger per år
- Digitala verktyg, användarberättelser och nyhetsbrev som hjälper användaren att ta kontroll över sin livssituation

Anmälan till Coloplast Care görs via coloplast.se/coloplast-care, telefon 0300-332 56 eller via e-post se@coloplast.com.