

Unik
2-lagers
häfta

Dubbla
förfilter

Hygieniskt
utlopp

SenSura®

2-dels Click Platt sluten och tömbar påse

Unik 2-lagershäfta för dubbelt skydd



Baksida

Dubbla förfilter



Mekanisk koppling

Kardborrepunkt #2

Vattenavvisande
non-woven material

Kardborrepunkt #1

Kardborreflikar

Kardborreplatta

Hide-away utlopp

Ostomy Care | Continence care | Wound and Skin Care | Interventional Urology | Voice and Regulatory Care

Coloplast AB, 0300-332 56, www.coloplast.se, mail@coloplast.com. Coloplast är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2024-03.
Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Danmark.

 **Coloplast**

Produktinformation

Användning

Stomibandaget är avsett att fästas runt stomin och samla avföring. Basplattan och påsen är två separata delar, ett så kallat 2-dels stomibandage. SenSura® 2-dels Click Platt stomibandage är huvudsakligen framtagen för personer med platt peristomal kroppsprofil. Den slutna påsen är främst avsedd för kolostomi med fastare avföring och den tömbara påsen för ileostomi med tunnare avföring.

Fördelar

- **Unik 2-lagershäfta för dubbelt skydd** – Basplattan är utformad för att fästa säkert och sitta tätt mot kroppen. Den skyddar huden och följer kroppens rörelser utan att lossna. Basplattan består av två lager och denna teknik är unik för Coloplast. (1) Hudvårdande lager som skyddar huden från fukt, absorberar överflödigt fukt och håller huden torr. (2) Skyddande lager som skapar en säker förslutning mellan basplattan och stomin samt skyddar huden från avföring.
- **Basplattan som skyddar huden** – De hydrokolloida egenskaperna i basplattan absorberar fukt och skonar huden från uppluckring och bidrar därmed till god hudhälsa. Häftan innehåller pektin, vilket hjälper till att bibehålla hudens normala pH-nivå. SenSura basplatta gör inte ont att ta bort, lämnar minimala rester på huden och minimerar mekaniskt trauma.
- **SenSura Xpro för aggressiva flöden** – Basplattan är uppbyggd i två lager precis som SenSura standard basplatta men har en annan sammansättning för att ge bättre skydd mot aggressiva flöden, t ex urostomier och ileostomier. SenSura Xpro är mer motståndskraftig och ger en starkare vidhäftning mot huden. Potatismjöl i basplattan bildar en geléliknande konsistens som sväller och sluter tätt mot stomin.
- **Förstansade kanaler** i basplattan för bättre passform och följsamhet.
- **Dubbla förfilter** – SenSura filter neutraliserar lukt och ser till att gaser passerar ut så att inte påsen blåser upp sig. De dubbla förfiltrena minskar risken för att kolfiltret täpps igen av avföring och tillåter ett jämt luftflöde.
- **Mjukt material** - Det mjuka non-woven tyget i beige färg är starkt och vattenavvisande samt tyst och behagligt mot huden.
- **Smidigt och hygieniskt hide-away utlopp på tömbar påse** – Enkelt att tömma påsen och rengöra utloppets mynning utan kladd. Utloppet stängs med ett integrerat kardborrelås som är tätt efter stängning. Utloppet kan vikas in och gömmas på framsidan för diskretion eller ökad komfort. Välj mellan två lägen: Kardborrepunkt #1 eller #2 (påsen halveras).
- **Artikelnummer på påsen** - Artikelnumret är tryckt på påsen vilket förenklar för patient och vårdpersonal.
- **Bälte för bättre passform och säkerhet** – Använd Brava tvåpunktsbälte för att hålla den konvexa basplattan på plats för extra säkerhet. Bältet skapar ett jämt tryck på basplattan.
- **Brett sortiment** – SenSura stomisortiment består av förstansade och uppklippbara hålstorlekar, med påsar i olika storlekar i beige eller klar färg och med eller utan lucka för inspektion. Det finns även ett brett utbud av högflödespåsar och postoperativa bandage.

SenSura 2-dels Click - mekanisk koppling

Basplattan och påsen är två separata delar, ett så kallat 2-dels stomibandage. SenSura 2-dels Click är en mekanisk koppling med låsring som ger en ökad trygghet.

- ✓ **Ökad trygghet** - när påsen appliceras på basplattan och låses fast så hörs ett tydligt "klick" vilket ger en ökad känsla av trygghet hos stomipatienten.
- ✓ **Vridbar** - efter att påsen klickats fast kan man vrida påsen till önskad position utan att behöva ta bort påsen från basplattan.



Produktsortiment

SenSura® 2-dels Click basplatta

Ringstorlek	Hålstorlek	Bältesöron	Antal/fp	Antal/tpf	Artikelnr	Apoteksvarunr
40 mm	10–35 mm		5	160	100010	220132
40 mm	10–35 mm	•	5	160	100110	220136
40 mm	20–35 mm	•	5	160	100120	220138
40 mm	25–35 mm	•	5	160	100130	220139
50 mm	10–45 mm		5	160	100020	220133
50 mm	10–45 mm	•	5	160	100210	220140
50 mm	30–45 mm	•	5	160	100220	220141
50 mm	35–45 mm	•	5	160	100230	220142
60 mm	10–55 mm		5	160	100030	220134
60 mm	10–55 mm	•	5	160	100310	220143
60 mm	40–55 mm	•	5	160	100320	220144
70 mm	10–65 mm		5	160	100041	220135
70 mm	10–65 mm	•	5	160	100411	220146



SenSura® 2-dels Click Xpro basplatta

Ringstorlek	Hålstorlek	Bältesöron	Antal/fp	Antal/tpf	Artikelnr	Apoteksvarunr
40 mm	10–35 mm	•	10	160	100150	220437
40 mm	20–35 mm	•	10	160	100160	220438
40 mm	25–35 mm	•	10	160	100170	220439
50 mm	10–45 mm	•	10	160	100250	220440
50 mm	30–45 mm	•	10	160	100260	220441
50 mm	35–45 mm	•	10	160	100270	220443
60 mm	10–55 mm	•	10	160	100350	220444
60 mm	40–55 mm	•	10	160	100360	220445
70 mm	10–65 mm	•	10	160	100450	220446



SenSura® 2-dels Click sluten

Beige

	Ringstorlek	Volym	Inspektions- lucka	Antal/fp	Antal/TFP	Artikelnr	Apoteks- varunr
Mini	40 mm	110 ml		30	360	133040	730459
	50 mm	110 ml		30	360	133050	730460
Midi	40 mm	340 ml		30	360	133140	730462
	50 mm	340 ml		30	360	133150	730463
	60 mm	340 ml		30	360	133160	730464
Maxi	40 mm	550 ml		30	360	133240	730465
	50 mm	550 ml		30	360	133250	730466
	60 mm	550 ml		30	360	133260	730467
	70 mm	490 ml		30	360	133270	730468



SenSura® 2-dels Click tömbar

Beige

	Ringstorlek	Volym	Inspektions- lucka	Antal/fp	Antal/TFP	Artikelnr	Apoteks- varunr
Mini	40 mm	220 ml		30	360	148740	730469
	50 mm	220 ml		30	360	148750	730470
Midi	40 mm	420 ml		30	360	148840	730471
	50 mm	420 ml		30	360	148850	730472
	60 mm	420 ml		30	360	148860	730473
Maxi	40 mm	650 ml		30	360	148940	730474
	50 mm	650 ml		30	360	148950	730475
	60 mm	650 ml		30	360	148960	730476
	70 mm	510 ml		30	240	148970	730477



Klar

	Kragstorlek	Volym	Inspektions- lucka	Antal/fp	Antal/TFP	Artikelnr	Apoteks- varunr
Maxi	50 mm	650 ml		30	360	149050	730479
	60 mm	650 ml		30	360	149060	730480
	70 mm	510 ml		30	360	149070	730481

Användarinstruktioner

För instruktioner hur SenSura 2-dels Click Platt slutet och tömbar påse ska användas, se separat bruksanvisning på coloplast.se.

Bruksanvisning/IFU:



coloplast.to/bruksanvisningar

Förvaring

Produkterna ska förvaras i lådan tills de tas ur för användning, eftersom lådan skyddar produkterna och etiketten på lådan innehåller viktig information, som Lot-nummer, utgångsdatum och en unik streckkod.

Förvara produkten horisontellt.
Undvik direkt solljus.

Hållbarhet

Använd produkten före utgångsdatum angivet på förpackningen.

Sterilisering

Produkten är inte steriliserad

Coloplast Care

Alla som använder Coloplast stomiprodukter erbjuds att gå med i Coloplast Care, ett kostnadsfritt medlemsprogram, som ger tillgång till:

- Personlig rådgivning, stöd och produktvägledning via telefon eller hemsida
- Medlemstidningen Stomiliv som ges ut tre gånger per år
- Digitala verktyg, användarberättelser och nyhetsbrev som hjälper användaren att ta kontroll över sin livssituation

Anmälan till Coloplast Care görs via coloplast.se/coloplast-care, telefon 0300-332 56 eller via e-post se@coloplast.com.