

Fakta – SenSura® Mio Convex



Den nya SenSura Mio Convex finns tillgänglig från 1 oktober och finns med tre konvexa skal: Soft, Light och Deep.

För mer information, besök www.coloplast.se

- Vi är alla olika. Fyra av fem personer¹ med en stomi har någon slags peristomal utmaning (ärr, rynkor, veck etc) som gör det väldigt svårt för stomibandaget att sitta bra. Områden som buktar inåt är särskilt utmanande, då det är svårt för stomiplattan att få ett bra fäste i det djupt belägna området eller att hålla isär hudveckan.
- Idag används konvexa lösningar till stomier belägna i områden som buktar inåt. De har ett kurvformat skal, ett så kallat konvext skal, som är tänkt att skapa ett tryck runt stomin för att få stomin att skjutas fram från det djupt belägna området.
- Dagens konvexa lösningar är tyvärr väldigt stela och oflexibla då de har som uppgift att klara av att trycka fram stomin. De saknar flexibiliteten som gör att de kan anpassa sig mot den individuella kroppen och följa med i kroppens rörelser.
- 4 av 5 personer² som använder konvexa lösningar upplever läckage. Detta är en paradox, då konvexa lösningar förskrivs som en behandling, en problemlösare för att förebygga läckage.
- SenSura Mio Convex har ett anpassningsbart konvext skal som ger den nödvändiga stabiliteten och stödet för att få stomin att skjutas fram, men har samtidigt flexibiliteten som gör att den passar mot kroppen och följer med i kroppens rörelser. På detta sätt är det den första konvexa lösningen som inte kompromissar mellan stabilitet och flexibilitet.
- Hemligheten i SenSura Mio Convex ligger i flexlinjerna. De integrerade flexlinjerna är en specialgjord designlösning, liknande den du finner i sulan på en löparsko. Flexlinjerna gör inte bara produkten flexibel – de kontrollerar också var det konvexa skalet böjs.
- Även om SenSura Mio Convex är anpassningsbar, kan inte ett enda skal passa till alla typer av inbuktande områden eftersom områdena ser väldigt olika ut och är olika komplexa. Därför lanserar Coloplast ett helt sortiment bestående av tre konvexa skal: Soft, Light och Deep. Coloplast är det enda företaget som kan erbjuda detta kompletta sortiment.
- SenSura Mio Convex har dokumenterats i kliniska studier. Light och Deep visar dokumenterat minskad förekomst av läckage, den har en förbättrad passform mot kroppen och är bekvämare att bära samt visar på en förbättrad hälsorelaterad livskvalitet³. Soft visar att den minskar förekomsten av läckage jämfört med platta produkter och föredras framför jämförd konkurrentprodukt.⁴
- SenSura Mio Convex är den senaste produkten i Coloplast SenSura Mio stomisortiment, som initialt lanserades under 2014. Den har därför också alla fördelarna från SenSura Mio; den elastiska häftan, den neutralt grå färgen på påsen, cirkelfiltret och den nya Click-kopplingen.

¹ Coloplast IMS study, 2010. UK, US, DE, FR.

² Coloplast Ostomy Life Study, 2014. N>4000 people with a stoma worldwide.

³ Coloplast clinical study CP232. N=127 in DK, NO, UK, IT, NL, FR

⁴ Coloplast clinical study, CP241. N=38 in DK