

SenSura[®] Mio Flex 2-delsbandage


Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Urology Care



1. Borttagning av basplatta

Den använda påsen avlägsnas långsamt och förstiktigt från huden genom att ta tag i den vita fliken på häftan.

Undvik att dra i häftan när du avlägsnar den. Dra/rolla försiktigt häftan nedåt samtidigt som du trycker lätt mot huden med den andra handen. Rengör och torka huden torr.

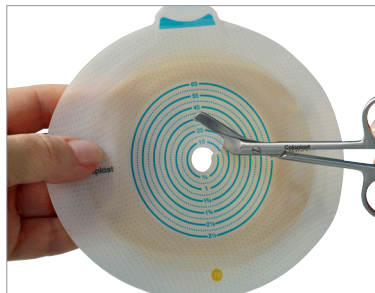

2. Klipp rätt storlek.

Rita av stomins form och storlek på klippguiden. Klipp sedan till rätt storlek med hjälp av en böjd sax. Det är viktigt att hålet i häftan passar perfekt runt stomin.

För att undvika läckage och hudirritationer är det väldigt viktigt att hålet är klippt så att hela huden runt stomin är täckt. **OBS!** Häftan ska inte klämma mot stomin.



3. Avlägsna skyddsfilmen

Avlägsna skyddsfilmen genom att sätta tummen på den turkos fliken på basplattan och dra bort skyddsfilmen.



4. Applicera basplattan

Sätt häftan runt stomin. Se till att påsen sitter perfekt runt stomin genom att böja tillbaka påsen och jämna ut häftan mot huden med ett lätt tryck med fingrarna. Börja nedifrån och gå uppåt. **Undvik att dra i häftan när du sätter på den.** Det kan medföra risk för läckage om häftan får veck. Stå eller sitt med rak rygg, så att inte huden sträcks onödigt mycket.



5. Tydlig turkos linje för enkel applicering

Påsen sätts säkert fast mot kragen genom att placera den yttre häftringens kant mot den nedre turkos linjen på kragen på basplattan. Håll gärna ett finger under kragen för att lättare se den turkos kanten.



6. Snabb och säker vidhäftning

Vik upp påsen och tryck häftkoppningen på plats mot kragen. Med början längst ner på påsen för du sakta fingrarna med ett lätt tryck uppåt, utmed påsen.



Tryck häftan ordentligt mot huden i 30-60 sekunder.

Låt samtidigt fingrarna löpa hela vägen runt stomin.

Tryck och tid - två viktiga parametrar

När häftan appliceras mot huden är det viktigt att "massera" fast häftan mot huden **under 30-60 sekunder** med ett lätt tryck.

Börja innerst mot stomin och fortsätt sedan över hela plattan. Trycket gör att häftan fäster in ordentligt mot alla veck och rynkor som kan finnas i huden, och sitter därmed säkrare.

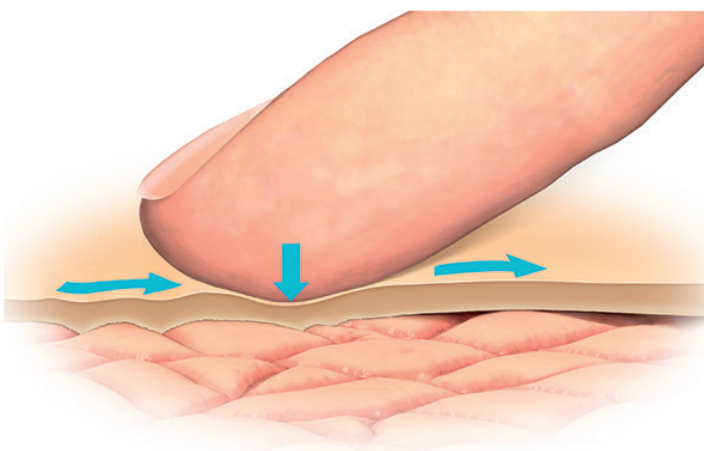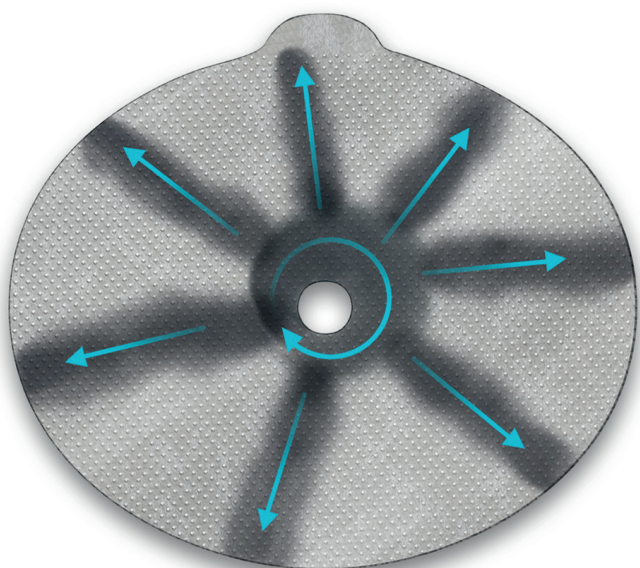

Brava®

Brava® Häftborttagning

Häftborttagning som inte svider

Häftborttagning används för att underlätta borttagning av stomihäftan utan att påverka vidhäftningen av nästa stomihäfta. Den svider inte och finns både som spray och våtservett.

