

Brava® Elastisk tejp

Extra säkerhet för alla kroppsprofiler

Brava Elastisk tejp används för att förhindra att kanterna på basplattan släpper och säkerställer att stomibandaget sitter säkert på plats.

- **Elastisk och följsam** – följer kroppens konturer och rörelser. Tejpen är 1,5 gånger mer elastisk än andra tejper på marknaden¹
- **Förlänger bårtiden** av stomibandget genom att förhindra att basplattans kanter lossnar
- **Hudvänlig** – absorberar fukt och är latexfri
- **Vattentät** – kan användas vid bad, simning eller andra vattenaktiviteter
- **Fasade kanter** – förhindrar att tejpens kanter släpper från huden
- **Tillgänglig** i tre modeller för att passa olika kroppsprofiler och basplattor



Brava® Elastisk tejp

	Styck/fp	Artikelnr	Apoteksvarunr
Halvmåneformad	20	120700	732900
Rak	20	120740	735000
Bälte	20	120720	735001

Så här använder du Brava Elastisk tejp



1. Applicera Brava Elastisk tejp efter applicering av stomibandaget eller basplattan.



2. Ta ut tejpens från förpackningen och ta bort den längre delen av skyddspapperet.



3. Applicera tejpens där det behövs extra förstärkning. Se till så att tejpens överlappar kanten på basplattan och fäster mot huden.



4. Ta bort den återstående delen av skyddspapperet.



5. Fäst resten av tejpens och släta till. Det är viktigt att du inte sträcker ut tejpens när den appliceras.



6. Använd ytterligare tejp om du behöver extra förstärkning.



Brava Elastisk tejp Halvmåneformad
Passar de flesta basplattor. Använd 1 eller 2 tejpbitar.



Brava Elastisk tejp rak
För fyrkantiga basplattor. Använd 1, 2, 3 eller 4 tejpbitar.



Brava Elastisk tejp bälte
Extra stöd på utåtbuktande områden eller när du använder bälte. Använd 1 eller 2 tejpbitar.

Borttagning av stomibandage



Dra försiktigt i fliken på basplattans ovansida eller i tejpens om den sitter längst upp. Använd en fuktig kompress eller häftborttagning för en mer skonsam borttagning.

Rulla försiktigt basplattan och tejpens nedåt samtidigt som du trycker lätt mot huden med den andra handen.

Tejpens lossnar vanligtvis tillsammans med basplattan. Det är inte skadligt om små mängder häftrester lämnas kvar på huden. Det försämrar inte heller vidhäftningen av nästa stomibandage.

Referens 1. Jämfört med Hollister Adapt Barrier Extender, Dansac X-tra Strips – VV-0127466.

Coloplast AB, 0300-332 56, www.coloplast.se, mail@coloplast.com.
Coloplast är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2023-11. Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Danmark. SP11007