

Brava® Formbar ring

Den mest hållbara ringen på marknaden¹

Brava Formbar ring används för en bättre passform mellan stomin och basplattan och skyddar huden mot läckage.

- **Skyddar huden** – absorberar fukt och skyddar huden från avföring eller urin för att hålla huden frisk
- **Lång hållbarhet** – marknadens mest hållbara ring som håller upp till 96 timmar¹ utan att luckras upp och vittra sönder
- **Förhindrar att stomibandaget släpper** – skapar en slät yta för stomibandaget att fästa på
- **Lätt att forma och applicera** så den sluter tätt kring stomin. Fyller även ut ärr och veck
- **Lätt att avlägsna** och lämnar inga rester på huden
- **Tillgänglig** i två tjocklekar



Brava® Formbar ring

Hålstorlek	Ringstorlek	Tjocklek	Styck/fp	Artikelnr	Apoteksvarunr
18 mm	48 mm	2,0 mm	30	120305	737302
18 mm	48 mm	4,2 mm	30	120425	737304

Så här använder du Brava Formbar ring



1. Se till att huden runt stomin är ren och torr.



2. Ta ut ringen från förpackningen och ta bort båda skyddspappren genom att dra i flikarna.



3. Forma och töj ringen till önskad form.



4. Tryck ringen försiktigt på plats. Justera formen igen vid behov.



5. Applicera stomibandaget.

Det finns flera sätt att applicera ringen t.ex:



1. Ringen kan appliceras direkt på basplattan innan stomibandaget appliceras på huden.



2. Riv eller klipp isär ringen och applicera omlott invid stomin. Börja alltid klockan tolv.

Borttagning av stomibandage



Dra försiktigt i fliken på basplattans ovansida. Använd en fuktig kompress eller häftborttagning för en mer skonsam borttagning av basplattan.

Rulla försiktigt basplattan nedåt samtidigt som du trycker lätt mot huden med den andra handen.

Ringens lossnar vanligtvis tillsammans med basplattan. Det är inte skadligt om små mängder häftrester lämnas kvar på huden. Det försämrar inte heller vidhäftningen av nästa stomibandage.

1. R&D lab test mot Eakin, Hollister 2011

Coloplast AB, 0300-332 56, www.coloplast.se, mail@coloplast.com.

Coloplast är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2023-11. Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Danmark. SP11008