

Brava[®] Häftborttagning

Snabb och enkel borttagning av stomibandaget

Brava Häftborttagning minskar risken för hudskada genom att enkelt ta bort stomibandaget och överblivna häftrester utan att påverka vidhäftningen av nästa stomibandage.

- **Skonsam häftborttagning** – Kräver 89%¹ mindre kraft vid borttagning av stomibandaget. Minskar risken för hudskador²
- **Hudvänlig** – Silikonbaserad lösning som är hudvänlig och gör det enklare att ta bort stomibandaget
- **Dofrfri**
- **Svider inte** – Innehåller ingen alkohol som kan ge sveda eller torka ut huden
- **Torkar på ett par sekunder** – Nästa stomibandage kan appliceras nästan direkt vilket underlättar snabba byten

Brava häftborttagning våtservett

- Tar bort häftrester på huden
- Praktisk förpackning



Brava häftborttagning spray

- Kan sprayas från alla vinklar för enklare handhavande
- Flaskan kan tömmas helt
- Innehåller ingen växthusgas vilket ger en mindre klimatpåverkan
- XL flaskan är mer kostnads-effektiv samtidigt som användningen av råmaterial minskar

Brava[®] Häftborttagning spray och våtservett

	Styck/fp	Artikelnr	Apoteksvarunr
Spray XL 75 ml	1	120120	731828
Spray 50 ml	1	120105	732901
Våtservett	30	120115	732904

Så här använder du Brava Häftborttagning spray



1. Spraya en gång uppifrån och in bakom basplattan.



2. Vänta. Efter ett par sekunder kan basplattan lätt avlägsnas.
Dra försiktigt i fliken på basplattans ovansida. Rulla försiktigt basplattan nedåt samtidigt som du trycker lätt mot huden med den andra handen.



3. Spraya igen vid behov.

Se till att huden är ren och torr innan du applicerar nästa stomibandage.

Så här använder du Brava Häftborttagning våtservett



1. Ta ut våtservetten från förpackningen och veckla ut den.



2. Torka bort häftrester på huden.



3. Se till att huden runt stomin är ren och torr innan du applicerar nästa stomibandage.

Du kan även använda våtservetten direkt ur förpackningen

1. Riv av ena hörnet på förpackningen.
2. Vik förpackningen diagonalt.
3. Pressa samman förpackningen, så att det droppar vätska ut från öppningen.
4. Droppa uppifrån och in bakom basplattan.
5. Vänta. Efter ett par sekunder kan stomibandaget lätt avlägsnas.
6. Upprepa vid behov.
7. Ta ut våtservetten ur förpackningen och torka bort eventuella häftrester på huden.



Tips Tillsätt en droppe vatten i våtservetten om du vill ha den fuktigare

1. Coloplast, Laboratory Report, Weartest on pig skin using adhesive remover spray, Data on file (VV-0286564)
2. The effect of Adhesive Remover Spray on skin stripping of ostomy products, 30-06-2016. Data on file